

LACCI EMOSTATICI

super-tex

Modello Tubolare

Formato 200 pz



Dispositivo medico - Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n° 46 attuazione della direttiva CEE 93/42

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzazioni tipiche:

I lacci emostatici Supertex in puro lattice di gomma vengono utilizzati come barriera meccanica per la compressione dei vasi sanguigni durante i prelievi venosi o come barriera meccanica a monte delle ferite per fermare l'emorragia.

Istruzioni:

Posizionare il laccio ed annodare. Prima di toglierlo allentare dolcemente.

Limitazioni all'uso:

Non lasciare in posizione oltre 20 minuti. Non usare su persone che siano allergiche al lattice di gomma. Usare solo su braccio e coscia.

Conservazione:

I lacci emostatici Supertex possono essere conservati secondo le normali tecniche di conservazione.

Smaltimento/eliminazione:

I lacci emostatici Supertex possono essere inceneriti o smaltiti in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente.

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione se correttamente conservati. Lotto.

TORNIQUETS

super-tex

Tubular model

200 pieces



Medical device - Class I Italian

Law Decree n°46 24/02/97 Implementation of EEC Directive 93/42

ISTRUCTIONS FOR USE

Typical uses:

Supertex latex rubber tourniquets may be used to compress blood vessels during blood sampling or as to stop haemorrhaging in the case of injury.

Instruction:

Apply tourniquet on position and tight. Before to remove reliaise gently.

Restrictions:

Don't use more then 20 minutes. Don't use for patients whit latex sensitivity. Use only for arm and thigh.

Conservation:

Supertex tourniquets should be kept according to normal procedures.

Disposal:

Supertex tourniquets may be burned or disposed in waste disposal units whitout any danger to the enviroment.

Expiration: 5 years from the production date if correctly conserved.

Super-Tex srl

Via S. Giuliano, snc 03039 Sora (Fr) Tel. 0776.890198 Fax 0776.892110

email: super-tex@libero.it