



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403

Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

LETTO A VALIGIA

Manuale d'uso



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

REF 27407



GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)
Italy

INTRODUZIONE

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei **DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I**.

“Scrosati Arredamenti Metallici s.r.l.” è regolarmente registrata come fabbricante di dispositivi medici di Classe I presso il Ministro della Salute.

Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

1. Adagiare la valigia con la maniglia sul lato superiore.
2. Aprire la valigia.
3. Aprire le gambe del letto completamente.
4. Girare il letto, solo quando le gambe sono completamente aperte e fisse, nella posizione corretta di uso.



Avvertenza d'Uso

- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo dopo aver verificato che le gambe sono aperte completamente.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.

MANUTENZIONE

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Pulire il letto senza utilizzare prodotti abrasivi o solventi. Asciugare con cura.
- Utilizzare solo ricambi originali.

GARANZIA

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.