

**TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 2 SEZIONI**  
**2 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE**  
**TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 2 SECTIONS**  
**2-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH**  
**CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE DOS SECCIONES**  
**MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 2 SEÇÕES**

Manuale d'uso - User's manual - Mode d'emploi - Bedienungshandbuch - Manual del usuario - Manual do usuário



**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

**REF 44020 - 44021 - 44024**



## ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica del tavolo. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura di alluminio.
2. Non sovraccaricare il tavolo oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche gravi per l'utente. Il prodotto è testato per sostenere un carico di lavoro massimo pari a 200 kg.
3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con un panno.
4. Prima di utilizzare il tavolo assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L'impiego del tavolo con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio del tavolo da parte di bambini, a meno che non siano sotto la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aghi, poiché potrebbero forare la copertura. Tenere il tavolo al riparo da oggetti taglienti o aghi.



## MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:



1




2



3



4

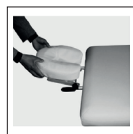

5



6

1. Sbloccare la chiusura.
2. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma sul pavimento; aprire il tavolo allungando al massimo tutte e quattro le gambe.
3. Estrarre tutti gli accessori e alzare il tavolo fino a portare tutte le sue gambe sul pavimento.
4. Collocare il supporto del poggiatesta nella sua sede; fissare il cuscino del poggiatesta sul rispettivo supporto.
5. Inserire i supporti dei due poggibraccia nei due fori ai lati del tavolo.
6. A questo punto il tavolo è pronto all'uso.

L'altezza del tavolo può essere regolata premendo i bottoni di rame sulla gamba. Tutte e quattro le gambe vanno regolate nella medesima maniera, una alla volta, assicurandosi di impostarle tutte allo stesso livello di altezza.

## CHIUSURA E TRASPORTO DEL TAVOLO

1. Estrarre tutti gli accessori.
2. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma a terra.
3. Collocare tutti gli accessori sotto la cinghia elastica dietro il rivestimento superiore.
4. Piegarlo il tavolo e bloccare la chiusura.
5. Collocare il tavolo per massaggi nella custodia da trasporto. Il tavolo può essere trasportato per la maniglia come una valigia.



**Attenzione:** Se la struttura del telaio/gambe/tavolo presenta qualsiasi tipo di danni, non utilizzare il tavolo. L'impiego del tavolo danneggiato può causare pericoli o infortuni gravi per voi o per i vostri pazienti. Il tavolo va riparato immediatamente.



