



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## BASTONE A LED

### Manuale utente




#### ATTENZIONE:

Prima dell'utilizzo, accertarsi di aver letto tutte le informazioni e le indicazioni!

- NON cercare di smontare da soli l'apparecchiatura.
- Non inserite aghi o elementi appuntiti nel manico.
- Non battere il bastone sul suolo o su superfici dure.
- ACCERTARSI di mantenere il bastone lontano dal fuoco.
- Spegnerne SEMPRE l'interruttore prima di estrarre le batterie.
- Max. capacità di peso **100 kg**.

### SPECIFICHE MANICO

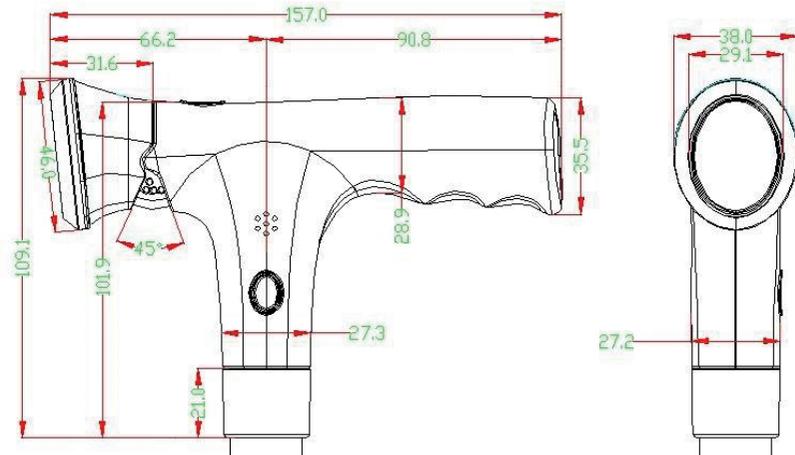


- 4 elementi di luce LED bianco ultra-brillante  $\phi$  5.
- 2 elementi di luce LED rosso ultra-brillante  $\phi$  5 - lampeggiante di avvertimento.
- Funzione sirena 100 dB.
- Fissaggio con nastro di fermo a mano.
- Bastone disponibile nei modelli pieghevole o regolabile.

### ASSEMBLAGGIO



Sollevare per aprire il coperchio sul retro.

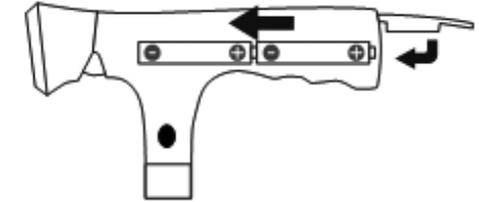


Posizionare due batterie AAA all'interno del manico, poi abbassare il coperchio per chiudere.

### FUNZIONAMENTO DELL'INTERRUTTORE ON/OFF



#### Pulsante superiore


- Premere una volta per accendere le luci LED.
- Premere due volte per accendere e fare lampeggiare simultaneamente le luci di avvertimento a LED bianche + rosse.
- Premere nuovamente per spegnere.

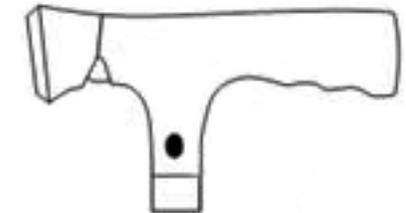

#### Pulsante laterale

- Premere per avviare il cicalino di avvertimento.

### NOTA DI IMPIEGO

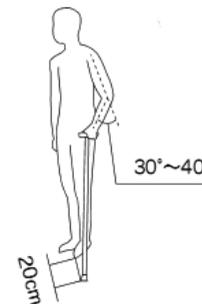

Posizione di utilizzo consigliata.



Bastone regolabile.

# LED CANE

## User manual




### WARNING:

Be sure to read all information and directions before use!!

- DO NOT try to disassembly this equipment by yourself.
- DO NOT insert any needle or sharp article into the grip.
- DO NOT knock the cane at the floor and any harden surface.
- ALWAYS turn off the switch before taking out the batteries.
- ENSURE to keep the cane from fire.
- **100kg** maximum weight capacity.

## GRIP SPECIFICATION

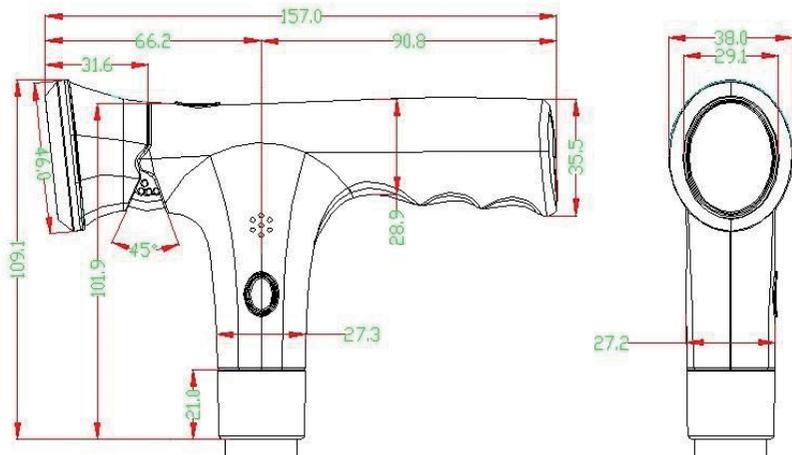

- 4 pieces of ultra-bright  $\phi$  5 white LEDs light.
- 2 pieces of ultra-bright  $\phi$  5 red LEDs flash warning.
- 100 dB siren function.
- Attach with a hand strap.
- Folding or adjustable cane available

REF 43050


Gima S.p.A.  
Gessate (MI) - Italy  
Made in P.R.C.



## ASSEMBLY




Flip up to open the lid on the back.

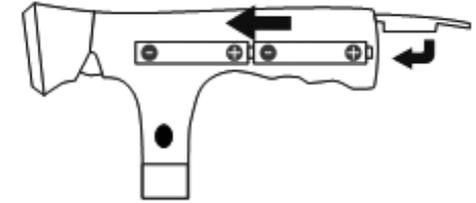


Put 2 pcs AAA batteries inside the grip, then flip down the lid to close it.

## FUNCTIONS OF SWITCH ON/OFF

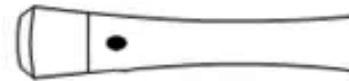

### Top button


- Push once to turn on the LEDs light.
- Push twice to turn on the warning white LEDs light + red LEDs flash simultaneously.
- Push again to turn it off.

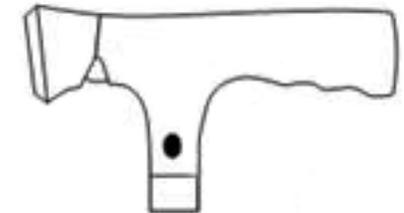

### Side button

- Push to start the buzzer warning.

## NOTE OF USE

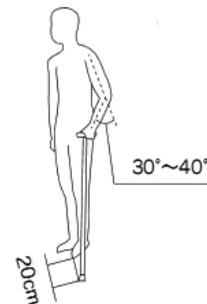

Best use position recommended.



Adjustable Cane.