



# Película Protectora Sin Ardor Cavilon<sup>®</sup>

- Película líquida transparente, transpirable, sin ardor que forma una barrera de protección persistente sobre la piel.

## CARACTERÍSTICAS

La Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon<sup>®</sup> es un excepcional protector barrera para la piel, de larga duración con amplio respaldo científico.

Su mecanismo de acción está dado por su alta afinidad a la epidermis, forma una película barrera protectora sobre la piel, ejerciendo una función PROTECTORA antihumedad frente a fluidos corporales (orina, heces, saliva, exudados entre otros).

La Película Protectora Sin Ardor 3M Cavilon<sup>®</sup> tiene 4 componentes esenciales:

- Terpolímero de acrilato: componente principal; material formador de película.
- Polifenilmetilsiloxano: plastificante.
- Hexametildisiloxano y Issooctano: solvente de base de silicona no irritante y de rápida evaporación.

Este producto no contiene ningún principio activo que dañe la piel.

## BENEFICIOS

Única película que brinda protección cutánea contra fluidos corporales y adhesivos médicos hasta por 72 horas continuas.

No es citotóxica y permite una aplicación sin dolor (ardor) porque no contiene alcohol, puede interactuar con heridas sin interferir en la reparación cutánea.

Mayor versatilidad que otras películas: se puede usar en múltiples indicaciones clínicas.

La presentación en sachet es estéril de uso individual. La otra presentación en Spray es un rociador multidosis.

## VENTAJAS

La Película Protectora sin Ardor Cavilon<sup>®</sup> de 3M se puede utilizar sobre piel dañada porque no produce dolor ni es citotóxica, esto se traduce en que no interviene con el proceso de cicatrización.

Película Protectora sin Ardor Cavilon<sup>®</sup> no afecta la adhesión de otros productos.

No se sale con exudado y líquidos.

No requiere ser removida para la siguiente aplicación.



# Un excepcional protector barrera para la piel.

## ■ Instrucciones de aplicación

1. Limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH neutro o con agua y jabón. Si usa jabón, enjuague muy bien con agua tibia (no caliente). Seque sin restregar.
2. Aplique una capa uniforme de la Película Protectora sin Ardor Cavilon®. Deje secar por completo. Puede aplicar una segunda capa si lo desea, pero no exceda las dos capas. Para mejores resultados con el frasco rociador, sosténgalo a 10 a 12 cm de la piel.
3. Si lo aplica sobre pliegues cutáneos, sosténgalos hasta que el producto seque completamente.



## ■ Usos médicos específicos

USOS ESPECIFICOS	TECNICAS DE APLICACION
Protección del área perineal contra la orina y las heces (incontinencia).	Aplique a partir de la zona anal y avance hacia afuera sobre los glúteos o la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador.
Protección de la piel periestomal contra la orina, heces o adhesivos.	Comience a aplicar en la piel cercana a la base del estoma y avance hacia fuera hasta abarcar toda la piel que debe ser cubierta con cinta o adhesivo para ostomías. Para mejores resultados use el frasco rociador, el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel que rodea heridas quirúrgicas o lesiones contra exudados, secreciones y fricciones.	Comience la aplicación en el borde de la herida y avance hacia afuera sobre la zona de exposición. Para mejores resultados use el frasco rociador, el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel alrededor de tubos, cánulas, sondas y otros dispositivos médicos contra el drenaje de fluidos corporales.	Aplique a partir del sitio por donde el dispositivo médico sale de la piel, y avance hacia fuera hasta abarcar toda la zona expuesta. Para mejores resultados use el frasco rociador o el hisopo de 1 ml.
Protección de la piel contra el daño causado por los adhesivos de uso médico.	Aplique la película en la piel que queda bajo el adhesivo; es necesario reaplicar la película cada vez que cambie el producto adhesivo.



Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
3343E	Película protectora Sin Ardor Cavilon® Sachet	Hisopo 1 ml	Caja	25
3346E	Película protectora Sin Ardor Cavilon® Spray	Botella 28ml	Caja	12