



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
Italia: tel 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com  
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 02 95380056  
- export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## MANUALE UTENTE

### NOME PRODOTTO:

Catetere Foley monouso

### DESTINAZIONE D'USO:

Drenaggio urinario

### INDICAZIONI D'USO

Aprire la confezione, estrarre il catetere Foley e connettere il tubo di raccordo alla sacca di raccolta, in seguito lubrificare la punta del catetere, introdurre lentamente la punta del catetere nel meato uretrale e proseguire l'introduzione fino alla collocazione in vescica. Gonfiare il palloncino di ancoraggio con soluzione fisiologica, fino a percepire resistenza in modo che il palloncino si ancori al collo della vescica. Fissare il catetere, sostituirlo dopo due giorni.

### NOME PRODOTTO:

Catetere Nelaton monouso

### DESTINAZIONE D'USO:

Drenaggio urinario

### INDICAZIONI D'USO

Aprire la confezione, estrarre il catetere Nelaton e connettere il tubo di raccordo alla sacca di raccolta, in seguito lubrificare la punta del catetere, introdurre lentamente la punta del catetere nel meato uretrale e proseguire l'introduzione fino alla collocazione in vescica. Dopo aver terminato le operazioni di drenaggio estrarre il catetere dall'uretra.

## SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto
	Non esporre ai raggi solari
	Teme l'umidità
	Monouso
	Non utilizzare nel caso la confezione sia danneggiata
	Sterilizzato a ossido di etilene

## SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni.



Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.  
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C.



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse, 80, D-20537, Hamburg, Germany

Rev. 1.10.11