

Istruzioni OtoClear

L'OtoClearTip Bionix è stato progettato per rendere l'irrigazione dell'orecchio più sicura, veloce ed efficace utilizzando l'Ear Lavage System o la Bottiglia Spray Wash.

Le punte OtoClearTips sono anche compatibili con TableTop Waterpik o siringhe Luer Lock.

Queste istruzioni sono scritte allo scopo di aiutare voi e di conseguenza i vostri pazienti, ad ottenere il maggior beneficio possibile dalla procedura di irrigazione.

PRIMA DI INIZIARE:

Esaminare il canale uditivo e la membrana timpanica con un otoscopio verificando il tipo e la posizione di eventuale cerume (il cerume compresso può richiedere un agente cerumenolitico).

PRECAUZIONI:

Non eseguire l'irrigazione se la membrana timpanica è perforata o se sono presenti tubi timpanostomici. Interrompere immediatamente l'irrigazione se si verifica sanguinamento, irritazioni o altri traumi al canale uditivo o della membrana timpanica.

Se si utilizza la Bottiglia Spray Wash per prima cosa collegare il tubo interno alla bottiglia.

1. Afferrare la punta OtoClear (come mostrato) e ruotare sul Luer Lock finché non si blocca.
2. Riempire il serbatoio con acqua tiepida (temperatura approssimativa del corpo). NON usare acqua fredda o calda in quanto può provocare vertigini in alcuni pazienti.
3. Effettuare alcuni spruzzi.
4. Inserire la punta OtoClear completamente nel condotto uditivo. Il design svasato della punta OtoClear protegge contro l'eccessivo inserimento. Suggerimento: il completo inserimento della punta aiuta ad evitare spruzzi.
5. Posizionare una bacinella sotto l'orecchio esterno per raccogliere l'acqua che fuoriesce. Nota: la punta OtoClear dirige l'acqua verso le pareti del condotto uditivo creando una lavanda turbolenta che rimuove efficacemente il cerume. La punta OtoClear evita gli spruzzi ed incanala l'acqua in uscita verso la bacinella.
6. Riesaminare il canale uditivo. Ripetere la procedura di irrigazione in base alle esigenze. In caso di eccesso di cerume, questo non passerà attraverso i fori della punta. In questo caso si consiglia l'utilizzo di una curette per estrarre ogni residuo di cerume.
7. Rimuovere l'acqua rimasta nel condotto uditivo con una spugna assorbente. La procedura è completa, rimuovere e smaltire la punta OtoClear, in quanto questa è monouso.



Oto Clear Tip #7200



Bionix Development Corp.
5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 - U.S.A.
Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678
www.Bionix.com



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net