

RIALZO WC RAISED TOILET SEAT



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. Non modificare per nessun motivo il rialzo WC assicurandosi sempre prima dell'uso che il rialzo WC sia ben fissato.

ATTENZIONE

Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo. È perciò importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione di contatto.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro.

PRECAUZIONI

Non superare la portata massima utilizzatore di 130 kg. Assicurarsi sempre prima dell'uso che il rialzo WC sia ben fissato al wc.

ATTENTIONS

The side-locks have been especially designed to allow for easy tightening therefore turning should not be continued once a resistance is felt.

CLEANING INSTRUCTIONS

All parts can be cleaned with warm water and neutral cleaner.

CAUTIONS

Do not exceed maximum user weight: 130 kg/286 lbs.

Always ensure the toilet seat is securely fixed before using.

Do not hold onto seat for support while rising/lowering.

Max gebruikersgewicht: 130 kg
Max Brugervægt: 130 kg
Max Brukarvikt: 130 kg
Max brukervekt: 130 kg

Portata massima utilizzatore: 130 kg
Max user weight: 130 kg / 286 lbs
Poids maxi utilisateur: 130 kg
Max Belastbarkeit: 130 kg
Peso máximo: 130 kg



Rialzo WC con braccioli fissi



cod. 27750

Rialzo WC con braccioli reclinabili



cod. 27751



