

---

# **BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE**

# **FOLDING ALUMINIUM WALKING STICK**

## **Manuale d'uso - User manual**

---

### **INTRODUZIONE**

Questo bastone, può essere piegato in 4 sezioni ed è adatto a essere riposto in una borsa quando non più in uso. Prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La punta è ricoperta da una gomma antiscivolo. Altezza Regolabile (da 80 cm a 90 cm.): la lunghezza va regolata in base all'altezza dell'utente.

### **NORME DI SICUREZZA**

Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per regolare l'apparecchio e per imparare ad usarlo in modo adeguato.

Non conservare all'esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari. Prima dell'utilizzo verificare se tutti i collegamenti sono serrati correttamente.

Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.

Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio) né sulle scale.

Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.

Carico massimo 100 Kg.

Usare solo parti originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso di lungo inutilizzo, far controllare l'apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.

Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l'usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

### **INSTALLAZIONE**

La messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato, un'errata regolazione potrebbe comportare un rischio di incidente.

Regolazione dell'altezza: allentare l'anello di serraggio. Premere il pulsante e far scivolare il tubo fino al foro di regolazione desiderato.

Far tornare il pulsante tornare in posizione di partenza. Avvitare l'anello di serraggio.

Per piegarlo, sganciare i tubi tra loro.

### **MANUTENZIONE**









Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto. L'impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi). Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

### **GARANZIA**

1 anno.

Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del prodotto.

**Simboli / Symbols**

 <p>IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully</p>	 <p>IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC</p>
 <p>IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place</p>	 <p>IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight</p>
 <p>IT - Fabbricante GB - Manufacturer</p>	 <p>IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use</p>
 <p>IT - Codice prodotto GB - Product code</p>	 <p>IT - Numero di lotto GB - Lot number</p>

**REF**
**27782**


Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in China

