

Codice	Misura
A8-3536	35-36
A8-3738	37-38
A8-3940	39-40
A8-4142	41-42
A8-4344	43-44
A8-4546	45-46
A8-4748	47-48



Indicazioni

Calzatura indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

Permette di scaricare il peso del corpo sull'avampiede e una miglior deambulazione anche in presenza di sostanziali alterazioni della forma del piede stesso.

Descrizione

Calzatura alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile e con ampio margine per favorire la calzatura.

Tessuto tomaia in materiale anallergico, traspirante e lavabile con bordino per applicazione del puntale di copertura.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo con rinforzo interno in acciaio antiflessione.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici).

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore nero

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

Calzatura post-operatoria ambidestra ACTIVA 8

Rev. 01

Aprile 2009

Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico.

Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti.

Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Produttore

INTERMED S.r.l.
Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI)

Codice CND **Y063303**

N. Repertorio **79016**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE