

3M División Médica
Tegaderm™ I.V.



Apósito Transparente

Tegaderm I.V.

Los apósitos transparentes 3M™ Tegaderm™ I.V. cuentan con un diseño exclusivo que le permite tener un mejor sellado del catéter; los extremos reforzados de tela suave para una mayor seguridad del catéter y apósito; y bandas adhesivas estériles para fijar conectores, tubos y lúmenes.

3M

Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ I.V. 1635



Aplicación del apósito



1. Remueva el recuadro central del apósito y colóquelo en el campo estéril con el adhesivo hacia arriba. Luego, remueva el apósito de su respaldo impreso, descubriendo el adhesivo del apósito.



2. Centre la sección transparente del apósito sobre el sitio de inserción del catéter. Presione firmemente toda la zona aplicada.



3. Coloque los extremos reforzados de tela suave por debajo de los tubos o lúmenes del catéter.



4. Sobreponga los bordes del corte superior de la tela suave para conseguir un buen sellado. Presione firmemente toda la zona aplicada.



5. Remueva el marco de aplicación. Alise los bordes del apósito.



6. Use las bandas adhesivas estériles para fijar el conector, tubos y/o lúmenes. Registre la fecha de aplicación y las iniciales del profesional o paciente en la etiqueta de registro. Aplique al apósito.

Remoción del apósito

1. Remueva las bandas adhesivas externas. Si es necesario, un algodón con alcohol ayudará a soltar el adhesivo.
2. Separe los extremos superpuestos de la tela suave. Manteniendo el catéter estable remueva el apósito hacia la dirección de la película transparente.
3. Remueva la sección transparente del apósito en la dirección del sitio de inserción y hasta remover toda la superficie del apósito. Deseche el apósito.

Información para pedidos

Apósito transparente 3M™ Tegaderm™ I.V. (Apósito compuesto)

No. Cat.	Nombre del producto	Tamaño	Apósitos/Caja	Cajas/Estuche
1635	3M™ Tegaderm™ I.V. Apósito Transparente con etiqueta	8.5 cm x 10.5 cm	50	4
1633	3M™ Tegaderm™ I.V. Apósito Transparente	7 cm x 8.5 cm	100	4



3M Perú S.A.

División Médica

Av. Enrique Canaval y Moreyra 641

San Isidro - Lima 27, Perú

224 2728 Teléfono

www.3m.com/pe