



SEMPLICEMENTE PIÙ EFFICIENTE.

AFINION™ CRP

Afinion™ CRP è un test rapido per uso diagnostico in vitro per la determinazione quantitativa della proteina C-reattiva (C-reactive protein, CRP) nel sangue umano, che contribuisce a ridurre le incertezze diagnostiche e a supportare il processo decisionale in materia di antibiotici durante la visita del paziente.¹

- Volume del campione: 2,5 µL
- Durata del test: 3 minuti
- Risultati affidabili
- Intervallo di misura su sangue intero 5-200 mg/L
- Nessuna esigenza di calibrazione da parte dell'utente
- Nessuna interferenza con antibiotici comuni e analgesici²



Afinion™ CRP

INFORMAZIONI

Afinion CRP è un semplice test con puntura del polpastrello in grado di offrire al paziente il valore CRP in pochi minuti durante la visita.

- Campione: sangue intero, siero o plasma
- Misurazioni accurate sul sangue intero, con correzione automatica in base all'ematocrito
- Correlazione eccellente con i metodi di laboratorio
- Precisione eccellente nell'intervallo di misura totale
- Conservazione: 4 settimane a temperatura ambiente

RACCOMANDAZIONI PER LE ANALISI

L'analisi in Point of Care aiuta a ridurre l'incertezza diagnostica e consente un uso degli antibiotici più mirato e prudente.³

- Le analisi per le cure primarie possono ridurre la prescrizione di antibiotici per le RTI fino al 42%
- L'analisi CRP in Point of Care deve sempre essere interpretata nel contesto di una valutazione clinica

PROCEDURA IN 3 PASSAGGI

1 Raccogliere il campione con il dispositivo di campionamento integrato.



2 Posizionare nuovamente il dispositivo di campionamento nella cartuccia.



3 Inserire la cartuccia nell'analizzatore e chiudere il coperchio. L'analisi si avvia automaticamente.



NUOVO AFINION 2 ANALYSER



Afinion 2 Analyser è il risultato di anni di continua innovazione e perfezionamento del prodotto e offre risultati in Point of Care affidabili e disponibili in pochi minuti.

Grazie alle dimensioni compatte e al pannello di test, il sistema Afinion 2 è la soluzione ideale per i test in Point of Care presso studi medici, strutture cliniche, poliambulatori, case di riposo, reparti di pronto soccorso e ambulatori ospedalieri. Da un semplice campione prelevato con puntura del polpastrello, il sistema è in grado di fornire già durante la visita risultati per CRP, HbA1c, ACR e profilo lipidico con accuratezza paragonabile a quella di laboratorio.

TEST DISPONIBILI

AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL

1. Stanton, N., Francis, N.A. and Butler, C.C. British Journal of General Practice 2010 Dec;60(581):e466-75.
2. Afinion CRP_Package Insert NOR_1116528_revB_PL_020218.pdf
3. Straight to the Point! Ensuring the Rational Use of Antibiotics in Primary Care using C-Reactive Protein Testing. A Consensus Report.

© 2019 Abbott. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati sono proprietà del gruppo Abbott o delle rispettive società. Le foto hanno scopo esclusivamente illustrativo. Le persone che compaiono nelle fotografie sono modelli. 10004079-02 2/19