

# 3M Coban™



Benda elastica autoaderente

---

3M Salute

# 3M Coban:™

*La benda COBAN™ è costituita da un supporto in tessuto non tessuto e da fibre elastiche incorporate in senso longitudinale.*

*La proprietà adesiva è ottenuta da un composto di lattice naturale e da altre sostanze specifiche ipoallergeniche.*

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI



COBAN™ aderisce su sè stessa, non si incolla alla pelle, ai peli, al cuoio capelluto. Non necessita di alcun fermaglio, non scivola e mantiene la compressione anche dopo l'applicazione.



COBAN™ è una benda compressiva elastica in senso longitudinale e trasversale. L'autoaderenza e l'elasticità della benda permettono di ottenere il livello di compressione desiderato.

Coban esercita una compressione regolare e costante.



L'assenza di adesivo e la struttura porosa di COBAN™ garantiscono il massimo comfort per il paziente grazie a:

- una eccellente tolleranza cutanea;
- elevati livelli di traspirabilità al vapore acqueo;
- una rimozione atraumatica e indolore.

Coban è ipoallergenica, minimizza quindi gli effetti di allergia e di macerazione della cute.



COBAN™ mantiene tutte le sue proprietà anche a contatto con l'acqua, conservando inalterato il livello di compressione.



COBAN™ viene fornita sterile in alcuni suoi formati; la sterilità del prodotto aiuta a prevenire il rischio di infezione.

# la compressione

*Grazie alle peculiari caratteristiche tecniche COBAN™ può essere utilizzata come bendaggio compressivo post operatorio per interventi di chirurgia vascolare (es.: stripping).*

*L'azione compressiva di COBAN™ garantisce una riduzione delle ecchimosi e un miglioramento della circolazione sanguigna.*



*Bendaggio compressivo dopo un intervento di safenectomia.*



- **COBAN™** può essere utilizzata anche in fase **pre operatoria** su pazienti con problemi di stasi circolatoria.
- Al fine di minimizzare i rischi di infezione si consiglia di utilizzare il prodotto nella nuova confezione già **sterile**.

# confortevole

*L'impiego di COBAN™ può dimostrarsi estremamente efficace se utilizzato come bendaggio compressivo post operatorio negli interventi chirurgici al ginocchio; in artroscopia garantisce una compressione ideale per migliorare il riassorbimento dei liquidi interstiziali e di distensione e riduce il rischio di flebiti migliorando la circolazione sanguigna.*



*Bendaggio compressivo dopo un intervento di artroscopia al ginocchio.*



*Bendaggio per il fissaggio dello strumento di trazione per interventi di artroscopia alla spalla.*



*Bendaggio compressivo per la prevenzione di flebiti dopo il rilascio della fascia ischemica in interventi di artroscopia al ginocchio.*


- **COBAN™** può essere utilizzata anche per effettuare il bendaggio dopo operazioni di inserimento di **chiodi di ENDER**.
- Al fine di minimizzare i rischi di infezione si consiglia di utilizzare il prodotto nella nuova confezione già **sterile**.

# la compressione

## ALTRI USI CONSIGLIATI:

- *Fissaggio di stecche o gessi a valva*
- *Leggere distorsioni*
- *Fissaggio di medicazioni*
- *Bendaggio compressivo in interventi di liposuzione*

## APPLICAZIONE E AVVERTENZE

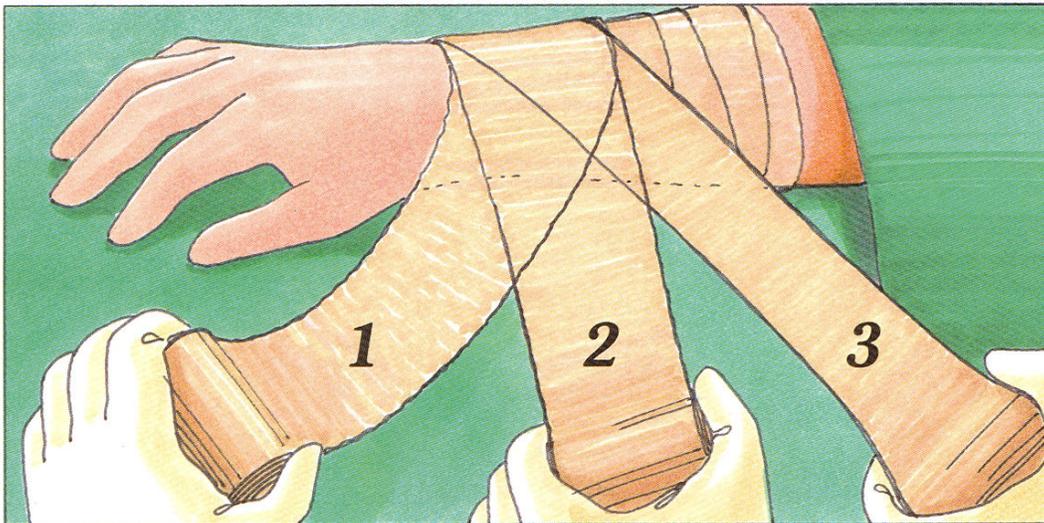

### GRADO DI TENSIONE E COMPRESSIONE

1) leggero 2) medio 3) forte

**COBAN™** deve essere applicata con una compressione adeguata all'impiego, la compressione è funzione della tensione con cui la benda viene utilizzata.

- Svolgere sempre circa 30 cm. di **COBAN™** e applicare evitando la massima tensione; svolgere sempre la benda prima di continuare la fasciatura.
- Come tutte le bende elastiche è necessario tenere sotto controllo la zona di applicazione in modo da prevenire i segni di infiammazione o di deficienza circolatoria (formicolio, gonfiore, etc.).
- **COBAN™** è fornita in alcune misure (color pelle) già sterile; è comunque un prodotto sterilizzabile a ossido di etilene, areando poi per 6-8 ore; togliere la benda dall'involucro trasparente prima di sterilizzare.

# 3M Coban™

**NUOVA**

## COBAN™ STERILE (color pelle)

Codice	Misure			Confezionamento
	Larghezza cm.	Lunghezza a riposo mt.	Lunghezza in tensione mt.	Rotoli per scatola
1583S	7,5	2,30	4,50	24
1584S	10	2,30	4,50	18
1586S	15	2,30	4,50	16

## COBAN™ (color pelle)

Codice	Misure			Confezionamento
	Larghezza cm.	Lunghezza a riposo mt.	Lunghezza in tensione mt.	Rotoli per scatola
1582	5,0	2,30	4,50	36
1583	7,5	2,30	4,50	24
1584	10	2,30	4,50	18
1586	15	2,30	4,50	16

## COBAN™ COLORATA

Codice	Misure			Confezionamento
	Larghezza cm.	Lunghezza a riposo mt.	Lunghezza in tensione mt.	Rotoli per scatola
Bianco 1583W	7,5	2,30	4,50	24
1584W	10	2,30	4,50	18
Blu 1583B	7,5	2,30	4,50	24
1584B	10	2,30	4,50	18
Verde 1583G	7,5	2,30	4,50	24
1584G	10	2,30	4,50	18
Giallo 1583Y	7,5	2,30	4,50	24
1584Y	10	2,30	4,50	18
Rosso 1583R	7,5	2,30	4,50	24
1584R	10	2,30	4,50	18

**3M**

Prodotti Medico Chirurgici Ospedalieri  
 3M Italia S.p.A.  
 20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice  
 Via S. Bovio, 3 - Tel. (02) 70351

MP 93/30 I.P.