



Espuma Hidrofílica Tegaderm[®] Foam

- Espuma Hidrofílica no adherente y altamente absorbente; Protege y favorece el proceso de reparación de la herida.

CARACTERÍSTICAS

El apósito hidrocélular 3M Tegaderm[®] Foam es un apósito para heridas no adherente, transpirable y altamente absorbente.

Está hecho de espuma de poliuretano moldeable cubierta de una película altamente transpirable a modo de protector. Dicha película evita que el exudado de la herida traspase y actúa como barrera frente a la contaminación exterior. El apósito mantiene la herida húmeda, lo cual ha demostrado mejorar la curación de la misma.

No contiene látex. Y la esterilización es mediante radiación gamma.

VENTAJAS

La espuma de poliuretano superabsorbente es capaz de absorber y retener grandes cantidades de líquido y proporciona un nivel significativamente mayor de control de los fluidos. La necesidad de realizar cambios de apósito durante el proceso de curación de la herida es menor.

Debido a la película de poliuretano, establece un equilibrio entre la absorción y evaporación del exudado a través de la lámina protectora. Dicha lámina permite que el apósito siga absorbiendo incluso cuando está al máximo de su capacidad de absorción.

Así mismo, permite la evaporación del exudado pero manteniendo el grado de humedad evitando que se produzca la desecación de la herida.



Alta capacidad de absorción.

BENEFICIOS

La alta capacidad de absorción es otra característica importante del apósito ya que permite que el exudado y demás fluidos se absorban sin que se produzca encharcamiento, y en consecuencia, reduce las posibilidades de migración del exudado y maceración de la piel perilesional lo cual se traduciría en un retraso en el proceso de curación.

A medida que el apósito absorbe, el exudado subirá a la parte superior del apósito. Cuando el exudado se extienda a los bordes del apósito, es necesario cambiarlo.

Indicaciones:

El apósito hidrocélular 3M Tegaderm® Foam está indicado para utilizarse como apósito primario en heridas de exudación moderada a alta y de grosor parcial a total, incluyendo:


- Úlceras por presión.
- Úlceras venosas en piernas.
- Abrasiones.
- Quemaduras de primer y segundo grado.

Aplicaciones adicionales del apósito incluyen el uso:

- Como apósito secundario para utilizarse conjuntamente con rellenos para heridas (como gasa o apósitos de alginato).
- Alrededor de los lugares de salida de tubos para absorber y acolchar.
- Bajo sistemas de vendajes compresivos para el tratamiento de úlceras vasculares en piernas.

Composición del Apósito:

- Espuma de poliuretano super absorbente.
- Película de poliuretano.
- Papel soporte siliconado.

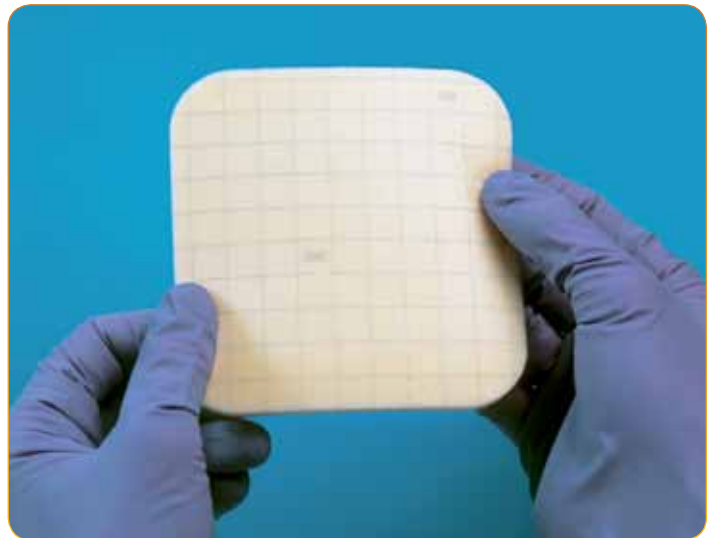

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
90600	Tegaderm® Foam	10 cm x 10 cm	Caja	10