

**AUSCULTAZIONE
e DIAGNOSTICA****3M™ Littmann® Classic III™**

Stetofonendoscopio a doppia membrana fluttuante

Destinazione d'uso

Lo stetofonendoscopio Littmann Classic III è indicato per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico-diagnostico. Per esclusivo utilizzo professionale.

Caratteristiche tecniche

Lo stetofonendoscopio Littmann Classic III ha due membrane fluttuanti brevettate che consentono la rilevazione delle basse e delle alte frequenze con entrambi i lati della testina.

Il lato con diametro maggiore può essere utilizzato per l'auscultazione su pazienti adulti, mentre quello con il diametro inferiore può essere utile per l'utilizzo pediatrico o con pazienti magri. Il lato pediatrico può essere convertito in campana, rimuovendo la membrana, per una più facile auscultazione delle basse frequenze.

Lo stetoscopio Littmann Classic III consente una rilevazione acustica ottimale con attenuazione di ogni possibile interferenza sonora.

Le principali caratteristiche sono:

- testina in acciaio inossidabile a doppia membrana fluttuante brevettata, con diaframma in fibra di vetro epossidica;
- membrana facilmente rimovibile per una più facile pulizia;
- indicatore lato testina attivo;
- esclusivo tubo in PVC speciale, resistente agli olii per la pelle e all'alcol, singolo, con canale acustico unico;
- ghiera e anello "anti-freddo" in neoprene.
- olivette morbide 3M™ Littmann brevettate, in silicone;
- archetto binauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna per il miglior adattamento.

La membrana fluttuante brevettata permette di rilevare sia le basse che le alte frequenze, senza dover ruotare la testina. Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione sulla testina.

Per la rilevazione delle alte frequenze, invece, è sufficiente esercitare una maggiore pressione.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale, gomma naturale lavorata e ftalati plastificanti.

Sterilità

Lo stetoscopio Littmann Classic III non è uno strumento sterile.

Dispositivo medico. Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42.

Classe I - Codice CND C9005.

Codice Prodotto	Lunghezza/Peso (cm)/(g)	Colore
5620	69/150	NERO
5622	69/150	BLU NAVY
5626	69/150	LAMPONE
5627	69/150	AMARANTO
5803	69/150	BLACK EDITION
5809	69/150	CIOCCOLATO FINITURE RAME
5832	69/150	LAVANDA
5835	69/150	TURCHESE
5839	69/150	LIME
5840	69/150	SMERALDO
5639	69/150	ROSA

Confezionamento/**Etichettatura**

Ogni stetofonendoscopio Littmann Classic III è confezionato in scatole di cartone.

L'etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d'uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto, in adempimento ai "requisiti essenziali" di cui all'allegato 1 (par.13) del D.Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

All'interno di ogni confezione è contenuto un libretto illustrativo multilingue con le istruzioni per l'uso anche in lingua italiana, che si raccomanda di leggere attentamente prima dell'uso.

Edizione 1 – Febbraio 2015

Documento riservato: vietati uso improprio e diffusione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione 3M.

3M, Littmann, il sigillo di qualità Littmann, la L, e Classic III sono marchi di fabbrica di 3M.

© 3M Italia S.r.l. 2015 – Tutti i diritti riservati

**AUSCULTAZIONE
e DIAGNOSTICA****Modalità di conservazione**

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e i 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc.

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Garanzia

Lo stetoscopio Littmann Classic III è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per cinque anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

3M Italia offre una gamma completa di parti di ricambio per la manutenzione di tutti gli stetoscopi, disponibili sia sul proprio sito online (www.3mshop.it) che presso i distributori autorizzati.

La fornitura delle parti di ricambio e l'eventuale assistenza tecnica sono erogate gratuitamente durante il periodo di garanzia dei prodotti.

Modalità d'uso / Avvertenze/Precauzioni

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetoscopio Littmann Classic III può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata. La membrana è facilmente removibile per una più facile pulizia.

Lo stetoscopio non va immerso in alcun liquido, né sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Aspetti ambientali

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Fabbricante e principali certificazioni

3M Health Care - St. Paul – Minnesota - U.S.A., è il fabbricante in possesso dei seguenti certificati:

ISO 9001:2008 "Sistemi gestione qualità"

ISO 13485:2003 "Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità"

3M Italia S.r.l., consociata italiana di 3M Health Care, è il distributore sul territorio nazionale ed è stata a sua volta certificata:

ISO 9001:2008 "Sistemi gestione qualità"

ISO 13485:2012 "Dispositivi Medici – sistemi gestione qualità"

ISO 14001:2004 "Sistemi gestione ambientale"



Infection Prevention Division

3M Italia srl – Via N. Bobbio, 21 – 20096 Pioltello MI

Tel. 02 70351 – 3mitalia.it/salute

Edizione 1 – Febbraio 2015

Documento riservato: vietati uso improprio e diffusione, anche parziale, salvo espressa autorizzazione 3M.

3M, Littmann, il sigillo di qualità Littmann, la L, e Classic III sono marchi di fabbrica di 3M.

© 3M Italia S.r.l. 2015 – Tutti i diritti riservati