

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Ureofix® 500 classic sacche di ricambio NG
Descrizione Prodotto	Sacche di ricambio per Ureofix 500 sistema chiuso per la misurazione della diuresi oraria
Codice Prodotto	Vedi elenco allegato
Divisione	Hospital Care
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazione	CE D.O.C. ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	I sterile
Codice CND	A06030399

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Sacche di ricambio per raccolta urina per Ureofix 500 classic

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso e comunque seguire i seguenti importanti suggerimenti per il corretto impiego del sistema:

Fissare l'urinometro alla sbarra superiore del letto con il gancio integrato o con le fibbie laterali in modo che il sistema sia al giusto livello.

Non posizionare la camera di misurazione al di sopra del livello della vescica.

Collegare il cono della sacca al connettore della camera di misurazione, ruotarlo verso destra e appendere il sacchetto ai ganci laterali.

Prima di collegare il tubo deflussore al catetere, chiudere la valvola di scarico.

Per prelevare l'urina, chiudere il serratubo posto al di sopra dell'Ureofix.

Per sostituire il sacchetto, chiudere la valvola di scarico.

Chiudere le pinze scorrevoli prima delle seguenti operazioni: connessione del dispositivo con il catetere, posizionamento in orizzontale durante il trasporto, prelievo di campioni d'urina.

INFORMAZIONI TECNICHE

Sacche per raccolta urina da utilizzarsi con Ureofix 500 classic.

Connettore per attacco di sicurezza alla camera di misurazione con sistema "a baionetta"

Graduate ad intervalli di 100 ml. Sacche doppiamente rinforzate sui bordi.

Spazio pre-stampato per i dati identificativi del paziente

Disponibili nelle versioni:

- Sacca chiusa con capacità da 1,5 litri e 3,5 litri con valvola antireflusso e filtro di ventilazione antibatterico e idrofobico.
- Sacca aperta da 2 litri con rubinetto di svuotamento e valvola antireflusso e filtro di ventilazione antibatterico e idrofobico.. (codice 4417551 Sacch.Rich.Ureofix500 Classic 2 l.con rubinetto)

Materiali

(per una valutazione di compatibilità biologica e chimico-fisica con tessuti e soluzioni infusionali e di termodistruzione)

Sacca di raccolta : polivinil-cloruro (PVC) DEHP Free (senza ftalati)

Tubo di raccordo : polivinil-cloruro (PVC-P)

Altri materiali usati per cappucci di protezione, raccordi, regolatori, clamp, ecc.: PP, PA, PE, Gas Paper 60

Gli inchiostri e i materiali usati per la stampa di etichette o per le stampigliature su raccordi, tubi, cateteri, ecc. sono assolutamente atossici.

Monouso	SI
Sterile alla vendita	Si
Metodo di sterilizzazione	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in <2ppm.
Mesi validità	60 mesi
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene.
Temperatura di conservazione	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"
Anno inizio commercializzazione	2011

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4417535	UREOFIX 500CLASSIC SACCA RIC. CHIUSA1,5L	A06030399	I sterile	SCADa 100 Pz.	439633/R
4417543	UREOFIX 500CLASSIC SACCA RIC. CHIUSA3,5L	A06030399	I sterile	SCADa 100 Pz.	439634/R
4417551	UREOFIX 500CLASSIC SACCA RIC RUBIN. 2,0L	A06030399	I sterile	SCADa 100 Pz.	439635/R