

## **SCHEDA TECNICA**

<b>Nome Commerciale:</b>	DAFILON® (BBS)
<b>Descrizione Prodotto:</b>	MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE
<b>Divisione:</b>	Aesculap
<b>Prodotto da:</b>	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
<b>Officina di produzione:</b>	B.Braun Surgical S.A., Rubí, Spagna
<b>Rappresentato in Italia da:</b>	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
<b>Certificazioni:</b>	D.O.C., CE, ISO
<b>Ente certificatore:</b>	0123
<b>Classe di rischio:</b>	Vedi elenco allegato
<b>Codice CND:</b>	Vedi elenco allegato

## **INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE**

### **Indicazioni:**

DAFILON® è indicato per l'approssimazione di tessuti ove sia necessaria una sutura permanente o qualora la tecnica utilizzata preveda la rimozione della sutura ad avvenuta cicatrizzazione.

### **Precauzioni:**

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

### **Reazioni a contatto con agenti topici disinfettanti:**

Gli studi effettuati in sede di progettazione e sviluppo e l'ormai consolidato uso clinico non hanno evidenziato reazioni di incompatibilità tra il prodotto e agenti topici disinfettanti

## INFORMAZIONI TECNICHE

### COMPOSIZIONE

Monofilamento in Poliammide 6.6 e Poliammide 6

### CARATTERISTICHE

La composizione e le caratteristiche di produzione di DAFILON® garantiscono:

- un avanzato processo di estrusione della molecola, che conferisce grado di memoria minore e facilità di eliminazione della stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente una elevata facilità di scorrimento e un grande equilibrio tra elasticità e plasticità;
- mancanza totale di capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;
- una prevedibile curva di assorbimento.

### Resistenza tensile post-impianto:

La resistenza tensile di DAFILON®, come tutte le suture in poliammide, si riduce di circa il 15% ogni anno.

### Colorazione:

DAFILON® è disponibile in colore blu (Poliammide 6) colorato con Pigment Blue 15:1, in colore nero (Poliammide 6.6) colorato con Hematein Logwood Black C.I. 75290 e non colorato nella tinta naturale beige.

### GAMMA DI PRODOTTO

DAFILON® è disponibile in combinazioni atraumatiche. Tutti gli aghi dei fili montati sono forati meccanicamente, e controllati con sistema computerizzato, e sono a canale chiuso, per garantire una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo.

Calibri disponibili: Da U.S.P. 11/0 a 1; da E.P. 0.1 a 4.

Lunghezze filo disponibili: Da 5 cm. di lunghezza a 100 cm.

Lunghezze ago disponibili: da 3 mm a 90 mm. Cuvature disponibili: 1/2 cerchio, 3/8 cerchio, retto, curvatura variabile.

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

## CARICHI DI ROTTURA

CALIBRO EP/USP	Resistenza tensile sul nodo/Kg Valore medio	Resistenza tensile sul nodo/N Valore medio	Resistenza attacco ago/filo/ Kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo/N. Valore medio
0,1-11/0	0,006	0,059	0,012	0,11
0,2-10/0	0,019	0,19	0,021	1,96
0,3-9/0	0,043	0,42	0,051	0,50
0,4-8/0	0,06	0,59	0,08	0,78
0,7-6/0	0,27	2,64	0,30	2,94
1-5/0	0,63	6,17	0,55	5,39
1,5-4/0	0,88	8,62	0,93	9,11
2-3/0	1,52	14,89	1,63	15,97
3-2/0	3,05	34,30	2,86	28,02
3,5-0	3,75	36,75	3,50	34,30
4-1	4,60	45,08	3,00	29,40

## CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che mantiene un ottimale grado di penetrazione dopo vari passaggi. Gli aghi montati su DAFILON® sono tutti di colore "silver" o acciaio naturale.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie	Serie	Serie
	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>455</b>
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5
Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5

Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm 20.500 kg/mm2	200.000 N/mm2 20.500 kg/mm2
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

Curvatura		Corpo		Punta		Lunghezza	Spessore	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar		Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff
V	1/4 cerchio	S	tagliante	N	punta smussa	f		ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale	s		rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta	ss		super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro-punta	v		a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione	b		nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			
SK				B	punta di protezione			

## CONTROLLI DI QUALITA'

### Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

### Controlli di qualità "in process":

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

### Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui

all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medico, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

## DATI TECNICI

<b>Monouso:</b>	Si
<b>Poliuso:</b>	NO
<b>Sterile alla vendita:</b>	SI
<b>Risterilizzabile:</b>	NO
<b>Medodo di sterilizzazione:</b>	Sterilizzazione a Raggi Gamma per i calibri 6/0-1 e ad Ossido di etilene per i calibri 7/0-11/0 utilizzati in microchirurgia. Esistono speciali combinazioni non sterili da microchirurgia per scopi didattici.
<b>Validità:</b>	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione; indicata sulla confezione e su ogni singola busta
<b>Presenza di lattice:</b>	No
<b>Confezionamento:</b>	<p>Il confezionamento primario è costituito da un doppio confezionamento sterile, che garantisce accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso, facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura. All'interno della confezione primaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Descrizione della confezione:</p> <p>La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo.</p> <p>La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE;</li> <li>· involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio;</li> <li>· supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE;</li> </ul> <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128),</p>

	<p>posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione. La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione: G= 12 buste, B = 24 buste, C = 36 buste.</p>
<b>Biocompatibilità</b>	<p>Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test</p>
<b>Presenza ftalati:</b>	<p>No</p>

## LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0436532	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 6X45CM	H010201010101	Ila	SCA 24	941154/R
B0436538	DAFILON BLU 3 (6) 6X45CM LPCE	H010201010101	Ila	PAC da 24 PZ	1892817/R
B0436650	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 10X45CM	H010201010102	Ila	SCA 24	381956/R
B0436658	DAFILON BLU 3/0 (2) 10X45CM	H010201010102	Ila	SCA 24	941175/R
B0436674	DAFILON BLU (2,5) 10X45CM	H010201010102	Ila	SCA 24	941301/R
B0436675	DAFILON BLU 2/0 (3) 10X45CM	H010201010102	Ila	SCA 24	941176/R
B0930010	DAFILON BLU 2 (5) 90CM HR48 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 24 PZ	1892818/R
B0931640	DAFILON BLUE 2 (5) 75CM DS48 DDP	H010201010101	Ila	SCA 24	1279489/R
B0932730	DAFILON BLU 0 (3,5) 75CM 2XGR65	H010201010101	Ila	SCA 24	382289/R
B0934579	DAFILON BLU 2 (5) 90CM DS39 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 24 PZ	1874099/R
B0935743	DAFILON BLU 1 (4) 100CM HR40S DDP	H010201010101	Ila	PAC da 24 PZ	1778245/R
B0935905	DAFILON BLU 2/0 (3) 100CM DS60	H010201010101	Ila	SCA 24	382239/R
B0935913	DAFILON BLU 0 (3,5) 100CM DS60	H010201010101	Ila	SCA 24	382240/R
C0912224	DAFILON INCOLORE 3/0 (2) 75CM GS60 (M) DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	941274/R
C0916055	DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	1422981/R
C0916065	DAFILON UNDYED 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	1422984/R
C0916122	DAFILON INCOLORE 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381959/R
C0916133	DAFILON INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381960/R
C0916134	DAFILON INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381961/R
C0916143	DAFILON INCOLORE 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381962/R
C0916144	DAFILON INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381963/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0916154	DAFILON INCOLORE 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381964/R
C0916155	DAFILON INCOLORE 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381965/R
C0916165	DAFILON INCOLORE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	381966/R
C0930018	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 45CM DSMP7 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	941157/R
C0930040	DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM 2XGR75 PEEL CE	H010201010101	Ila	SCA 36	941277/R
C0930095	DAFILON BLUE 1 (4) 75CM DS35 DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	1340283/R
C0930158	Dafilon blue 2/0 75CM HR26S	H010201010101	Ila	SCA 36	1070566/R
C0930210	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 75CM HR22 DDP	H010201010101	Ila	SCA da 1 PZ	1562526/R
C0930423	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM HR26 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1874100/R
C0930431	DAFILON BLU 0 (3,5) 75CM HR26	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1656078/R
C0930482	DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HR30	H010201010101	Ila	SCA 36	941166/R
C0930601	DAFILON BLU 2/0 (3) 100CM HR30 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1874101/R
C0931071	DAFILON BLU 5/0 (1) 75CM DR12 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1703916/R
C0931640	DAFILON BLU 2 (5) 75CM DS48	H010201010101	Ila	SCA 36	941158/R
C0932019	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 45CM DS9	H010201010101	Ila	SCA 36	941159/R
C0932060	DAFILON BLU 6/0 (0.7) 45CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 36	381977/R
C0932078	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 36	381978/R
C0932086	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 36	381979/R
C0932116	DAFILON BLU 6/0 (0.7) 45CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381980/R
C0932124	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381981/R
C0932132	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381982/R
C0932140	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381983/R
C0932191	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381987/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0932205	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	382086/R
C0932213	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	382237/R
C0932221	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	382238/R
C0932345	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381994/R
C0932353	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381995/R
C0932361	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381996/R
C0932370	DAFILON BLUE 0 (3,5) 45CM DS24 DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	381957/R
C0932450	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	941138/R
C0932469	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382004/R
C0932477	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382005/R
C0932485	DAFILON BLU 0 (3.5) 45CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382006/R
C0932493	DAFILON BLU 1 (4) 45CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382007/R
C0932540	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	382017/R
C0932558	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	382018/R
C0932566	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	382019/R
C0932574	DAFILON BLU 1 (4) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	382020/R
C0932612	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM HS48	H010201010101	Ila	SCA 36	941160/R
C0932620	DAFILON BLU 1 (4) 75CM HS48	H010201010101	Ila	SCA 36	381976/R
C0932655	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 36	382027/R
C0932663	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 36	382028/R
C0932710	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM GS75 PEEL	H010201010101	Ila	SCA 36	382031/R
C0932736	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM GS45	H010201010101	Ila	SCA 36	941161/R
C0932760	DAFILON BLUE 0 (3.5) 75CM HS40	H010201010101	Ila	SCA 36	941156/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0932779	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM GS45	H010201010101	Ila	SCA 36	941162/R
C0932809	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS35	H010201010101	Ila	SCA 36	1340284/R
C0932876	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 90CM HS21	H010201010101	Ila	SCA 36	381967/R
C0932884	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM HS21	H010201010101	Ila	SCA 36	381968/R
C0932957	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM HS26	H010201010101	Ila	SCA 36	381970/R
C0933066	DAFILON BLU 6/0 (0,7) DS12 (M) DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	382293/R
C0933112	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 45CM DS16 (M) DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1493064/R
C0933210	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	382292/R
C0933252	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	382246/R
C0933384	DAFILON BLU 4/0 (1,5) 75CM DS24 (M)	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1562532/R
C0933392	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS24 (M)	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1562533/R
C0933430	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DS30 (M) DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1493070/R
C0933901	DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DGMP19	H010201010101	Ila	SCA 36	1205384/R
C0933902	DAFILON BLUE 3/0 (2) 75CM DGMP16	H010201010101	Ila	SCA 36	1271224/R
C0933903	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 45CM DGMP13	H010201010101	Ila	SCA 36	1205413/R
C0933904	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 75CM DGMP16	H010201010101	Ila	SCA 36	1205414/R
C0933905	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 75CM DGMP19	H010201010101	Ila	SCA 36	1205415/R
C0933906	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP13	H010201010101	Ila	SCA 36	1271223/R
C0933907	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP16	H010201010101	Ila	SCA 36	1205417/R
C0933908	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DGMP11	H010201010101	Ila	SCA 36	1271222/R
C0934003	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM HS30	H010201010101	Ila	SCA 36	381972/R
C0934011	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM HS30	H010201010101	Ila	SCA 36	381973/R
C0934046	DAFILON BLU 1 (4) 90CM HS37	H010201010101	Ila	SCA 36	941255/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0934054	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM HS37	H010201010101	Ila	SCA 36	381975/R
C0934061	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 75CM DS12 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	941136/R
C0934070	DAFILON BLU 5/0 (1) 75CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 36	941137/R
C0934224	DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS48	H010201010101	Ila	SCA 36	1333321/R
C0934391	DAFILON BLU 0 (3,5) 90CM DS30 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1874102/R
C0934410	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382012/R
C0934429	DAFILON BLU 1 (4) 90CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382014/R
C0934569	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	381934/R
C0934573	DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	941165/R
C0934577	DAFILON BLU 1 (4) 90CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	382015/R
C0934579	DAFILON BLU 2 (5) 90CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 36	941276/R
C0934658	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 36	382029/R
C0934690	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 36	382030/R
C0934691	DAFILON BLU 0 (3,5) 90CM GS60 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1714703/R
C0934780	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM DS35	H010201010101	Ila	SCA 36	382016/R
C0934801	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM DS35	H010201010101	Ila	SCA 36	382297/R
C0934810	DAFILON BLU 0 (3.5) 90CM DS35	H010201010101	Ila	SCA 36	941155/R
C0934836	DAFILON BLUE 1 (4) 90CM DS35 DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	381958/R
C0934925	DAFILON BLU 1 (4) 100CM DS90 PEEL	H010201010101	Ila	SCA 36	941134/R
C0934968	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM HS26	H010201010101	Ila	SCA 36	381971/R
C0935002	DAFILON BLU 0 (3,5) 75CM HS30	H010201010101	Ila	SCA 36	941163/R
C0935034	DAFILON BLU 1 (4) 75CM HS30	H010201010101	Ila	SCA 36	381974/R
C0935107	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381986/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0935123	DAFILON BLU 5/0 (1) 75CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381984/R
C0935131	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DS16	H010201010101	Ila	SCA 36	381985/R
C0935190	DAFILON BLU 5/0 (1) 75CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	382241/R
C0935204	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381988/R
C0935212	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381989/R
C0935213	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381933/R
C0935220	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 90CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381991/R
C0935239	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381992/R
C0935247	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381993/R
C0935255	DAFILON BLU 5/0 (1) 90CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 36	381990/R
C0935294	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DR22 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1874103/R
C0935310	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 90CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	382242/R
C0935328	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	382002/R
C0935336	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	382003/R
C0935344	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381997/R
C0935352	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381998/R
C0935360	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	381999/R
C0935379	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	382000/R
C0935380	DAFILON BLU 1 (4) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 36	382001/R
C0935468	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382008/R
C0935476	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382009/R
C0935484	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382010/R
C0935492	DAFILON BLU 1 (4) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382011/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0935522	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 36	382013/R
C0935565	DAFILON BLUE 0 (3.5) 90CM GS51	H010201010101	Ila	SCA 36	1042208/R
C0935573	DAFILON BLU 1 (4) 90CM GS51	H010201010101	Ila	SCA 36	382026/R
C0935590	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 90CM GS51	H010201010101	Ila	SCA 36	382023/R
C0935603	DAFILON BLU 3/0 (2) 90CM GS51	H010201010101	Ila	SCA 36	382024/R
C0935611	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM GS51	H010201010101	Ila	SCA 36	382025/R
C0935735	DAFILON BLU 1 (4) 90CM GS65 DDP	H010201010101	Ila	PAC da 36 PZ	1874104/R
C0935739	Dafilon blue 1 HR37S	H010201010101	Ila	SCA 36	1070567/R
C0935963	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM HS26 DDP	H010201010101	Ila	SCA 36	941164/R
C0935964	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM HS26	H010201010101	Ila	SCA 36	381969/R
C0936014	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382033/R
C0936022	DAFILON BLU 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382032/R
C0936081	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382034/R
C0936090	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382035/R
C0936103	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382036/R
C0936146	DAFILON BLU 6/0 (0.7) 45CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382244/R
C0936154	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382037/R
C0936162	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382038/R
C0936227	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382039/R
C0936235	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382040/R
C0936243	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382041/R
C0936316	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382044/R
C0936324	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382045/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
C0936650	DAFILON BLU 5/0 (1) 75CM DSMP16 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382245/R
C0936731	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382042/R
C0936740	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DSMP19 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382043/R
C0936812	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382046/R
C0936820	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DSMP24 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	382047/R
C0938505	DAFILON BLU 2/0 (3) 90CM 2XGR65	H010201010101	Ila	SCA 36	382243/R
C0977212	DAFILON NERO 7/0 (0,5) 45CM DSMP11 (M)	H010201010101	Ila	SCA 36	941435/R
G0932060	DAFILON BLU 6/0 (0,7) 45CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 12	941260/R
G0932078	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DS12	H010201010101	Ila	SCA 12	941261/R
G0932191	DAFILON BLU 5/0 (1) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 12	941293/R
G0932205	DAFILON BLU 4/0 (1,5) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 12	941294/R
G0932213	DAFILON BLU 3/0 (2) 45CM DS19	H010201010101	Ila	SCA 12	941295/R
G0932361	DAFILON BLU 2/0 (3) 45CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 12	382295/R
G0932540	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 12	941296/R
G0932558	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS39	H010201010101	Ila	SCA 12	941262/R
G0932655	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 12	941297/R
G0932663	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM GS60	H010201010101	Ila	SCA 12	941263/R
G0935344	DAFILON BLU 4/0 (1.5) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 12	941298/R
G0935352	DAFILON BLU 3/0 (2) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 12	941264/R
G0935360	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 12	941299/R
G0935379	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM DS24	H010201010101	Ila	SCA 12	941300/R
G0935484	DAFILON BLU 0 (3.5) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 12	941265/R
G0935492	DAFILON BLU 1 (4) 75CM DS30	H010201010101	Ila	SCA 12	941266/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0935964	DAFILON BLU 2/0 (3) 75CM HS26	H010201010101	Ila	SCA 12	941267/R
G1110012	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 15CM DLM4	H010201010101	III	SCA 12	382070/R
G1110020	DAFILON NERO 10/0(0,2)15CM DLM4 125MIC BLT	H010201010101	III	SCA 12	382197/R
G1110055	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 8CM SLM6	H010201010101	III	SCA 12	941195/R
G1111140	DAFILON NERO 9/0(0,3)15CM DRCM5	H010201010101	III	SCA 12	382195/R
G1111213	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 30CM 2XDLM6	H010201010101	III	SCA 12	382291/R
G1111248	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 45CM 2XDLM6S	H010201010101	III	SCA 12	1300642/R
G1111434	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM DRM5	H010201010101	III	SCA 12	382054/R
G1111693	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM DLM5 150MIC	H010201010101	III	SCA 12	1293229/R
G1111922	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 20CM 2XPLM5	H010201010101	III	SCA 12	382085/R
G1117033	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 15CM DRM3 NS	H010201010101	III	SCA 12	941118/R
G1117041	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRM3	H010201010101	III	SCA 12	382049/R
G1117092	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRM4 NS	H010201010101	III	SCA 12	941184/R
G1118013	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRM6	H010201010101	III	SCA 12	382055/R
G1118030	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM HRM8	H010201010101	III	SCA 12	941185/R
G1118048	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRCM3	H010201010101	III	SCA 12	382058/R
G1118064	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 5CM DRM3	H010201010101	III	SCA 12	382048/R
G1118072	DAFILON BLK 10/0 (0.2) 5CM DRM3	H010201010101	III	SCA 12	941186/R
G1118080	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 10CM DRM4	H010201010101	III	SCA 12	382050/R
G1118099	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 10CM DRM4	H010201010101	III	SCA 12	382051/R
G1118110	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRM5	H010201010101	III	SCA 12	382053/R
G1118129	DAFILON BLK 10/0 (0.2) 10CM DRM4S	H010201010101	III	SCA 12	941187/R
G1118137	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 10CM DRM4S	H010201010101	III	SCA 12	382052/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G1118138	DAFILON BLACK 8/0 (0.4) 10CM DRM4S	H010201010101	III	SCA 12	941188/R
G1118161	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM DRM6	H010201010101	III	SCA 12	382056/R
G1118170	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM DRM6	H010201010101	III	SCA 12	382057/R
G1118188	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 10CM DRM4 NS	H010201010101	III	SCA 12	941189/R
G1118196	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DRM5 NS	H010201010101	III	SCA 12	941114/R
G1118200	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM DRM5 NS	H010201010101	III	SCA 12	941117/R
G1118218	DAFILON NERO 9/0(0,3) 15CM DRM6 140MI	H010201010101	III	SCA 12	941434/R
G1118226	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM DRM6 NS	H010201010101	III	SCA 12	941115/R
G1118250	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM 2XDRM5	H010201010101	III	SCA 12	941190/R
G1118331	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 7CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	382073/R
G1118366	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 10CM DRM3	H010201010101	III	SCA 12	941191/R
G1118374	DAFILON NERO 11/0 (0.1) 8CM HRM4	H010201010101	III	PAC da 12 PZ	1612575/R
G1118390	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM PRM6	H010201010101	III	SCA 12	382061/R
G1118412	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 8CM PRCM5	H010201010101	III	SCA 12	382063/R
G1118420	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 13CM PRCM5	H010201010101	III	SCA 12	382064/R
G1118439	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM PRCM6	H010201010101	III	SCA 12	941192/R
G1118447	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 3CM 2XPRCM5	H010201010101	III	SCA 12	382062/R
G1118463	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 8CM PRM4	H010201010101	III	SCA 12	382059/R
G1118471	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 13CM PRM5	H010201010101	III	SCA 12	382060/R
G1118560	DAFILON BK 8/0 (0,4) 15CM HLM8 200MI BLT	H010201010101	III	SCA 12	941193/R
G1118579	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM DLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382081/R
G1118609	DAFILON BK 10/0(0,2)30CM 2XHLM6	H010201010101	III	SCA 12	382196/R
G1118617	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 30CM 2XHLM6	H010201010101	III	SCA 12	382069/R

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CND</b>	<b>Classe</b>	<b>Confezione</b>	<b>N° Repertorio</b>
G1118625	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM HLM6	H010201010101	III	SCA 12	382065/R
G1118633	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM HLM6	H010201010101	III	SCA 12	382066/R
G1118641	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 30CM HLM6	H010201010101	III	SCA 12	382067/R
G1118650	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 30CM HLM6	H010201010101	III	SCA 12	382068/R
G1118668	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 5CM 2XDLM6	H010201010101	III	SCA 12	382078/R
G1118684	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DLM5	H010201010101	III	SCA 12	382071/R
G1118706	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6	H010201010101	III	SCA 12	382076/R
G1118714	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6	H010201010101	III	SCA 12	382077/R
G1118722	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	382074/R
G1118730	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	382075/R
G1118737	DAFILON NERO 10/0(0,2) 30CM 2XHLM8 200M	H010201010101	III	PAC da 12 PZ	464987/R
G1118749	DAFILON NERO 10/0(0,2)30CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	382198/R
G1118757	DAFILON BK 9/0(0,3) 30CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	382199/R
G1118765	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382083/R
G1118773	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382084/R
G1118781	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382079/R
G1118790	DAFILON NERO 9/0 (0.3) 15CM DLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382080/R
G1118838	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 30CM DLM5	H010201010101	III	SCA 12	941194/R
G1118854	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 45CM DLM6S	H010201010101	III	SCA 12	382082/R
G1118862	DAFILON NERO 10/0 (0.2) 30CM 2XDLM5	H010201010101	III	SCA 12	382072/R
G1118870	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 30CM 2XDLM6	H010201010101	III	SCA 12	1300641/R
G1118889	DAFILON NERO 8/0 (0.4) 15CM DLM6	H010201010101	III	SCA 12	941116/R