

REF KDB-504E (GIMA 27704)

Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



FRANÇAIS

NOM

Côté de lit

Numéro de modèle: KDB-504E

USAGE PRÉVU:

L'appareil est conçu comme objet de saisie pour éviter que le patient, la personne âgée et fragile ne glisse lorsqu'il entre ou sort du lit.

Modèle	Spécifications	Support de charge	Matériau	Dessin	Pliable	Réglable en hauteur
KDB-504E	Côté de lit	125KG	Fer		OUI	OUI

Il est prévenu les utilisateurs qui ont des réactions allergiques à certaines protéines du latex que les pieds contiennent du caoutchouc naturel.

SOIN ET MAINTIEN

1. Nettoyer, essuyer avec un chiffon humide ;

2. Toute pièce supplémentaire ou de remplacement doit provenir uniquement du fabricant.

EMBALLAGE

Mettre le côté de lit dans un sac en plastique, et le placer dans un carton.

STOCKAGE

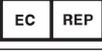
Le côté de lit emballé doit être conservé dans un endroit aéré et sec, dans une pièce sans gaz corrosif, bien aérée et propre. Pour éviter l'humidité, la lumière forte, la tenir à l'écart des sources de chaleur pendant le transport.

ÉLIMINATION

Après usage, veuillez éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Tous les accidents graves concernant le dispositif médical que nous fournissons doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve votre siège social.

LABELS, PACKAGING LOGO DESIGN:

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Dispositif médical conforme au Règlement (UE) 2017/745		Dispositif médical
	Fabricant		Représentant autorisé dans la Communauté Européenne
	Date de fabrication		Conserver à l'abri du soleil
	Numéro de lot		Non stérile
	Avertissement : Lisez et suivez attentivement les instructions (avertissements) d'utilisation.		Code produit
	Lire la notice d'utilisation		Conserver dans un endroit frais et sec
	Importé par		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie standard B2B Gima de 12 mois s'applique.