







Directions for use

Ambu® Man School



Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

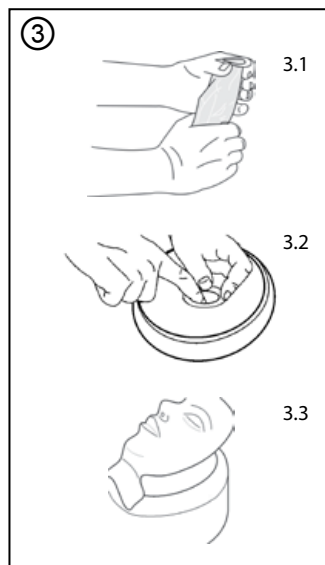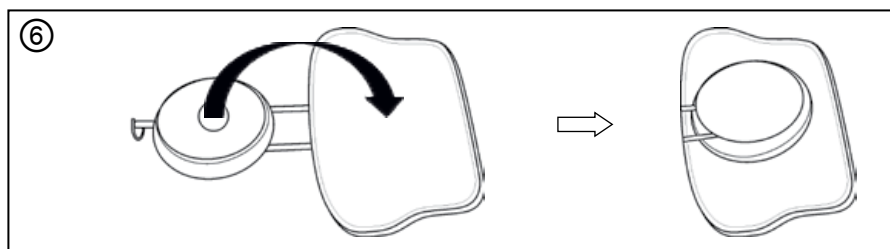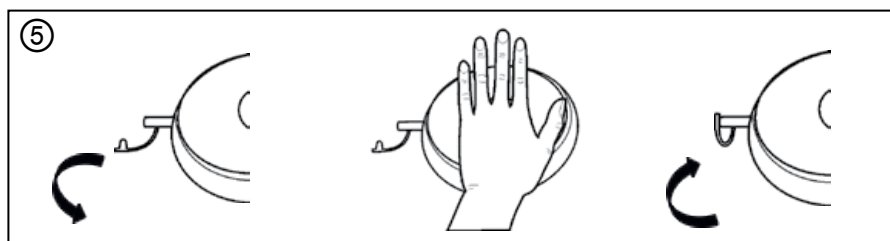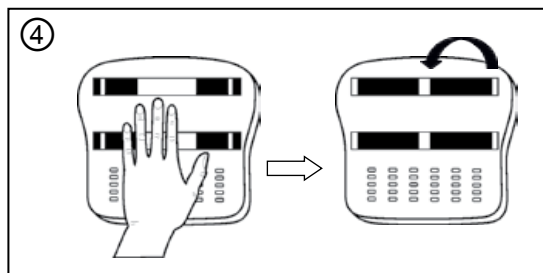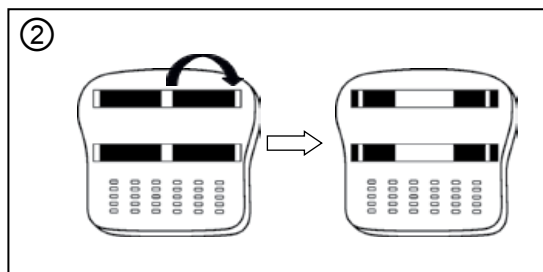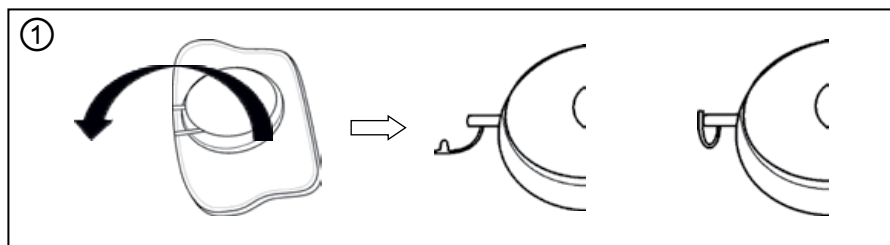

Índice

1. Introdução	74
2. Especificações	74
2.1. Dimensões	74
2.2. Material	74
2.3. Utilização e armazenamento	74
3. Utilização	74
3.1. Preparação para a formação	74
3.2. Após a formação	75
3.3. Limpeza	75
3.3.1. Boquilha	75
3.3.2. Limpeza da cabeça e do corpo	76

Página

1. Introdução

A AmbuMan School pode ser utilizada para a demonstração e formação de todos os procedimentos para a reanimação com suporte básico de vida.

Destina-se a ser utilizada para o ensino de alunos em escolas sob a supervisão de um instrutor/professor.

A AmbuMan School será utilizada com enfoque principal nas especificações descritas abaixo para a formação quanto ao procedimento de reanimação.

- Ventilação boca-a-boca
- Ventilação boca-a-nariz
- Compressão do peito externa
- Colocação dos contactos AED

2. Especificações

2.1. Dimensões

Peso: 0,8 kg

Dimensões (C x L x A): 45 x 30 x 10 cm

2.2. Material

Tiras	Nylon	Cabeça	Silikonové
Placa de base	Polycarbonato	Boquilha	Policloreto de vinilo
Cotovelo	Elastômero termoplástico	Saco pulmonar	Policloreto de vinilo
Peito	Polipropileno	Saco de cabeça	Polietileno

2.3. Utilização e armazenamento

Temperatura de armazenamento (não condensável): -18 °C (-0,4 °F) a 40 °C (105 °F)

Temperatura de utilização (não condensável): -5 °C (23 °F) a 40 °C (105 °F)

Humidade: 5 % a 95 %

3. Utilização

3.1. Preparação para a formação

Desdobre o saco pela parte superior e encha a cabeça. Feche a válvula do ar depois de encher. ①

Volte o manequim ao contrário, liberte as tiras da parte média e prenda o velcro no exterior. ②

Introduza um saco de cabeça e monte a boquilha na cabeça. ③

O manequim está agora preparado para a formação de primeiros socorros (CPR).

NOTA:

utilize apenas uma bomba ou seringa para encher a cabeça para evitar a contaminação da cabeça.

Se a cabeça colapsar durante a utilização, abra a válvula da cabeça e encha novamente a um nível suficiente.

Nunca utilize o manequim sem um saco de cabeça, uma vez que é possível a ocorrência de contaminação no interior.

Os sacos de cabeça e as boquilhas devem ser mudados antes a participação de cada novo formando.

3.2. Após a formação

Retire a boquilha e o saco de cabeça e elimine o saco de cabeça.

Limpe o corpo e a boquilha, como se descreve na secção 3.3.

Volte o manequim para baixo, empurre a placa de base no centro para comprimir o manequim.

Primeiro, puxe a tira para o lado e, em seguida, fixe a tira com o velcro no meio da placa central. ④

Abra a válvula de ar e comprima a cabeça para esvaziar e, em seguida, feche a válvula de ar. ⑤

Dobre a cabeça sobre o peito e coloque o manequim na caixa para armazenamento. ⑥

3.3. Limpeza

3.3.1. Boquilha

Limpeza manual

A. Enxague a boquilha com água limpa.

B. Lave os artigos em água quente, máx. 65 °C (150 °F), com um detergente suave.

C. Enxague bem em água limpa para remover todos os vestígios de detergente.

Lavagem automática

As boquilhas podem ser lavadas numa máquina de lavar normal. Aplique uma dose normal de detergente e escolha um programa de lavagem com uma temperatura máxima de 70 °C (158°F).

Desinfecção

A. Coloque os artigos numa solução de hipoclorito de sódio com um mínimo de 500 ppm de cloro livre (1/4 de chávena de lixívia normal por cerca de 4 litros de água da torneira durante 10 minutos). Esta solução deve ser recente, devendo ser eliminada depois de utilizada.

B. Coloque os itens numa solução de 70% de álcool e clorexidina durante 2 minutos (70% de álcool etílico e 0,5% de clorexidina).

C. A desinfecção química também pode ser realizada usando desinfetantes reconhecidos, adequados para a utilização com cloreto de polivinilo (PVC). As instruções do fornecedor sobre a dosagem e período de desinfecção devem ser seguidas atentamente.

D. Enxague sempre os artigos em água limpa após a desinfecção e deixe secar antes de os guardar.

NOTA: As boquilhas não podem ser expostas a fervura, autoclave ou esterilização com gás.

3.3.2. Limpeza da cabeça e do corpo

Deve limpar a cabeça e o corpo, utilizando um pano humedecido com água limpa.