



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Biombos

PARAVENTOS

REF 45560-45561-45562-45563

Distribuído por / distribuído por / distribuído por

Gima SpA

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Itália gima@gimaitaly.com -

export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Fabricado na Itália



PRODUTOS

- 45560 3 Tela de asa - sem cortinas
- 45561 3 Tela de asa com rodízios - sem cortinas
- 45562 4 Tela de asa - sem cortinas
- 45563 4 Rede de proteção com rodízios - sem cortinas

INTRODUÇÃO

Deve ler atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo médico.

DESCRIÇÃO

Tela de proteção em estrutura tubular de liga de alumínio montada sobre pés ou rodízios. O produto destina-se a cirurgias médicas, de ambulatório e fisioterapia onde haja necessidade de criar uma divisória ou parede móvel.

COMPONENTES

Estrutura tubular em liga de alumínio

Par de tubulares curvos com rodízios



Rodízios Ø 50 mm

Material de montagem



- n. 2 PARAFUSOS TE 6x50
- n. 2 PORCAS M6
- n. 4 ANILHAS 6x12
- CHAVE HEXAGONAL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Comece a fase de montagem definindo um plano de trabalho horizontal estável.



Pegue em 1 parafuso TE, 2 anilhas e 1 porca e, utilizando a chave sextavada, fixe o quadro e o tubular com as rodas como na imagem. REPITA A MESMA OPERAÇÃO COM O OUTRO TUBULAR COM RODÍZIOS.



Pegue nas hastes e insira-as nos orifícios na parte inferior da tela, depois de inserir as cortinas (vendidas separadamente da tela).

DADOS TÉCNICOS

<p>Medição</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cód. 45560: cm 150 x altura 167,5 • Cód. 45561: cm 150 x altura 174 • Cód. 45562: cm 200 x altura 167,5 • Cod.45563: cm 200 xh 167,5 <p>Caixa cm 176x57x13</p>
<p>Peso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cód. 45560: 3,7 kg • Cód. 45561: 4 kg • Cód. 45562: 5,1 kg • Cod.45563: Caixa 5,4 kg 2,4 kg

AVISOS!

- Verifique se as porcas de fixação estão apertadas.
- **Observe os caudais máximos indicados nas fichas técnicas.**
- **Evite o contacto direto com feridas abertas.**
- Não deve ser utilizado em ambientes abertos.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Utilize apenas peças de substituição originais.
- Verifique periodicamente todos os pontos de fixação.
- Para uma melhor conservação, recomenda-se evitar a exposição prolongada ao sol, o contacto e o depósito em ambientes salinos e muito húmidos.
- Lave as superfícies de aço inoxidável ou alumínio com água e sabão e utilize desinfetantes adequados.
- Enxague com um pano húmido e seque bem.
- Não verta sobre a superfície produtos de limpeza que contenham cloro ou amoníaco, substâncias gordurosas e oleosas.
- Não utilize utensílios de limpeza que contenham ferro. Se for necessária a desinfecção, utilize apenas produtos adequados e não corrosivos.

TERMOS DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima.