

## GIMA 43196 - 43198

Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.  
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China  
Made in China

**REF** KDB-697  
KDB-698

**EC REP** SUNGO Europe B.V.  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,  
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



ITALIANO

## NOME

### Sedia per degenza

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

#### UTILIZZO PREVISTO:

La sedia per degenza viene utilizzata per favorire le funzioni di defecazione delle persone affette da patologie, infortuni o disabilità, e può essere utilizzata a casa o in ospedale.

#### IDOPERATORE

Il dispositivo può essere azionato dall'utente stesso, dal personale infermieristico o dal personale di assistenza.

#### GRUPPI DI PAZIENTI

Persone con disabilità, pazienti e anziani.

#### CONTROINDICAZIONI

Sorvegliare i bambini quando usano la sedia per degenza.

#### ISTRUZIONI D'USO

1. Sollevare la piastra del sedile, posizionare correttamente il secchio sul telaio del secchio, quindi abbassare la piastra del sedile per l'uso.
2. Dopo l'uso, chiudere il coperchio del secchio e rimuoverlo dal telaio del secchio.
3. Il peso massimo supportato dell'utente è 125 kg.

#### MANUTENZIONE

1. La superficie del prodotto non deve essere graffiata o urtata da oggetti duri per evitare danni al materiale.
2. Per la pulizia e la manutenzione quotidiana, applicare un detergente chimico neutro, pulire con un panno umido e poi con un panno asciutto.
3. Provvedere alla pulizia e alla disinfezione di routine una volta al giorno da parte del personale medico o degli utenti, e disinfettare accuratamente la toilette quando si cambia paziente.
4. Non esporre ad acidi e alcali forti per evitare la corrosione.

#### PRECAUZIONI E AVVERTENZE:

1. Posizionare la sedia per degenza in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, ed evitare l'uso di sostanze chimiche corrosive come olio, acidi e alcali.
2. Evitare l'esposizione della sedia per degenza al sole e alla pioggia e asciugarla immediatamente dopo ogni utilizzo.
3. È possibile applicare alle parti mobili lubrificanti di alta qualità, per una migliore lubrificazione.
4. Controllare regolarmente i collegamenti della sedia per degenza per evitare incidenti causati da allentamenti e cadute.
5. Controllare frequentemente se la sedia per degenza presenta crepe e altri difetti che ne compromettono l'uso.
6. Controllare frequentemente che il telaio e il piano del sedile siano ben saldi.
7. Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile e non deve essere scosso con forza per evitare danni strutturali.
8. Non stare in piedi sulla sedia con i piedini smontati, il prodotto potrebbe cadere.

#### CONSERVAZIONE

La sedia a rotelle imballata deve essere conservata in un luogo ventilato e asciutto, privo di gas corrosivi e in una stanza ben ventilata e pulita. Evitare l'umidità, la luce troppo intensa e tenere lontano da fonti di calore durante il trasporto.







#### GARANZIA









Il periodo di garanzia di questo prodotto inizierà dal giorno dell'acquisto. Accessori 90 giorni. Telaio principale 365 giorni.

#### SMALTIMENTO

Le disposizioni sullo smaltimento dipendono dalla contaminazione subita durante l'uso e sono soggette alla legislazione nazionale o locale.

#### ETICHETTE, IMBALLAGGIO DESIGN DEL LOGO:

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare

	Numero di lotto		Non sterile
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Codice prodotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Importato da		Identificativo unico

#### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi