

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	FORBICI SPECIALISTICHE AESCULAP
Descrizione Prodotto:	Forbici poliuso
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	AESCULAP AG TUTTLINGEN
Officina di produzione:	AESCULAP AG TUTTLINGEN
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	VEDI ELENCO ALLEGATO
Codice CND:	VEDI ELENCO ALLEGATO

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Chirurgia Open

Fare riferimento alle indicazioni d'uso riportate sul foglietto illustrativo

INFORMAZIONI TECNICHE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C 248 °F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d' azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	Si
Sterile alla vendita:	No
Risterilizzabile:	Si
Medodo di sterilizzazione:	Sterilizzazione a vapore Fare riferimento alle istruzioni per l' uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Busta in plastica, Scatola in cartone e gomma piuma per alcuni codici
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente (5°C-25°C) non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Si I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o oversteering Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità' di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezze del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con suoerfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OC415R	FORBICI IRIDECTOMIA GRAEFE 100MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510011/R
OC480R	PINZA-FORBICI IRIDECTOMIA MCCLURE 95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393316/R
OC482R	FORBICI PER IRIDECTOMIA NOYES 125MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510012/R
OC485R	PINZA-FORBICI CASTROVIEJO 95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2275549/R
OC486R	PINZA-FORBICI CASTROVIEJO 95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528734/R
OC491R	FORBICI CORNEALI CASTROVIEJO 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510013/R
OC496R	FORBICE MICRO P IRIDE RETTA 105MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510116/R
OC497R	FORBICE MICRO P IRIDE CURVA 105MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2393317/R
OC498R	FORBICI VANNAS CATARATTA SECOND.MM 85	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2280977/R
OC499R	FORBICE CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510117/R
OC500R	FORBICE P CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510118/R
OG350R	MICRO-FORBICE BELLUCCI RETTA ACUTA	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2497535/R
OG351R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SMUSSA	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510214/R
OG352R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SIN.	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510215/R
OG353R	MICRO-FORBICE BELLUCCI CURVA DES.	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510216/R
OG354R	MICROFORBICI CAWTHORNE	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2234575/R
OG355R	MICRO-FORBICE BELLUCCI ORIZZONTALE	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2707583/R
OG356R	FORBICE CRUROTOMIA SINISTRA CRV.	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2681108/R
OG357R	FORBICE CRUROTOMIA DESTRA CRV.	L01040602	I non sterile	SCA da 1 PZ	2681111/R
OK350R	FORBICI HEYMANN PER NASO 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528735/R
OK351R	FORBICI HEYMANN PER NASO MM190	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510015/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OK353R	FORBICI SETTO DOPPIA ARTIC.DENT.95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528778/R
OK365R	FORBICE COTTLE ACUTA CURVA 105MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2496141/R
OK366R	FORBICE PREPARAZ.SOTTILE CURVA 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510016/R
OK367R	FORB.NASALE COTT.MASING CRV.SM/SM 105MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510017/R
OK368R	FORBICE NASALE KNAPP RETTA 105MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528737/R
OK369R	FORBICI COTTLE P.NASO MM105 CURVA	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510018/R
OK370R	FORBICI PER NASO FOMON 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510019/R
OK371R	FORBICE PER RINOPLASTICA COTTLE 165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510020/R
OK372R	FORBICI FOMON MM 135	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510021/R
OK373R	FORBICI ALA NASALE FOMON CRV.FORTE 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510022/R
OK374R	FORBICI BULLDOG S.COTTLE SM/SM 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528738/R
OK560R	FORBICI PER NASO RET.130MM	L01040601	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510208/R
OK561R	FORBICI PER NASO CRV.SINIS.130MM	L01040601	I non sterile	SCA da 1 PZ	2265419/R
OK562R	FORBICI PER NASO CRV.DEST.130MM	L01040601	I non sterile	SCA da 1 PZ	2265420/R
OM700R	FORBICI DEAN PER TONSILLE MM170	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510024/R
OM707R	FORBICI BOETTCHER PER TONSILLE MM180	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510025/R
OM710R	FORBICI GOOD PER TONSILLE MM195	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2528739/R
OP310R	MICRO-FORBICE P.LARINGE RETTA	L01040604	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510226/R
OP311R	MICRO-FORBICE P.LARINGE SINISTRA	L01040604	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510227/R
OP312R	MICRO-FORBICE P.LARINGE DESTRA	L01040604	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510228/R
OP313R	MICRO-FORBICE P.LARINGE CURV.VERS.ALTO	L01040604	I non sterile	SCA da 1 PZ	2510229/R