


Manuel d'instructions
Euroseal[®] Infinity

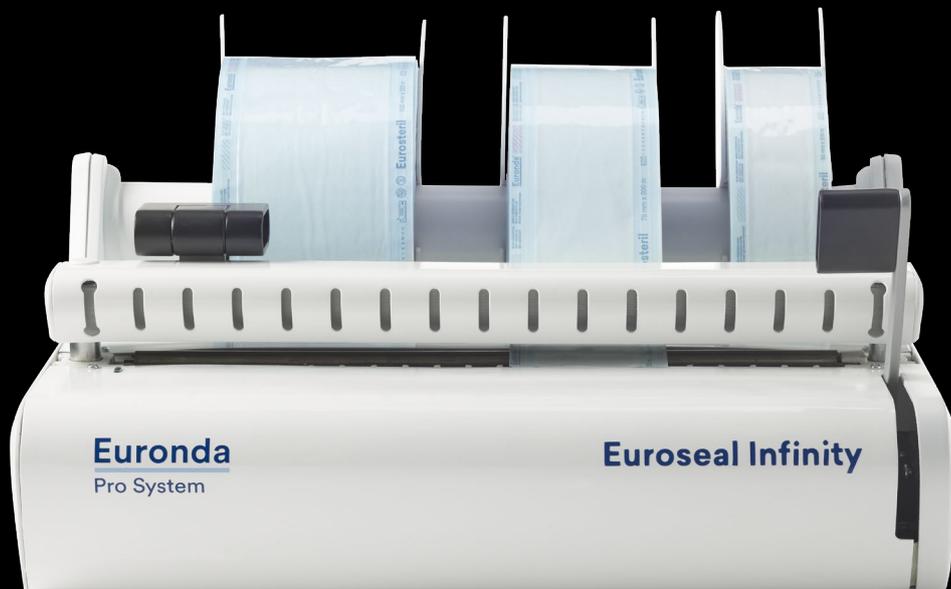

CE

Euronda[®]

Madame, Monsieur,

*nous tenons avant tout à vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder en achetant notre thermosoudeuse électronique **Euroseal® Infinity**.*

Notre société est à votre disposition pour tout renseignement concernant cet appareil.

De façon à pouvoir utiliser correctement cette machine, nous vous rappelons que, avant de s'en servir, il est absolument nécessaire de lire attentivement ce manuel. Nos appareils répondent aux normes générales de sécurité en vigueur et ne présentent aucun danger pour l'opérateur si celui-ci respecte les consignes prescrites. Nous tenons à rappeler également qu'Euronda S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable en cas d'erreurs ou de mauvaises interprétations du texte des traductions de ce manuel : en cas de litige seul le manuel en langue italienne fera foi.

Nous vous souhaitons un bon travail et vous rappelons qu'il est interdit de reproduire ce manuel et que, suite à la recherche technologique continue, les caractéristiques de ce produit peuvent subir des modifications sans préavis.

EURONDA S.p.A.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 3
 REMARQUES GÉNÉRALES POUR LA RÉCEPTION 3
 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 3
 SIGNIFICATION DES SYMBOLES 5
 INDICATIONS SUR LA GARANTIE 7
CHAPITRE 1 8
 1.1 - DIMENSIONS DE LA MACHINE ET DE L'EMBALLAGE 8
 1.2 DESCRIPTION DU CONTENU 9
CHAPITRE 2 10
 2.1 - INSTALLATION 10
 2.2 - INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE MURAL (KIT EN OPTION) 10
CHAPITRE 3 12
 3.1 - SÉCURITÉ 12
 3.2 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 13
CHAPITRE 4 14
 4.1 - DESCRIPTION DE LA THERMOSOUDEUSE 14
CHAPITRE 5 16
 5.1 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION 16
 5.2 - BUTÉE LATÉRALE POUR ROULEAU 18
CHAPITRE 6 19
 6.1 - NETTOYAGE DE LA THERMOSOUDEUSE 19
 6.2 - MAINTENANCE ORDINAIRE - AVERTISSEMENTS 19
CHAPITRE 7 20
 7.1 - RÉOLUTION DES PROBLÈMES 20
CHAPITRE 8 21
 8.1 - INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT 21

INTRODUCTION

REMARQUES GÉNÉRALES POUR LA RÉCEPTION

Lors de la réception de la machine, s'assurer que l'emballage est complet (le conserver pour toute expédition ultérieure).

Ouvrir l'emballage et contrôler si :

- la fourniture correspond aux spécifications techniques ;
- il n'y a aucun dommage apparent.

En cas de dommages ou de parties manquantes, informer immédiatement et de façon détaillée l'expéditionnaire, le dépôt dentaire ou Euronda S.p.A.

Toutes les dimensions indiquées dans le manuel ne sont pas contraignantes.

Les dessins et tout autre document livré avec la machine sont propriétés Euronda S.p.A., qui se réserve tous les droits. Ils ne peuvent en aucun cas être mis à disposition des tierces personnes.

La reproduction, même partielle, du texte et des illustrations est interdite.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Ce manuel a pour but de fournir des instructions pour :

- la bonne installation ;
- le fonctionnement sûr et efficace de l'appareil ;
- l'entretien régulier et continu.

L'appareil doit être utilisé conformément aux procédures contenues dans le manuel et jamais dans des buts différents de ceux qui y sont prévus.

ATTENTION

- Si l'appareil est utilisé d'une manière non indiquée par le constructeur, la protection prévue par l'appareil pourrait être compromise.
- Utiliser exclusivement le câble d'alimentation original fourni avec l'appareil.
- Conformément à l'article 33 du règlement 1907/2006 (REACH), l'objet complexe, l'article (élément chauffant) contient de l'acide borique, CAS n° 10043-35-3 Cette substance ne peut pas entrer en contact avec l'utilisateur ou avec les instruments stérilisés car elle est contenue dans l'élément chauffant, par conséquent il n'existe pas de risque associé ni de précautions particulières à adopter en conditions d'utilisation normales.

L'opérateur est la personne qui utilise physiquement l'appareil pour la fonction prévue. **L'autorité responsable** est la personne, ou le groupe, responsable de l'utilisation et de l'entretien courant de l'appareil ainsi que de la formation de l'opérateur. L'autorité responsable est juridiquement responsable quant à l'installation, le fonctionnement et l'utilisation de l'appareil.

Le fabricant ne peut pas être considéré comme responsable des éventuelles ruptures, lésions ou anomalies de fonctionnement de la machine si l'appareil n'est pas utilisé correctement ou si l'entretien effectué est inadéquat.

Application d'usage : Le présent manuel fait partie intégrante du produit et doit être conservé à proximité de l'appareil de façon à pouvoir être consulté rapidement. L'appareil est destiné à un usage professionnel et seul un personnel qualifié peut s'en servir. Le produit ne doit être destiné qu'à l'utilisation pour lequel il a été conçu.

EUROSEAL® Infinity : appareil destiné au scellement de rouleaux et de sachets en

papier/polyéthylène pour l'emballage des instruments de stérilisation utilisés dans les cabinets médicaux, vétérinaires, de podologues et de tatoueurs.

Ne convient pas pour les rouleaux d'autres matériaux.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symboles de sécurité présents sur l'appareillage :

SYMBOLE	DESCRIPTION
	ATTENTION : SURFACE CHAUDE

Des symboles sont présents sur l'étiquette de l'appareil. Leur signification est indiquée ci-dessous.

PLAQUETTE D'IDENTIFICATION

La plaquette d'identification contient les données principales et les caractéristiques de l'appareil et toutes les informations nécessaires pour identifier ce dernier en cas de commande de pièces de rechange et / ou de demandes de renseignements.

Les informations présentes dans l'image ci-dessous peuvent faire l'objet de modifications.

<p>MOD. EUROSEAL INFINITY</p> <p>SN EDS XXXXXX  17/09/19</p>  <p>+\$+\$+7EDS</p>	<p>MOD. EUROSEAL INFINITY</p> <p>SN EDT XXXXXX  27/02/20</p>  <p>+\$+\$+7EDT</p>
<p>200-240V 50/60Hz 180W Fuse T5A</p> <p>  MADE IN ITALY </p> <p> Euronda Spa, Via dell'Artigianato, 7, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza Tel. + 39 0444 656 111 - Fax + 39 0444 656 199 www.euronda.com - info@euronda.com</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">REV.01</p>	<p>110V 50/60Hz 180W Fuse F10A</p> <p>  MADE IN ITALY </p> <p> Euronda Spa, Via dell'Artigianato, 7, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza Tel. + 39 0444 656 111 - Fax + 39 0444 656 199 www.euronda.com - info@euronda.com</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">REV.02</p>

SYMBOLE	DESCRIPTION
SN	« NUMÉRO DE SÉRIE » Ce symbole doit être suivi du numéro de série du fabricant. Le numéro de série doit se trouver à côté du symbole.
	« DATE DE FABRICATION » Ce symbole doit être suivi de l'année. L'année doit être indiquée par quatre chiffres.
	« ATTENTION ! CONSULTER LE MANUEL D'INSTRUCTIONS »
	Le symbole présent sur l'appareil indique qu'il doit faire l'objet d'un « tri sélectif » lors de son élimination.

Dans le manuel des symboles sont parfois placés à côté d'une description, remarque, etc. Ces pictogrammes servent à attirer l'attention du lecteur sur une note ou une explication particulière. Ci-après, l'interprétation de ces différents symboles.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	<p>INFORMATION PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE AUX FINS DE LA SÉCURITÉ. Ce symbole sert à attirer l'attention du lecteur sur des principes fondamentaux concernant la sécurité de l'opérateur.</p>
	<p>INFORMATIONS ET PRÉCAUTIONS Ce symbole signale la présence d'indications et conseils à caractère général.</p>

INDICATIONS SUR LA GARANTIE

Euronda garantit la qualité de ses appareils, s'ils sont utilisés conformément aux instructions fournies par ce manuel, aux conditions indiquées dans le certificat de garantie.


La garantie est valable à partir de la date d'enregistrement sur www.euronda.com/myeuronda, qui doit se faire lors de la vente de l'appareil au client utilisateur.

En cas d'absence d'enregistrement, la date indiquée sur la facture d'achat reportant le numéro de matricule de l'appareil sera prise en considération.


REMARQUE : nous conseillons de conserver l'emballage d'origine et de l'utiliser pour chaque transport de l'appareil. Un emballage différent pourrait provoquer des dommages au produit durant l'expédition.

CHAPITRE 1

1.1 - DIMENSIONS DE LA MACHINE ET DE L'EMBALLAGE

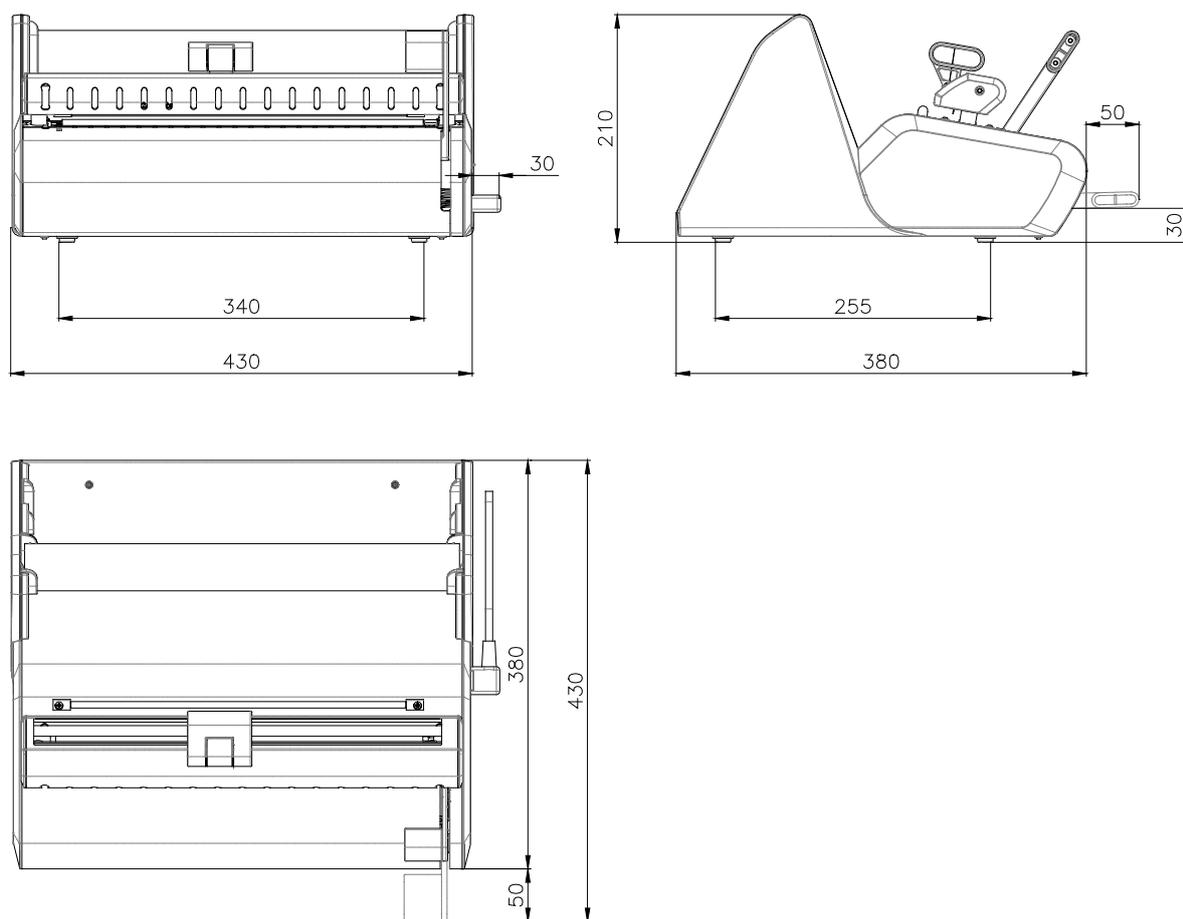

Dimensions de la thermosoudeuse électronique EUROSEAL® Infinity

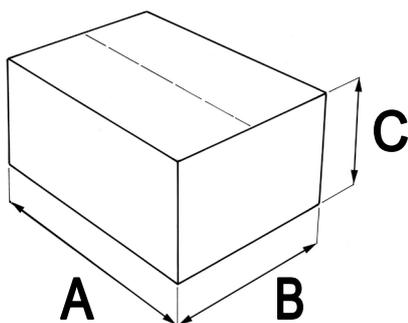

Dimensions d'encombrement de l'emballage :

A = 510 mm
 B = 470 mm
 C = 240 mm

Poids total de l'emballage : 8 kg

1.2 DESCRIPTION DU CONTENU

Description	Quantité
Corps de la machine	1
Tube porte-rouleaux	1
Butoir du rouleau	2
Cordon d'alimentation	1
Fusible de secours T5A 5x20 ou F10A 5x20	1
Manuel d'instructions et documents	1
Gel de silice	2

CHAPITRE 2

2.1 - INSTALLATION



Enlever l'emballage et installer l'appareil selon les instructions suivantes :

1. Placez la thermosoudeuse sur une surface plane en veillant à dégager un espace de travail suffisant.
2. N'installez pas la machine à proximité de lavabos ou d'objets similaires pour éviter tout contact avec l'eau qui risque de court-circuiter le système électrique.
3. Ne la placez pas à proximité de sources de chaleur.
4. Installez la machine dans un lieu convenablement ventilé.
5. Vérifiez à ce que le câble secteur ne soit pas plié et que rien ne le bloque jusqu'à la prise électrique.
6. L'appareil doit être installé de sorte que la fiche soit facilement accessible.
7. Brancher la fiche; la machine est prête à l'emploi.

2.2 - INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE MURAL (KIT EN OPTION)

Pour le **montage mural** de la thermosoudeuse, procurez-vous le KIT en option correspondant et suivre les instructions suivantes.

- 1) Fixez au mur deux chevilles, non fournies, de 6 mm de diamètre (tête de la vis : diamètre maximal 9,5 mm, corps de la vis : diamètre maximal 5 mm) avec un entraxe de 212 mm. Laissez dépasser la tête de la vis de 14 mm pour pouvoir insérer la thermosoudeuse.

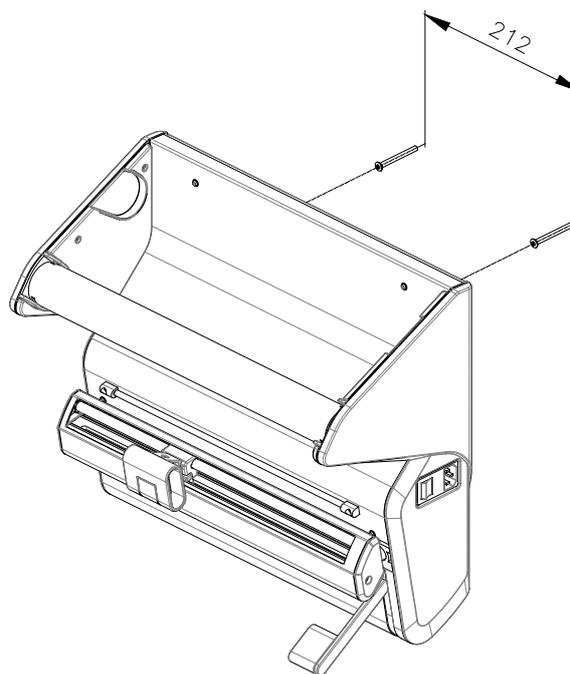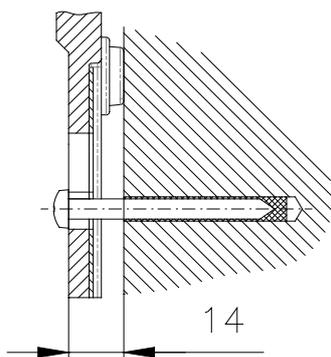


ATTENTION :

Achetez et utilisez des chevilles adaptées au matériau du mur (ciment, briques, plaques de plâtre, etc.).

- 2) Fixez sur la machine les deux plaques avec les vis fournies dans le kit.
- 3) Accrochez la thermosoudeuse aux deux vis fixées au mur.

Placez les trous correspondants de la thermosoudeuse sur les têtes des vis **(1)** et poussez-la vers le bas **(2)** pour la fixer.

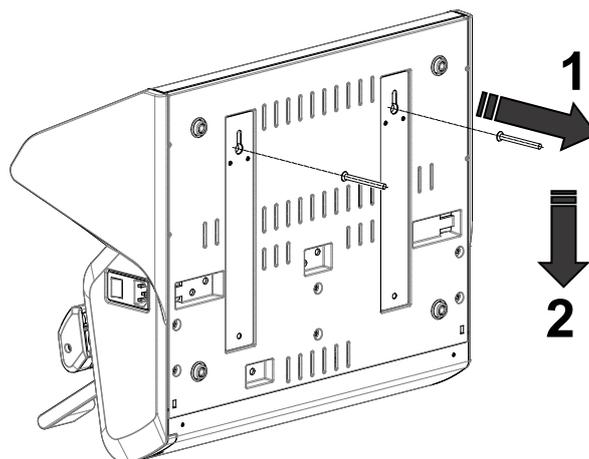

- 4) Introduisez le tube avec les rouleaux.



ATTENTION :

Insérez le tube sur le porte-rouleaux de la thermosoudeuse en veillant à ce que la dent du porte-rouleaux entre dans la fente du tube, au besoin en tournant le tube.

CHAPITRE 3

3.1 - SÉCURITÉ



Avant d'utiliser la thermosoudeuse électronique EUROSEAL® Infinity, lisez attentivement les informations propres à la sécurité. Si elles ne sont pas observées, cela pourrait provoquer des incidents ou endommager la machine.

- Avant d'utiliser l'appareil, l'opérateur doit avoir parfaitement saisi la signification de toutes les commandes et leur fonctionnement.
- L'opérateur doit connaître et être en mesure d'appliquer les normes de sécurité pour l'utilisation de l'appareil.
- L'opérateur doit connaître et interpréter correctement toutes les indications contenues dans le présent manuel et celles qui sont apposées sur l'appareil.
- L'opérateur ne doit pas exécuter des opérations de sa propre initiative ou des opérations qui ne relèvent pas de sa compétence.
- Le responsable doit se charger de l'information et de la formation professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien de l'appareil en sécurité ; il doit notamment s'assurer que l'opérateur a compris correctement les informations reportées dans ce manuel.



NE PAS GLISSER LES DOIGTS DANS LA ZONE DE SOUDAGE LORSQUE LA MACHINE EST ALLUMÉE.

NE PAS GLISSER LES DOIGTS SOUS LE CARTER DE PROTECTION DE LA ZONE DE SOUDAGE LORSQUE LE LEVIER DE PRESSION S'ABAISSÉ.

NE JAMAIS GLISSER LES DOIGTS DANS LA LOGE DE COULISSEMENT DU COUTEAU.

VEILLER A CE QUE L'ESPACE SITUÉ À PROXIMITÉ DE LA THERMOSOUEUSE DEMEURE PROPRE ET SEC.

NE JAMAIS DÉMONTER LA THERMOSOUEUSE EUROSEAL® Infinity. LES HAUTES TENSIONS INTERNES SONT DANGEREUSES.

Dans le cas où il ne serait pas possible de débrancher l'énergie électrique, intervenir directement sur l'interrupteur du réseau, et si cet interrupteur est loin et non visible par la personne qui effectue la maintenance, mettre une enseigne indiquant "Travaux en cours" sur l'interrupteur après l'avoir porté sur la position "OFF".



NETTOYER LA MACHINE AVEC UN LINGE HUMIDE, PUIS S'ASSURER QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE CETTE DERNIÈRE EST DÉBRANCHÉ (Avant de réutiliser la machine, enlever les éventuelles traces d'humidité). NE PAS UTILISER DE SOLVANTS SUR L'ÉTIQUETTE.

VÉRIFIER QUE L'INSTALLATION SOIT ÉQUIPÉE DE MISE À LA TERRE QUI RESPECTE LES NORMES EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION.

NE PAS RETIRER L'ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LA MACHINE

S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST ALIMENTÉ AVEC LA TENSION CORRECTE.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

Si la machine ne fonctionne pas correctement, consulter le paragraphe "Solutions des problèmes" du manuel de façon à repérer les causes possibles. S'il vous avez besoin d'informations complémentaires ou devez effectuer des réparations, contactez le personnel spécialisé de votre fournisseur ou le bureau technique d'Euronda S.p.A.

AVERTISSEMENT

- La machine est conforme aux conditions de sécurité requises par les Instituts de Normalisation et est munie d'une fiche bipolaire qui assure la mise à la terre complète de l'appareil.
- La résistance est connectée à la terre, puisque le reste de l'appareil est à double isolation.
- Pour la sécurité, il est fondamental que le système électrique dispose d'une prise de terre efficace et que l'alimentation du système et les prises de courant soient adaptées à la puissance de l'appareil indiquée sur l'étiquette. Faites contrôler l'installation par un personnel qualifié.

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS INDIQUÉES CI-DESSUS DÉGAGE EURONDA S.p.A. DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

3.2 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

S'assurer que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette située sur le côté de la machine, correspond à celle qui est disponible sur le lieu d'installation.

L'appareil doit être raccordé avec le cordon d'alimentation à un système muni d'une prise de terre appropriée et conforme aux normes en vigueur dans le Pays d'installation.

L'appareil peut rester alimenté 24h/24.

**ATTENTION :**

ne provoquez aucun pli sur le cordon d'alimentation et n'y posez dessus aucun objet que ce soit.

CHAPITRE 4

4.1 - DESCRIPTION DE LA THERMOUSOUEUSE

Euroseal® Infinity est la nouvelle thermosoudeuse électronique d'Euronda, à cycle continu et à température constante, dont le scellement de 12 mm est garanti. Euroseal® Infinity est une machine au design moderne, innovant et ergonomique. Facile à utiliser et à nettoyer, elle présente des formes arrondies et est munie d'un porte-rouleaux dont les dimensions sont limitées aux longueurs minimales de la machine. Il est possible d'insérer des rouleaux de stérilisation en papier/polypropylène de 100 ou de 200 mètres. La nouvelle technologie de construction adoptée permet de réduire au minimum la consommation d'énergie de la machine, d'obtenir des temps de soudage très rapides évitant les temps de refroidissement entre un soudage et l'autre et permet d'augmenter nettement la fiabilité de la thermosoudeuse, en simplifiant les opérations d'entretien de la lame de coupe. EUROSEAL® Infinity est totalement construite conformément à la norme CE et aux niveaux de qualité indiqués par cette dernière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	200 - 240 V	100 - 120 V
Nombre de phases	1	
Fréquence d'alimentation	50 / 60 Hz	
Puissance	180 W	
Classe de protection contre les chocs électriques	I	
Classe d'isolation	IPX0*	
Fusibles	2 – 5x20mm T5A	2 – 5x20mm F10A
Plage de conditions ambiantes pour lesquelles l'appareil a été conçu	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation en intérieur - Altitude jusqu'à 2000 m - Température : de 5 °C à 40 °C - Humidité relative max 85 % - Variation tension max : ± 10 % - Catégorie de surtension : II - Degré de pollution : 2 - Surtensions temporaires à court terme 240 V + 1200 V jusqu'à 5 s - Surtensions temporaires à long terme 240 V + 250 V pendant plus de 5 s 	
Interrupteur	Unipolaire	
Poids de la machine	7 kg.	
Soudage	12 mm	
Type de soudage	À température constante, la température est comprise entre 170 °C et 200 °C.	
Largeur zone de soudage	310 mm.	
Résistances	Unique, à réglage automatique, utilisable avec n'importe quelle tension, non sujette aux courts-circuits et construite selon les normes de sécurité.	
Porte-rouleaux	Deux positions utilisables.	
Consommation d'énergie	De 30 % à 50 % de moins par rapport aux machines à impulsions	
Temps de refroidissement	Aucun retard entre un soudage et l'autre, la machine étant en marche	
Positionnement du sachet en phase de soudage	Indifférent (film dessus ou dessous)	
Couteau	Pratique, protégé, fonctionnel, et facilement remplaçable	
Poignée de scellement	Manche ergonomique à effort réduit	
Design	Ergonomique et arrondi	
Couleur	RAL 9016, peinture à poudres époxydiques	
Entretien ordinaire	Inexistant	

*Le premier caractère indique que l'enveloppe protège les personnes contre l'accès à des parties dangereuses, en empêchant ou en limitant la pénétration dans l'enveloppe d'une partie du corps d'un outil tenu par une personne ;
en même temps
l'enveloppe protège le produit contre la pénétration de corps solides étrangers. X - non déclaré
Le deuxième caractère indique l'indice de protection de l'enveloppe contre les effets néfastes sur le produit dus à la pénétration d'eau dans l'enveloppe. 0 – aucune protection.


CHAPITRE 5

5.1 - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Vérifiez que l'appareil est branché à l'alimentation électrique.


Appuyez sur l'interrupteur latéral - **A** - situé sur le côté droit de la machine.

La led lumineuse - **B** - située sur le devant de la machine, pendant le préchauffage, est de couleur rouge clignotante puis devient verte lorsque la résistance a atteint une température de soudage optimale.

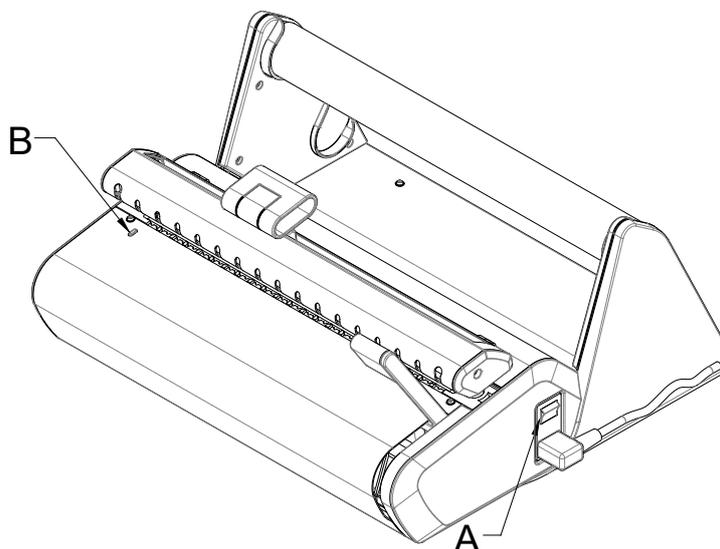**2. Insérez le rouleau de stérilisation - C - sous le dispositif de blocage de rouleau -D-.**

Faites avancer la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de la longueur désirée.

Le rouleau peut être placé indifféremment de manière à ce que la bande apparaisse avec le film transparent dessus ou dessous.

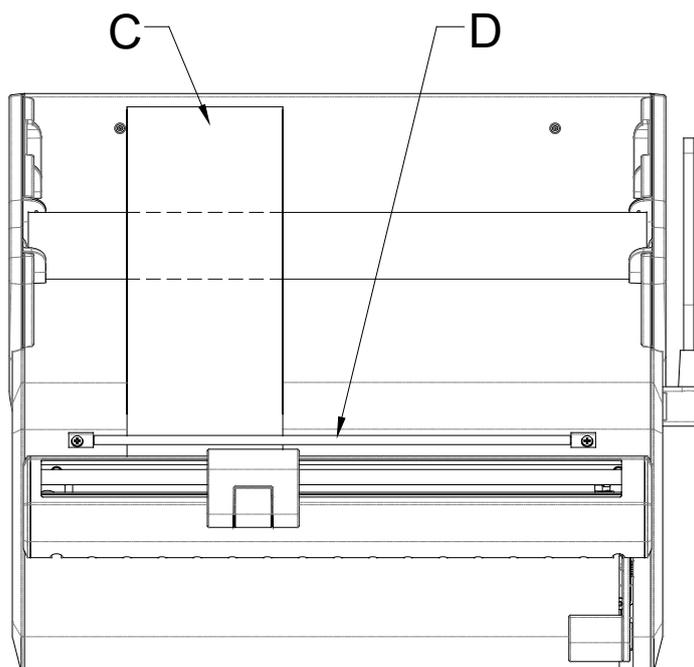


3. Abaissez la poignée de scellement.

Faites glisser le curseur de la lame pour couper la bande du rouleau et créer le sachet (tant que le levier reste abaissé).

À la fin de la phase de scellement, la led lumineuse devient rouge fixe et un signal sonore informe l'utilisateur.


Le scellement est terminé.

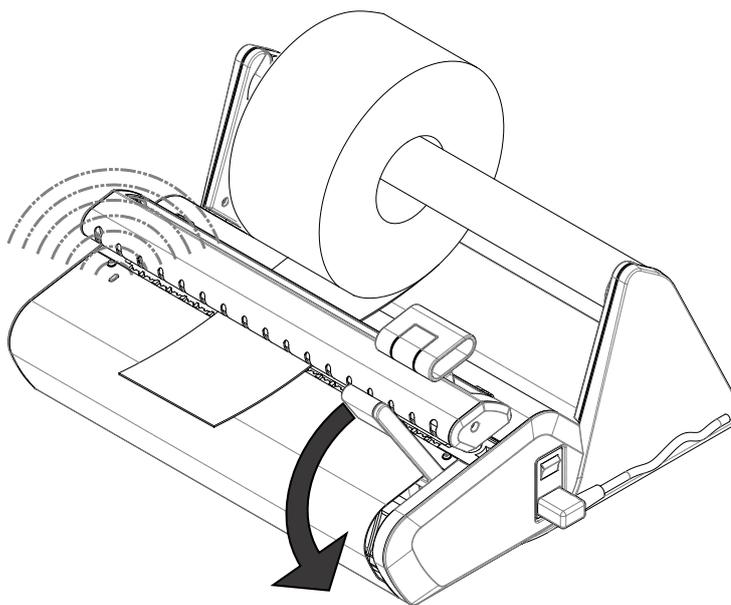**4. Soulevez la poignée de scellement.**

La poignée étant levée, la led redevient verte et la sonnerie cesse.

Retirez le sachet.

La machine est prête pour la prochaine opération de scellement ; inutile d'attendre son refroidissement.

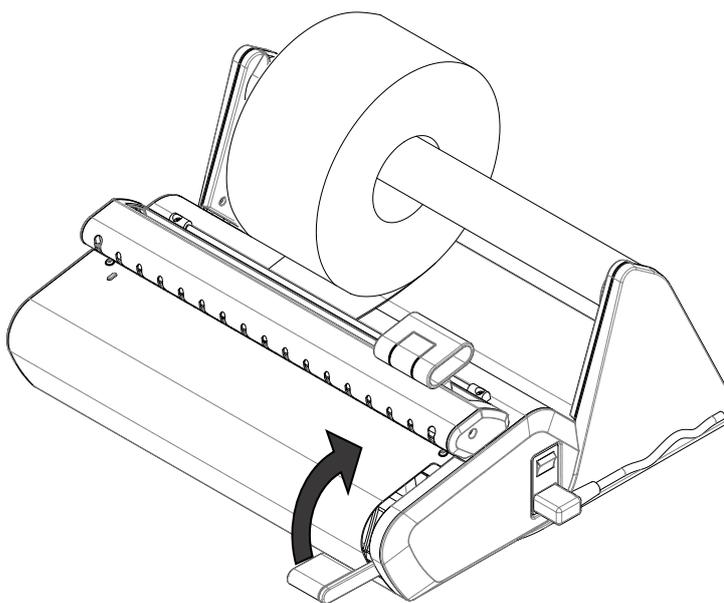**ATTENTION :**

si l'opérateur ne soulève pas le levier après le scellement, la résistance s'éteint automatiquement afin de ne pas brûler le sachet. Dans ce cas, la led clignote en rouge et l'alarme retentit par intermittence.

Dès que la poignée est soulevée, la résistance s'active automatiquement. La température idéale est atteinte en quelques secondes pour relancer le scellement.


5.2 - BUTÉE LATÉRALE POUR ROULEAU

Utilisation de la butée latérale


Les butées latérales fournies sont utilisées pour assurer le déroulement correct du rouleau et éviter qu'il ne tombe sur les côtés pendant cette opération.

Pour utiliser les butées latérales :

- 1) insérez-les sur le tube du porte-rouleaux en exerçant une légère pression pour les encastrer.

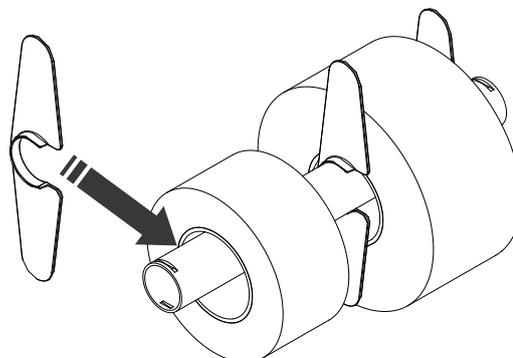

- 2) Rapprochez-les du rouleau de façon à maintenir le papier en place.

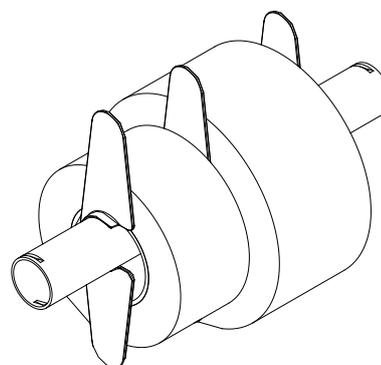

CHAPITRE 6

6.1 - NETTOYAGE DE LA THERMOSOUDEUSE

**ATTENTION :**

AVANT CHAQUE INTERVENTION, METTRE L'APPAREIL HORS TENSION.

Le non-respect de cette condition peut provoquer de graves accidents aux personnes ou endommager sérieusement l'appareil.

**ATTENTION :**

avant d'exécuter toute opération d'entretien, lire attentivement les instructions relatives à la sécurité et plus particulièrement le chap. 3 « Sécurité »

**ATTENTION :**

Si le remplacement de pièces a une influence directe ou indirecte sur la **sécurité**, il est fondamental de n'utiliser que des **PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES**.

**DANGER :**

HAUTES TENSIONS INTERNES.

**ATTENTION :**

Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que la machine est froide.

Faites attention à la lame du couteau pendant le nettoyage de l'appareil.

TOUTES LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EXCLUSIVEMENT PAR L'AUTORITÉ RESPONSABLE OU PAR LES TECHNICIENS DU SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉS PAR EURONDA S.p.A.

Nettoyez les parties externes de la machine avec un chiffon doux humide (ne pas utiliser de produits corrosifs ou abrasifs), après avoir vérifié que le cordon d'alimentation est débranché du secteur.

**ATTENTION :**

Avant de commencer le travail, vérifiez que la machine est sèche.

6.2 - MAINTENANCE ORDINAIRE - AVERTISSEMENTS

La machine n'a pas besoin d'opérations de maintenance extraordinaire.

TOUTES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EXCLUSIVEMENT PAR LES TECHNICIENS DU SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉS PAR EURONDA S.p.A.

CHAPITRE 7

7.1 - RÉOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Led clignotante rouge et signal Acoustique intermittent	Poignée en position abaissée	Soulevez la poignée de scellement
Quelques secondes après l'allumage de la machine, la led de la carte ne s'allume pas	Carte endommagée	Remplacer la carte
	La led ne fonctionne pas	Remplacer la led
	La résistance ne chauffe pas	Remplacer la résistance
	Manque de voltage	Attendre et/ou rétablir la tension
	Fusibles de protection grillés	Contrôler les éventuels courts-circuits ou les pannes, puis les remplacer avec des fusibles de même valeur
Le scellement est effectué, mais la led reste verte	Minirupteur endommagé	Remplacer le minirupteur
La résistance chauffe, mais le soudage est insuffisant	Pression de soudage insuffisante	Contrôler les vis de fixation du support caoutchouc en silicone
	Caoutchouc silicone abîmé	Remplacer le caoutchouc en silicone

ATTENTION : AVANT CHAQUE INTERVENTION, METTRE L'APPAREIL HORS TENSION.

TOUTES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EXCLUSIVEMENT PAR LES TECHNICIENS DU SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉS PAR EURONDA S.p.A.

DANGER : HAUTES TENSIONS INTERNES

CHAPITRE 8

8.1 - INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

La thermosoudeuse EUROSEAL® Infinity est réalisée avec des matériaux ferreux, des composants électroniques et des matières plastiques.

Lorsque le produit est démolì, il n'y a pas de consignes spéciales à suivre. Ne pas abandonner l'appareil dans des lieux non surveillés et confier sa mise à la casse à des entreprises spécialisées.

Pour la mise à la casse, respecter toujours les normes en vigueur dans le Pays d'utilisation.



Le symbole  présent sur l'appareil indique que ce dernier doit faire l'objet d'un « tri sélectif ».

L'utilisateur devra donc acheminer (ou faire acheminer) les déchets en question dans l'un des centres de tri sélectif prévus par les collectivités locales ou les remettre au revendeur en cas d'achat d'un appareil neuf de type équivalent (valable pour l'Union Européenne seulement).

Le tri sélectif des déchets et les opérations de traitement, recyclage et élimination qui s'ensuivent favorisent la production d'appareils à partir de matériaux recyclés et limitent les effets néfastes sur l'environnement et la santé provoqués par une éventuelle gestion incorrecte des déchets.

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les lois en vigueur.

Euronda[®]

EURONDA S.p.A.
Via dell'Artigianato, 7 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - ITALY
Tél. +39 0444 656111 - Fax +39 0444 656199 - www.euronda.com - info@euronda.com