



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

El orquidómetro es un instrumento utilizado para medir el volumen de los testículos. Este consiste en una cadena de doce cuentas de madera enlazadas por un hilo y numeradas de 1 a 25 milímetros. La discrepancia del tamaño testicular con otros parámetros de maduración sexual puede ser un importante indicador de varias enfermedades.

Se recomienda investigar cualquier discrepancia más a fondo con otras instrumentos para elaborar un diagnóstico correcto.

SÍMBOLOS

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Código producto
	Número de lote

SE RECOMIENDA QUE LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE UTILIZAR EL ORQUIDÓMETRO:

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La superficie de l'orquidómetro se limpia con un trapo limpio o con un pañuelo de papel levemente empedado en desinfectante.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO DEL ORQUIDÓMETRO

Las cuentas se comparan con los testículos del paciente para establecer la etapa de maduración sexual. El volumen se toma leyendo el número de la cuenta más similar en tamaño al testículo.

Número de la cuenta	Etapas de maduración sexual
1~3	Infancia
4~6	Pubertad inicial
8, 10	Pubertad
12, 15	Pubertad final
20, 25	Edad adulta

El producto no es un producto sanitario.

A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

