



CORE- SCRUB P – Art. CS- 270- P

Manual em Português (Versão Adaptada)

Descrição do produto:

Escova descartável com cabo flexível, esponja de densidade média impregnada com 20 ml de solução desinfetante (Povidona-Iodo 7,5 %) e limpa-unhas integrado.

Indicações de uso:

Destinado à desinfecção das mãos e antebraços de profissionais de saúde, especialmente em ambientes cirúrgicos.

Modo de utilização:

1. Abrir a embalagem pelo lado marcado “ABRIR”.
2. Utilizar a esponja para aplicar uniformemente a solução nas mãos (com especial atenção às unhas e entre os dedos), e depois nos antebraços por aproximadamente 5 minutos.
3. Enxaguar com água corrente, mantendo as mãos acima do nível do cotovelo.
4. Descartar o dispositivo após o uso, em conformidade com as normas locais.

Propriedades técnicas:

- Material da escova: polietileno com filamentos semirrígidos diferenciados
- Esponja: poliuretano (densidade média)
- Limpa-unhas: polietileno de alta densidade
- Dimensões: Escova + esponja: 80 mm × 50 mm × 40 mm
- Validade: 24 meses
- Sem látex (Latex-free)
- Registro sanitário (Itália): nº 19531
- Embalagem: caixas de 270 unidades (9 dispensers de 30 unidades cada)