

INSTALLAZIONE STATIMETRO

SU BILANCIA MOD. **R150A**

**1**

- a. Alzare la paletta poggia testa
- b. Alzare l'asta dello statimetro fino a visualizzare 150cm in corrispondenza dell'indicatore rosso
- c. Misurare 150cm in altezza, a partire dalla pedana della bilancia
- d. Allineare l'indicatore '150cm' sullo statimetro con i 150cm misurati a partire dalla pedana

2

- a. Posizionare il supporto dello statimetro sul retro della colonna e praticare due fori da 4,2mm filetto 5
- b. Avvitare il supporto con le viti fornite