


CUA0512P Design / 112.322\*171.45

► Open  **CU Medical Systems, Inc.** Open ◀


## ELETTRODI per defibrillazione **PEDIATRICO**

### Istruzioni REF CUA0512P


**1**

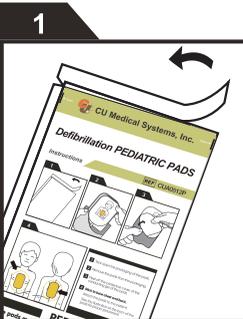


**2**

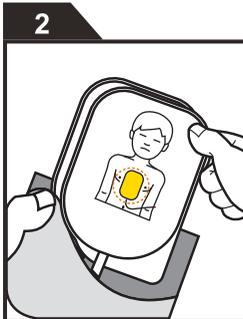

**3**

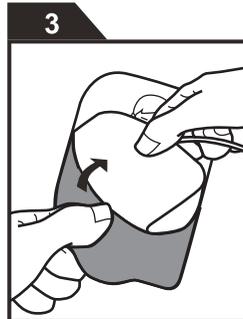

**4**

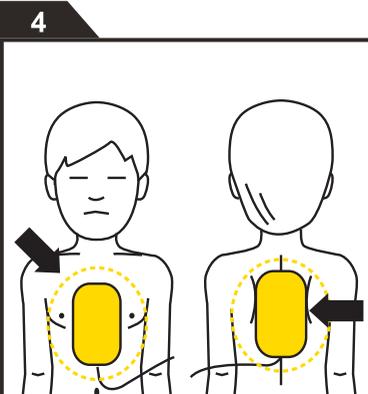

- 1** Strappare la confezione degli elettrodi.
- 2** Rimuovere gli elettrodi dalla confezione.
- 3** Rimuovere la copertura protettiva del gel conduttore degli elettrodi.
- 4** Attaccare sul torace e sulla schiena scoperti. Attaccare gli elettrodi al paziente. Vedere l'illustrazione sul retro degli elettrodi per il corretto posizionamento.

# PEDIATRICO

**Questi elettrodi NON devono essere utilizzati su pazienti ADULTI.**

► Open  **CU Medical Systems, Inc.** Open ◀

REF CUA0512P

LOT YMMDDYY-XX

YYYY-MM

YYYY-MM

UDI



(01)08809435482106(17)YMMDD(10)YMMDDYY-XX

### ⚠ ATTENZIONE

- Non aprire fino al momento dell'uso.
- Non piegare, schiacciare, forare.
- Utilizzare entro la data di scadenza e se non ci sono danni agli elettrodi e alla sua confezione.
- Usare solo su un singolo paziente. Non riutilizzare.
- Per un uso a lungo termine, applicare un nuovo set di elettrodi ogni 24 ore.
- L'adesivo sulla parte posteriore degli elettrodi è leggermente irritante per la pelle.
- Non applicare alcuna sostanza sulla superficie della pelle che può lasciare residui, come lozioni, oli, gel, acqua, ecc.
- Assicurarsi che la superficie della pelle sia asciutta, asciugare acqua, sudore, alcool, ecc.
- Utilizzare su bambini fino a 8 anni di età o fino a 25 kg di peso.
- Non ritardare il trattamento per determinare l'età esatta del bambino.
- Se il bambino sembra avere un'età o un peso superiore, utilizzare gli elettrodi per defibrillazione adulti.

### ⚠ ATTENZIONE

- Le prestazioni degli elettrodi possono essere influenzate negativamente se esposti all'aria per lunghi periodi di tempo che potrebbero causare difetti di funzionamento
- Non utilizzare se il gel conduttivo è essiccato.
- L'uso improprio di qualsiasi elettrodo può causare ustioni al paziente o terapia inefficace.
- Da usare solo con la serie NF.

---

 **CU Medical Systems, Inc.**  
130-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si,  
Gangwon-do, Republic of KOREA  
Tel: +82 33 747 7657 Fax: +82 33 747 7659  
Homepage: <http://www.cu911.com>

 **2460**  43°C  
109°F    

 **Medical Device Safety Service, GmbH**  
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany