

Paramedic CU-ER Series

CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Step-1




- Tear open the packaging of the pads

Step-2



- Remove the pads from the packaging

Step-3

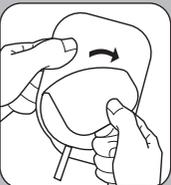


- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

Step-4

STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement

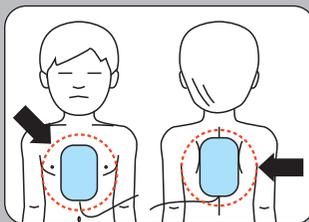

Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatrica ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド

Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

Piastre pediatriche ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER


Queste piastre sono da utilizzare solo assieme ai defibrillatori Paramedic CU-ER azionati in modalità AED.

Da utilizzare su bambini di età fino a 8 anni o fino a 25 kg di peso.

Il trattamento deve essere tempestivo.

Se il paziente ha più di 8 anni o pesa più di 25 kg usare le piastre per adulti Paramedic CU-ER

- I defibrillatori Paramedic CU-ER sono destinati ad essere usati su pazienti colpiti da improvviso arresto cardiaco che presentano i sintomi che seguono: mancanza di risposta, assenza di respirazione normale e mancanza di battito rilevabile. Nel dubbio, applicare le piastre.
- I defibrillatori Paramedic CU-ER (modalità AED) e gli elettrodi di defibrillazione pediatrica CUA0711P sono destinati ad essere utilizzati da persone appositamente formate. L'utente deve anche essere qualificato in Primo Soccorso e altri programmi di risposta medica all'emergenza autorizzati da medici.

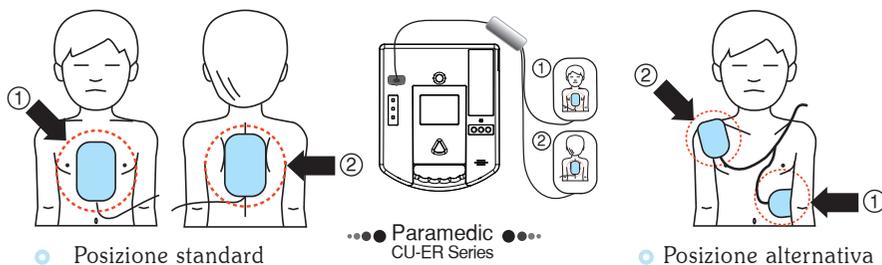

- Collegare le piastre al paziente.
Riferirsi all'illustrazione posta sul retro delle piastre.
- Se si desidera usare le posizioni alternative delle piastre:
fissare la piastra destinata alla schiena del paziente al lato superiore destro del petto dello stesso.
Fissare la piastra destinata al petto del paziente al lato del torso del paziente stesso.

► ISTRUZIONI PER L'USO

- Accendere il defibrillatore.
- Liberare il torace del paziente dai vestiti.
- Verificare che la pelle sia pulita e asciutta.
- Aprire la confezione contenente le piastre di defibrillazione.
- Collegare le piastre al defibrillatore.
- Apporre le piastre sul paziente come indicato nell'illustrazione sul retro delle piastre.
- Verificare l'aderenza degli elettrodi alla pelle.
- Verificare che nessuno tocchi il paziente e premere il tasto SHOCK.

► Queste PIASTRE sono

- Utilizzabili unicamente per defibrillazione esterna. Non adoperarle per effettuare pacing cardiaco, cardioversione sincronizzata o azioni di monitoraggio ECG.
- Monouso. Non riutilizzarle.
- Elettrodi adesivi con gel conduttore polimerico.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto (da -12 °C / 10 °F a 43 °C / 110 °F)
- Non sterile

► ATTENZIONE

- Estrarre le piastre dalla confezione immediatamente prima di utilizzarle.
- Non applicare nessuna sostanza sulla pelle che possa lasciare residui (ad es.: sostanze oleose, gel, acqua, ecc...). Verificare che la pelle sia ben asciutta e rimuovere eventuali tracce di acqua, sudore, alcol...
- Se gli elettrodi non aderiscono in modo corretto alla pelle, sostituirli con un paio nuovo.
- In caso di utilizzo prolungato, adoperare una nuova serie di elettrodi ogni 24 ore.
- L'adesivo presente nella schiuma della placca è moderatamente irritante per la pelle.
- Gli elettrodi e la relativa confezione devono essere smaltiti secondo le norme nazionali e locali.

► AVVERTENZE

- Usare solo con Paramedic CU-ER che opera in modalità AED (l'uscita del defibrillatore è 150 Joule, l'uscita delle piastre è 50 Joule, nominali;)
- Rimuovere gli elettrodi dalla custodia ed esporli all'aria per lungo tempo può avere ripercussioni negative sulle prestazioni delle elettrodi.
- Non utilizzare le piastre se il gel conduttore si è asciugato.
- I defibrillatori e i loro accessori contengono materiale ferromagnetico. Non devono essere usati in presenza di forti campi magnetici creati da un dispositivo per risonanza magnetica (RMI). Tale forte campo magnetico attrae il dispositivo con una forza sufficiente a causare morte o gravi lesioni personali alle persone che si trovano tra di esso e il dispositivo RMI.
- La defibrillazione può causare il malfunzionamento di dispositivi elettrici impiantati. Se possibile, posizionare gli elettrodi lontano da dispositivi impiantati.
- A causa di possibili rischi di incendio ed esplosione, non usare il defibrillatore e gli elettrodi in presenza di concentrazioni di ossigeno e anestetici infiammabili.
- L'errata applicazione delle piastre può causare ustioni al paziente.



CU Medical Systems, Inc.
Paramedic CU-ER Series
CU-ER Series Infant • Child
Reduced Energy
Defibrillator Pads

Asia

CU Medical Systems, Inc.
Dongwha Medical Instrument Complex
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,
Republic of Korea
Tel: +82 33 747 7657
Fax: +82 33 747 7659

Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.
Medical Device Safety Service
Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany
TEL : +49 511 6262 8630
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany
TEL:+49 511 365 4353
FAX:+49 511 848 6054