



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI

DIGITAL NURSE WATCH

MONTRE D'INFIRMIÈRE DIGITALE

RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA

Manuale d'uso - User manual
Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

GIMA 20480



Nox Industry Co., Limited
603-5 NO.17-2 Wanghai Road, Siming District
Xiamen, China, P.C. 361008
info@noxtime.com
Made in China



NS888



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





Fonctions

Affichage à 6 chiffres : Mois, Date,
Jour semaine, Heure, Minute, Seconde
Arrêt montre
12/24 heures
Alarme
Lumière de fond EL



Mode d'emploi

Réglage Date & Heure, jour semaine

Presser B 3 fois, les secondes clignotent, régler l'heure en appuyant sur D,C, en appuyant sur C pour confirmer & revenir sur l'affichage normal. Régler l'heure en suivant les étapes suivantes.

Appuyer 3 fois sur B (Exemple: **13:02:23**)

Seconde (23) clignote, appuyer sur D pour augmenter les secondes, appuyer sur C pour revenir sur 00, appuyer sur C pour confirmer.

Minute (02) clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Heure (13) clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Date clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Mois clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Semaine clignote, appuyer sur D, déplacer le clignotement sur le jour de la semaine correct, puis appuyer sur B pour confirmer tous les réglages et revenir sur l'affichage normal.



Arrêter montre

Dans l'affichage normal, appuyer 1 fois sur B pour entrer dans le mode arrêt montre. Appuyer 1 fois sur Arrêt/Marche D pour compter le temps. Appuyer 1 fois sur C pour annuler les données. Appuyer 1 fois sur B pour revenir sur l'affichage normal.



12/24 Heures

Dans l'affichage normal, appuyer 3 fois sur B, entrer dans le mode de réglage de l'heure, Appuyer 2 fois sur C, entrer le mode de commutation 12/24, appuyer sur D jusqu'à ce que 12/24 s'affiche. Appuyer 1 fois sur B pour revenir sur l'affichage normal.

Lumière de fond EL

appuyer 1 fois sur A, EL s'allumera pendant 3 secondes.

Régler l'Alarme

Dans l'affichage normal. Appuyer 2 fois sur B, entrer dans le mode alarme, heure clignote, appuyer sur D pour régler l'heure puis appuyer sur C, minute clignote, appuyer sur D pour régler les minutes, appuyer sur B pour revenir sur l'affichage normal.

Alarme On/Off

Appuyer sur C (ne pas enlever), appuyer sur D simultanément pour régler ON/OFF de l'alarme. L'alarme dure 1 minute.

Sonnerie horaire

Appuyer sur C (ne pas enlever), appuyer sur B pour régler la sonnerie horaire on/off. Quand la sonnerie horaire est activée, tous les jours de la semaine sont affichés. Dans le cas contraire, la sonnerie horaire est désactivée.

Changement de la pile

A l'arrière de la montre, il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la pile. Soulevez la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlevez le couvercle métallique et retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant la polarité, le "+" vers le haut. Remettez le couvercle métallique et refermez le boîtier.

Poids: 45g

Pile: Batterie au lithium 3V CR2025



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.