



MANUALE ISTRUZIONI MANUTENZIONE

REF **BAR016**



Barella NFC SYSTEM
pieghevole
FOLDABLE STRETCHER

1. Avvertenze generali •

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale • Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato • Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore • La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili • Conservare in luoghi asciutti • Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

2. Prima di ogni uso •

Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose

3. Avvertenze per l'utilizzo •

Usare la cintura di sicurezza quando necessario • Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto. Sostituirla immediatamente in presenza di rotture. • Non utilizzare con pazienti il cui peso supera quanto indicato; portata massima kg 120. • In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore • Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

4. Istruzioni •

Aprire la barella • Spostare correttamente il paziente sulla barella • La presenza di maniglie permette di sollevare il paziente afferrando la barella da più lati.

5. Manutenzione I dispositivi al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

6. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi relativamente al DM fornito da PVS SPA al Fabbricante e all'autorità competenti

Si Dichiara che il dispositivo è conforme a **MDR 745/2017** "Dispositivi Medici"

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci, 18

 +39 029160011
 +39 0291600310
 +39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165

PVS SpA

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)
Via Leonardo da Vinci, 18

 +39 029160011
 +39 0291600310
 +39 0291600149

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.
Reg.imprese MI n. 215184
R.E.A. MI n. 1103165