



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

25g/m²

BLOUSE D'ISOLATION JETABLE

FRANÇAIS

Nom de produit Blouse d'isolation jetable

Code produit FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

Taille du produit Unité : cm

CODE GIMA	21131	21132
CODE FULL GUARD	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Tailles	115x137 (M)	120x150 (L)
Longueur (Épaule à ourlet)	115	120
Largeur (monocouche)	137	150
Longueur de ceinture	180	180
Manche longue	58	59
Écart	±2	±2

Modèle produit Type de blouse. M/L

Structure et composition Le produit utilise un tissu non tissé PP 25 g. Ce produit est composé d'un devant, d'un dos, d'une manche, de liens et d'une manchette. Le processus technologique est le suivant : découpe, soudure par ultrasons, attachement, velcro, manchette, pliage, scellage.

Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l'isolation générale dans les cliniques externes, les salles, les salles d'inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon niveau d'hygiène et contribuer au contrôle des infections.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit Ouvrir l'emballage et sortir le produit, secouer doucement la blouse, soulever les côtés du col, insérer les mains dans les manches, étendre les bras vers l'avant et attacher les ceintures.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80 %, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

⚠ Mise en garde

1. Ce produit est un produit jetable, ne pas réutiliser.
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
3. Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les produits sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

REF	Code produit	☀	À conserver à l'abri de la lumière du soleil	☂	À conserver dans un endroit frais et sec
LOT	Numéro de lot	CE	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745	⚠	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
🏭	Fabricant	📅	Date de fabrication	MD	Dispositif médical
⚠	Pas stérile	⌚	Date d'échéance	⚡	Ne pas utiliser si le colis est endommagé
%	Limite d'humidité	📖	Consulter les instructions d'utilisation	⚡	Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser
🌡	Limite de température	EC	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	🍷	Fragile, manipulez avec soin
↑↑	Ce côté vers le haut	🧤	Manipulez avec soin		

REF

FGIS-PP25-M (GIMA 21131)
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

EC REP

Humiss Beratung
GmbHGneisenastraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland

MD

Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

