

PRODOTTO ITALIANO

MANUALE D'USO

 **INTERMED**

ACTIVA

Indicazioni

Calzature Post-Operatorie

Indicate in tutti i casi di: post-intervento, gonfiore, bendaggi, esiti post-trauma o altre patologie dolorose del piede. Le calzature favoriscono la corretta deambulazione anche in presenza di sostanziali alterazioni della forma del piede stesso.

Calzature fisiologiche

La calzatura non ha finalità terapeutiche bensì, dove previsto, ha funzione di sostegno e di supporto contenitivo di plantari personalizzati realizzati dagli specialisti del settore ortopedico per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione di algie plantari.

La calzatura favorisce un'adeguata funzionalità delle articolazioni nel movimento, consente il giusto equilibrio statico ed una corretta deambulazione, prevenzione e miglior comfort del piede.

Le calzature sono predisposte per l'inserimento di un plantare estraibile.

Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

L'impiego della calzatura per patologie dolorose del piede deve essere sempre effettuato su consiglio e controllo del medico.

Il prodotto mantiene tutte le proprie caratteristiche quando utilizzato e conservato secondo le prescrizioni del produttore.

Quando la calzatura è danneggiata o consumata deve essere sostituita.

Non modificare la struttura e i punti di sostegno della calzatura per non alterarne la funzionalità.

Conservazione e Manutenzione

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detergenti ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole, lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Garanzia

Il prodotto è garantito 24 mesi per difetti di materiali o di produzione.

Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali vigenti.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Prodotto da

Intermed S.r.l.

Via della Pace, 21

20098 S. Giuliano Milanese

Tel. 02-98248016 Fax 02-98247361

www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

La calzatura è un dispositivo medico di classe I

