

PRODOTTO ITALIANO

# MANUALE D'USO

 **INTERMED**

**ACTIVA**

## Indicazioni

### Calzature Post-Operatorie

Indicate in tutti i casi di: post-intervento, gonfiore, bendaggi, esiti post-trauma o altre patologie dolorose del piede. Le calzature favoriscono la corretta deambulazione anche in presenza di sostanziali alterazioni della forma del piede stesso.

### Calzature fisiologiche

La calzatura non ha finalità terapeutiche bensì, dove previsto, ha funzione di sostegno e di supporto contenitivo di plantari personalizzati realizzati dagli specialisti del settore ortopedico per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione di algie plantari.

La calzatura favorisce un'adeguata funzionalità delle articolazioni nel movimento, consente il giusto equilibrio statico ed una corretta deambulazione, prevenzione e miglior comfort del piede.

Le calzature sono predisposte per l'inserimento di un plantare estraibile.

## Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

L'impiego della calzatura per patologie dolorose del piede deve essere sempre effettuato su consiglio e controllo del medico.

Il prodotto mantiene tutte le proprie caratteristiche quando utilizzato e conservato secondo le prescrizioni del produttore.

Quando la calzatura è danneggiata o consumata deve essere sostituita.

Non modificare la struttura e i punti di sostegno della calzatura per non alterarne la funzionalità.

## Conservazione e Manutenzione

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole, lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Garanzia

Il prodotto è garantito 24 mesi per difetti di materiali o di produzione.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità alle normative locali vigenti.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

## Prodotto da

Intermed S.r.l.

Via della Pace, 21

20098 S. Giuliano Milanese

Tel. 02-98248016 Fax 02-98247361

[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)

La calzatura è un dispositivo medico di classe I

