



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

TRIPODI - QUADRIPODI

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

I tripodi e quadripodi forniscono un sostegno alle persone con difficoltà di movimento, sono leggeri, con manico ergonomico e punte antiscivolo. Facilitano la posizione eretta e il cammino allargando la base d'appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori. Per garantire la funzione di stabilità il paziente dovrà camminare a passi brevi.

AVVERTENZE: usare molta cautela in caso di utilizzo su superfici non piane, bagnate o scivolose o scale. Non indicato per pazienti affetti da gravi patologie motorie. Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del prodotto. Per evitare eventuali rischi tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e controllare sempre lo stato dei puntali di appoggio a terra. La portata massima è di 100 kg.

Simboli - Symbols

	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Dispositivo medico GB Medical Device
	IT Codice prodotto GB Product code		IT Numero di lotto GB Lot number
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		

REF

43065 - 43070 - 43071 - 43072



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD

