

ACCESSORI DEGENZA ED AMBULATORIO

**SOLLEVAMALATI CON BASE
SOLLEVAMALATI FISSAGGIO AL LETTO
SCALETTE SCENDILETTO**

**MANUALE
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE
SCHEDE TECNICHE**



ACCESSORI DEGENZA ED AMBULATORIO

SOLLEVAMALATI CON BASE

SOLLEVAMALATI FISSAGGIO AL LETTO

SCALETTE SCENDILETTO

TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO SMALTIMENTO

In caso di trasporto di terzi, verificare che sia correttamente protetto con imballo in cartone chiuso e robusto

Durante trasporti a propria cura o nel periodo di magazzino verificare la pulizia di automezzi e locali, eventualmente proteggendo con telo antipolvere

Il prodotto non contiene componenti classificabili come rifiuto speciale all'atto dello smaltimento. Verificare ed attenersi alle disposizioni locali riguardanti la raccolta differenziata.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Controllare ogni 6 mesi il serraggio di eventuali viti, bulloni, rivetti

Sostituire immediatamente parti difettose

Pulizia ordinaria va eseguita con acqua e detergente neutro

Pulizia straordinaria e sanificazione con getto di vapore a bassa pressione

Lavare ed asciugare subito in caso di contatto con soluzioni saline o sostanze chimiche

Per eventuali manutenzioni straordinarie rivolgersi alla ditta o al rivenditore autorizzato



ISTRUZIONI/AVVERTENZE RISCHI GENERICI

La scelta del Dispositivo spetta all'utilizzatore coadiuvato da personale medico-ortopedico. Le indicazioni contenute in questo manuale devono essere rispettate per evitare danni a cose o persone. La ditta si riserva di modificare i dati e le dotazioni aggiuntive riportati in questo manuale.

Se necessario avvalersi dell'aiuto di una seconda persona per il montaggio

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

REF	
SOL-SCA- xxx	DESTINAZIONE D'USO
xxxx	descrizione

VEDI PAGINE SEGUENTI

SCHEDE TECNICHE ORDINE DISPOSITIVO




ISTRUZIONI PER L'USO SPECIFICHE

AVVERTENZE E RISCHI



Sollevamalati universale per fissaggio a letti articolati, asta cromata, completo di maniglia	Bloccare sulla tastiera del letto stringendo saldamente il sistema a vite e volantino. Applicare maniglie sollevamalati solo in caso di effettiva capacità d'uso e su prescrizione medico-ortopedica. Regolare l'altezza tramite il sistema a fibbia sulla cinghia della maniglia
Sollevamalati universale con base e maniglia regolabile in altezza	Posizionare la base sotto alla pianta del letto. Applicare maniglie sollevamalati solo in caso di effettiva capacità d'uso e su prescrizione medico-ortopedica. Regolare l'altezza tramite il sistema a fibbia sulla cinghia della maniglia
scalette scendiletto	Utilizzare solo in caso di effettiva capacità nell'utilizzo. Eventualmente sostenere l'utilizzatore nella salita e discesa
cinghia con fibbia e maniglia di presa sollevamento	

- 1 verificare l'inserimento della cinghia nella feritoia della maniglia
- 2 posizionare la cinghia tra i due fermi superiori
- 3 verificare la corretta posizione ed il bloccaggio della fibbia sulla cinghia

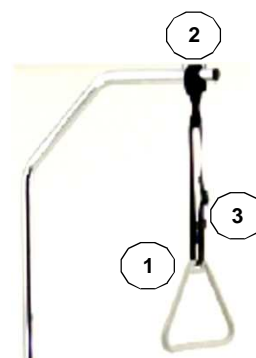

SOLLEVAMALATI PER LETTI



341	Sollevamalati universale per fissaggio a letti articolati, asta cromata, completo di maniglia regolabile in altezza CARATTERISTICHE asta di sostegno cromata gruppo ganasce di bloccaggio a vite e volantino maniglia regolabile in altezza circa da 130 a 170 cm sbalzo rispetto a fissaggio su testiera 77 cm Peso Max utilizzatore 150 Kg	12.30.09.103 GMDN ND CND Y123009 DM 113634
------------	---	---

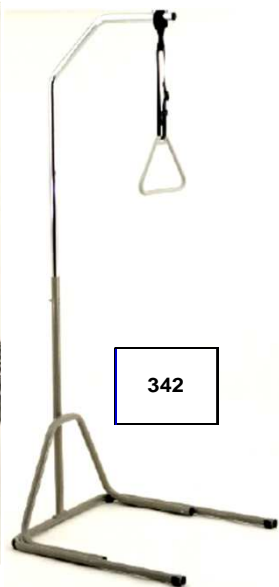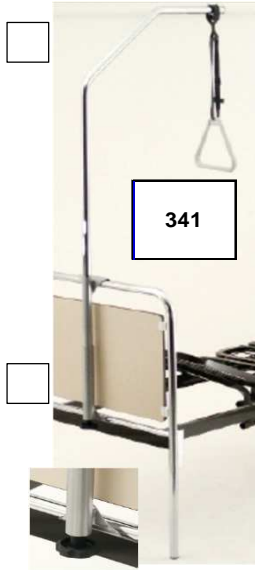

342	Sollevamalati universale con base e maniglia regolabile in altezza CARATTERISTICHE asta di sostegno cromata struttura in acciaio verniciato smontabile maniglia regolabile altezza 130-170 cm sbalzo rispetto ad asta sostegno 77 cm dimensioni base 80x77 cm Peso Max utilizzatore 150 Kg	12.30.09.103 GMDN ND CND Y123009 DM 113634
------------	--	---

SCALETTE PER LETTI

851	Scaletta scendiletto in acciaio cromato con 1 gradino in plastica, dim base 28x39 cm gradino 20x38 cm altezza 22 cm . Portata 150 Kg	-
852	Scaletta scendiletto in acciaio cromato con 2 gradini in plastica, dim. base 52x39 cm gradini 20x38 cm altezza 22-44 cm Portata 150 Kg	-
		GMDN ND CND 181230 DM 113661

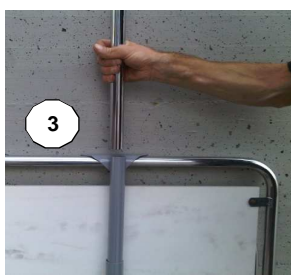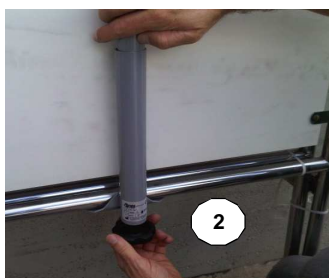

- 1 ALLENTARE IL VITONE PER ALLUNGARE LA GANASCIA INFERIORE
- 2 BLOCCARE LE GANASCIE SU TUBI ORIZZONTALI STRINGENDO IL VOLANTINO
- 3 INSERIRE L'ASTA SOLLEVAMALATO NEL TUBO VERTICALE

341



- 1 VERIFICARE CHE SIANO BEL STRETTE I BULLONI MONTAGGIO BASE
- 2 INSERIRE IL TUBO VERTICALE FINO A FAR INCONTRARE I DUE FORI
- 3 INSERIRE NEI FGORI IL BULLONE PASSENTE E STRINGERE CON CHIAVE

342

DLG	DIRETTIVA
46/97	93/42/CE
37/10	2007/47/CE

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE**

relativamente ai prodotti identificati come:
ACCESSORI AGGIUNTIVI PER DEGENZA ED AMBULATORIO

REF

SOL-xxx	SOLLEVAMALATI PER LETTI
341	Sollevamalati universale per fissaggio a letti
342	Sollevamalati universale con base

SCA-xxx	SCALETTE SCENDILETTO
851	scaletta scendiletto ad 1 gradino
852	scaletta scendiletto a 2 gradini

Classificati come:

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I - Allegato VII (non sterile e senza funzioni di misura)

Il sottoscritto Piai Fabio, in qualità di legale rappresentante di PIAI Ortotech srl, con sede in Vittorio Veneto Via Meucci 32, C.F. e P.I. 04193400266, Iscrizione Registro Imprese TV330742, dichiara che i dispositivi descritti sono conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 2007/47/CE recepita con Dlg 37/2010, attuazione della modifica alla 93/42/ce recepita con Dlg 46/97

Normativa tecnica di riferimento applicata:

UNI EN ISO 1970:2006

Vittorio Veneto, ... data (*)
Legale Rappresentante
Piai Fabio

(*) **FACSIMILE**
COPIA DOCUMENTI SPECIFICI
CONSERVATI PRESSO LA SEDE FABBRICANTE
DISPONIBILI SU RICHIESTA



FABBRICANTE
PIAI ORTOTECH srl
Via Meucci 32 - 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIA
tel +390438500884 fax +390438902058

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia copre in tutta Italia per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto qualsiasi difetto relativo a progettazione, materiali, fabbricazione ed assemblaggio, escludendo da ogni garanzia i danni causati da usura, manomissione od uso improprio.

Il prodotto difettoso dovrà essere accompagnato da una copia delle presenti Condizioni di Garanzia unitamente ad un giustificativo a comprovare la data di acquisto e la Scheda ANALISI DIFETTOSITA' sottostante.

La garanzia decade in mancanza di comprovante data di acquisto, tentativi di riparazione non autorizzati, danni causati da eventi accidentali, non osservanza delle istruzioni od avvertenze riportate nel manuale d'uso.

ANALISI DIFETTOSITA PER EVENTUALE INOLTRO:

ARTICOLO REF:	
AGGIUNTIVI	
DIFETTO RICONTRATO:	
DITTA RICHIEDENTE	
COMPROVANTE ACQUISTO	

Ai sensi della legge 196/2003 sulla privacy informiamo che i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assistenza tecnica