



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## ELETTRODI (MONOUSO) ELECTRODES (SINGLE USE)

Manuale d'uso - User manual

ITALIANO

### Descrizione/Usò Previsto

Questi dispositivi sono monouso e sono forniti sterili.

### Controindicazioni

Questi dispositivi non devono mai essere utilizzati quando:

- Vi sono danni evidenti all'esterno del dispositivo, come una spaccatura sulla plastica o un connettore danneggiato.
- Questi dispositivi non superano il collaudo qui descritto.
- In presenza di gas e liquidi infiammabili e/o ambienti ricchi di ossigeno.

### Consigli per la sicurezza

- Sull'unità elettrochirurgica, utilizzare l'impostazione di potenza piú bassa possibile in grado di raggiungere l'effetto chirurgico desiderato.
- Non permettere mai ai cavi connessi a questi dispositivi di venire a contatto con la pelle del paziente o dell'operatore durante le attivazioni elettrochirurgiche.
- Non permettere che i cavi connessi a questi dispositivi si dispongano in parallelo o molto vicini ai cavi di altri dispositivi elettrici.
- Quando non vengono utilizzati, riporre sempre gli accessori elettrochirurgici in un luogo isolato e sicuro come una custodia.
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare e testare ciascun dispositivo.
- Smaltire i dispositivi che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita.
- L'attivazione di un dispositivo elettrochirurgico quando non è in contatto con il tessuto bersaglio o in posizione per fornire energia al tessuto bersaglio (folgorazione) può causare un accoppiamento capacitivo.



### Ispezione

Questi dispositivi devono essere ispezionati prima e dopo ciascun utilizzo. Esaminare visivamente i dispositivi per verificare l'eventuale presenza di danni fisici evidenti:

- Parti in plastica spaccate, rotte o in qualche modo distorte.
- Contatti del connettore rotti o notevolmente piegati.
- Danni inclusi tagli, perforazioni, scheggiature, abrasione, rigonfiamenti inusuali, significativo scolorimento.
- Suggerimenti in caso di condizioni di danni, corrosione o disallineamento

### Conservazione e Manipolazione

Gli elettrodi (monouso) devono essere conservati in un luogo pulito, fresco e asciutto. Proteggere da danni meccanici e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Maneggiare con estrema cura.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Conservare al riparo dalla luce solare	<b>STERILE EO</b>	Sterilizzato con ossido di etilene
	Fabbricante		Data di fabbricazione		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
<b>REF</b>	Codice prodotto	<b>LOT</b>	Numero di lotto	<b>EC REP</b>	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Dispositivo monouso, non riutilizzare	<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE
	Limite di temperatura		Data di scadenza		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.