



Per favore leggere attentamente il manuale d'istruzione prima dell'utilizzo.

**1. Struttura principale**

Le parti metalliche della pinza sono fatte di 1Cr18Ni9Ti e il manico della stessa è fatto in plastica ABS.

**2. Principio di funzionamento.**

Dopo che il manico è stato spinto da una forza esterna, il taglierino superiore della pinza forza nel centro del punto che è nella fresa inferiore della pinza. Sotto la trasmissione meccanica di ogni parte, le due estremità della suturatrice devono essere alzate ed estratte fuori della superficie della pelle.

**3. Indice di capacità**

- a. La forza di sutura della deve essere non più di 55N
- b. I componenti metallici della suturatrice hanno la buona funzione di anticorrosione.
- c. La suturatrice è sterilizzata con ossido di etilene. Il residuo di ossido di etilene deve essere inferiore a 10 mg / Kg prima che i prodotti vengono rilasciati dalla fabbrica.

**4. Area di applicazione**

La pinza rimuovi punti è usata per rimuovere le suture dalle ferite.

**5. Come utilizzare il dispositivo**

- a. Inserire sotto la graffetta la parte inferiore della pinza.
- b. Bloccare la parte superiore della pinza di modo che imprimendo la giusta forza, la graffetta cambi forma.
- c. Estrarre la graffetta verticalmente dalla pelle.

**6. Avviso importante**

- a. La pinza deve essere utilizzata da personale medico qualificato.
- b. Il dispositivo è sterilizzato con ossido di etilene.
- c. Non utilizzare il dispositivo in caso sia sporco oppure se la confezione si presenti danneggiata al primo utilizzo.
- d. Utilizzare il dispositivo nel periodo di validità.

**7. Indicazioni e trasporto.**

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente con umidità pari all' 80% . Non porre sopra la confezione altri pesi. Maneggiare con cura.

**8. Periodo di validità**

3 anni

**9. Servizio post vendita**

Per qualsiasi lamentela o domanda si prega di contattare il fornitore del prodotto.



**Ningbo Advan Electrical Co. Ltd**  
Industrial Development Zone  
Fuhai Town, Zhejiang Province  
315332 Cixi City  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



**STERILE EO**



**Shanghai International Holding**  
Corp. GmbH (Europe)  
EiffelstraBe 80  
20537 Hamburg  
GERMANY