



INTRODUZIONE

Lo scopo di questo manuale è di fornire le istruzioni per un normale e corretto uso degli ausili contraddistinti dai seguenti codici, sia da parte del paziente che del suo eventuale assistente/accompagnatore:

- 27721 Deambulatore con ruote
- 27722 Deambulatore
- 27723 Deambulatore con ruote
- 27724 Deambulatore con sedile
- 43130 Deambulatore a 4 ruote
- 43140 Deambulatore a 3 ruote



Questi ausili sono conformi alla direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.

DESTINAZIONE D'USO

I deambulatori cod. 27721/27722/27723/27724/43130/43140 sono stati progettati e realizzati per essere utilizzati all'interno da pazienti con insufficiente uso/sostegno degli arti inferiori. Essi hanno lo scopo di fornire al corpo un supporto che, utilizzato con entrambe le braccia, aiuti o consenta la mobilità altrimenti impossibile o ridotta.

ATTENZIONE! I deambulatori sono destinati prevalentemente ad uso interno e solo su superfici piane. Nel caso fosse necessario utilizzare questi deambulatori in ambienti esterni, si raccomanda il rispetto delle regole del codice stradale al pari di qualsiasi pedone.

MANUTENZIONE

I Deambulatori cod. 27721/27722/27723/27724/43130/43140 non richiedono cure particolari per la loro manutenzione ordinaria. Consigliamo comunque di effettuare regolarmente:

- verifica dell'integrità dei vari componenti
- controllo che viti e dadi risultino ben avvitati
- verifica delle parti meccaniche in movimento e, se il caso, loro oliatura
- pulitura con detergente neutro (non utilizzare prodotti corrosivi o nocivi).

AVVERTENZE! Non usare gli ausili se si rilevano danni o parti mancanti. Non utilizzare per altri scopi diversi da quelli per i quali questi ausili sono stati progettati. Non superare ostacoli o utilizzare su pavimenti sconnessi o non in piano.



Gima S.p.A. - Via Marconi 1 - 20060 Gessate MI

www.gimaitaly.com

Made in China

M-27721-I-Rev.2.09.16