

**44760 – BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA /
TROLLEY** (Prodotto conforme Direttiva 2007/47/EC DISPOSITIVI MEDICI CLASSE I /

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO

INTRODUZIONE /

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.
Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE

La barella professionale da corsia è destinata all'uso in luoghi ospedalieri per facilitare gli spostamenti nel reparto di pronto soccorso e agevolare i trasferimenti del paziente da una qualsiasi apparecchiatura diagnostica.



La barella professionale da corsia ha schienale regolabile a mezzo di una cremagliera automatica a 5 posizioni, sponde ribaltabili tramite fissaggio automatico; il piano rete è dotato agli angoli di paracolpi in gomma sintetica antiurto; è dotata di 4 ruote girevoli di cui 2 dotate di freno indipendente.

COMPONENTI /


The stretcher trolley is supplied completely dismantled, including accessories for assembly.
It consists of the following parts:

1. A - Gambe con Ruote anteriori dotate di freno /
1. B - Gambe con Ruote posteriori /
2. N.2 Traversi centrali /
3. N.2 Traversi laterali /
4. Base Rete con cremagliera automatica e paracolpi /
5. Coppia sponde ribaltabili con fissaggio automatico (Su richiesta) /
6. Materasso nero (Su richiesta) /

Accessori a richiesta: Materasso; Coppia sponde ribaltabili; Cestello; Porta bombola; Asta porta flebo da letto che permette di agganciare l'asta direttamente alla struttura del letto.


Sacchetto con materiale di montaggio /

- N.12 VITI/SCREWS TTQST 8X40 + bulloni e ranelle /
- N.4 VITI/SCREWS TTDE 8X50 + ranelle /
- N.4 VITI/SCREWS TTDE 8X40 + ranelle /

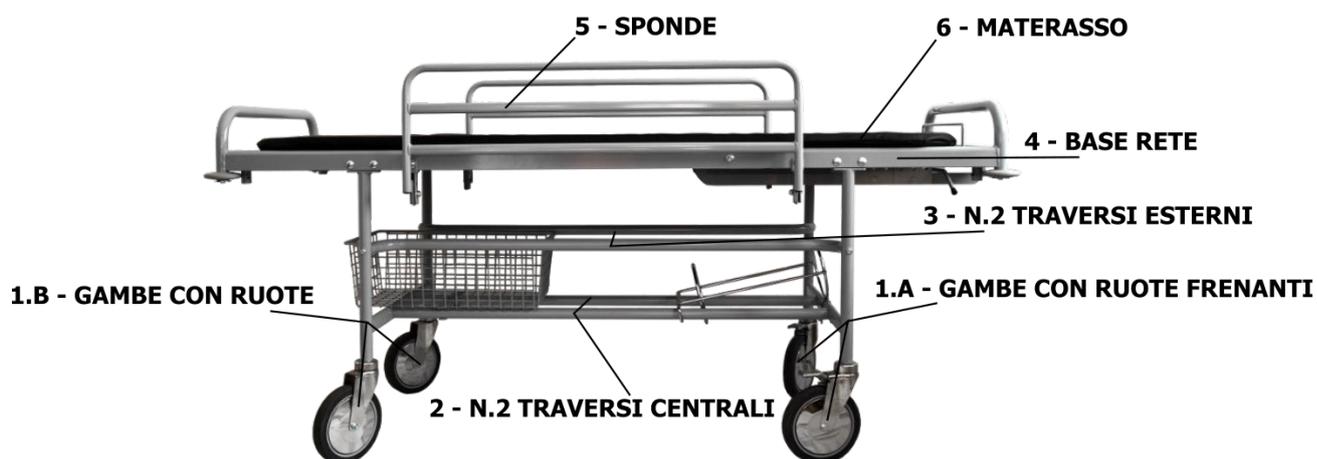

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO /

Fissare le due coppie di gambe dotate di ruote (1.A e 1.B) attraverso i 2 traversi centrali (2) tramite N.4 VITI TTDE 8X40 + ranelle.

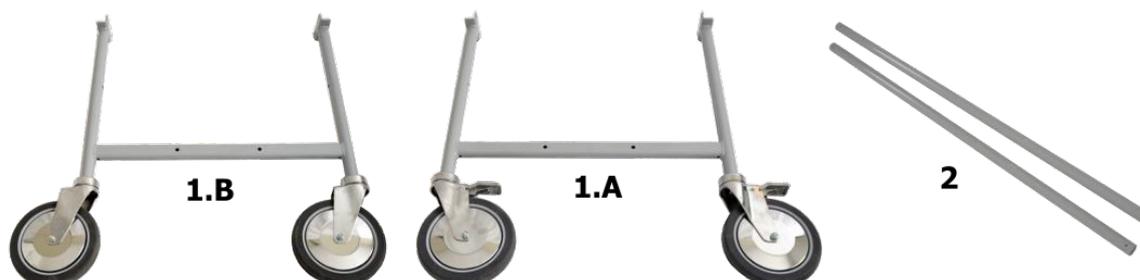



Ora fissare i traversi laterali (3) alla struttura sempre tramite N.4 VITI TTDE 8X50 + ranelle.



Prendere la base rete della barella (4) e fissarla alla struttura inferiore tramite N.8 VITI TTQST 8X40 + bulloni e ranelle.



4

Se fornite, prendere le sponde e fissare alla struttura della rete (4) tramite N.4 VITI TTQST 8X40 + bulloni e ranelle per ciascuna sponda (vedi ingrandimenti nei dettagli).



SCHEDA TECNICA /

Misure /	cm. 202 x 71 x h 90 (78 h rete/
Peso / weight	40 kg
Portata massima /	135 kg

AVVERTENZE D'USO /

- **Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.**
- **Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.**
- **Evitare il contatto diretto con ferite aperte.**
- **Non adatto all'uso in ambienti aperti.**
- **Quando si regola l'altezza del lettino e dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO!**
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
-

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
-

GARANZIA /

- Il prodotto è garantito un anno per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del prodotto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.
-

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO /

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare. **Attenzione:** In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto. GB - Keep in a cool, dry place.		IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive
	IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso GB - Read instructions carefully		IT - Fabbricante GB - Manufacturer
	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight -		IT - Leggere attentamente le istruzioni per l'uso GB - Please read instructions carefully
	IT - Codice prodotto GB - Product code		IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina) GB - Lot number (see box / package)