



Via Valdoni, 19 - 31013 CIMA VILLA DI CODOGNE' (TV)
TEL. 0438 / 470.342 - P.I. 03765100262
www.fisiotech.com - info@fisiotech.com

MANUALE D'USO E DI MONTAGGIO

LETTINO PONTO
ARTICOLO 3023



SICUREZZA E GARANZIA

1. Non utilizzare il lettino come supporto di carichi pesanti (portata max 130 Kg. uniformemente distribuiti).
2. Inoltre la ditta FISIOTECH S.R.L. non risponde per danni a persone e/o causate da uso non conforme del lettino o l'uso dello stesso fatto da personale negligente o non qualificato.
3. Il lettino PONTO gode di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

USO PREVISTO

1. Il lettino PONTO è un lettino di tipo professionale utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Letto 2 segmenti, regolazione dello schienale positiva +35° mediante cerniera manuale a 6 posizioni denominata "RASTOFIX".

Il letto ha una struttura interamente in legno di faggio, gambe dritte, piani imbottiti in poliuretano espanso densità 30 Kg/m³ ignifugo classe 1 IM e rivestiti in similpelle lavabile ignifuga classe 1 IM

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

LARGHEZZA	CM. 65
LUNGHEZZA	CM. 190
ALTEZZA	CM. 78
PORATA	KG. 130 (UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI)

I COLORI

STRUTTURA DEL LETTINO
IN LEGNO :

VERNICIATO TRASPARENTE

IMBOTTITURE:


BLU, NERO, VERDE E PANNA

ACCESSORI SU RICHIESTA

3029	Supporto rotolo carta per letto in legno da cm. 65
3028	Piano inferiore per lettini in legno da cm. 65

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


- 1) Inserire le gambe "E-F-" nelle apposite spine.
- 2) Mettere i dadi "G" nelle sedi facendo attenzione che il filetto sia rivolto verso la spina, quindi inserire le viti "A-A" con le sottoviti "B-B" chiudendo bene con l'apposita chiave.
- 3) Agganciare la cerniera "1" (RASTOFIX) della testiera nell'attacco "I" facendo una leggera pressione.

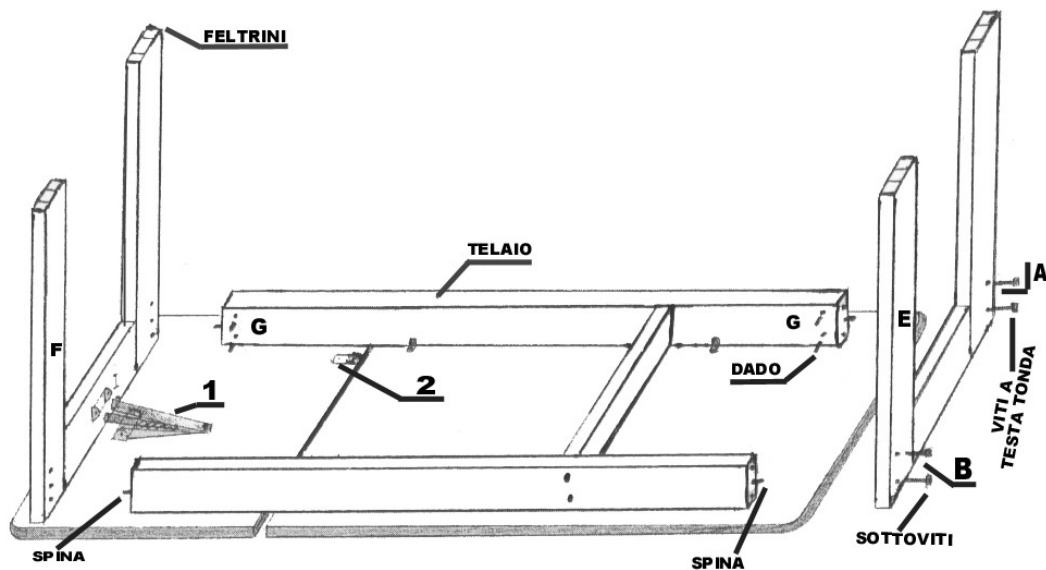

SCHEMA DI MONTAGGIO DEL “PIANO INFERIORE”

SE RICHIESTO

Fissare le piastrine “B” con le apposite viti “A” all’altezza di circa 25 cm e verso l’interno della gamba, quindi appoggiare il piano “C”. Dividendo la distanza infine fissare il piano con le viti “A”.

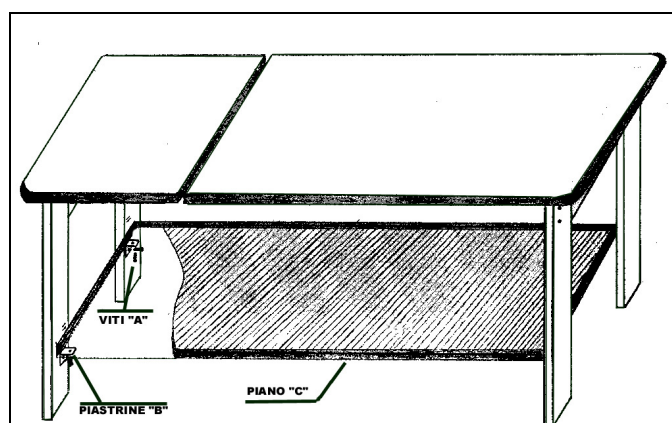

AVVERTENZE



ATTENZIONE!! L'OPERATORE NON DEVE MAI LASCIARE IL PAZIENTE INCUSTODITO PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI CADUTA DEL PAZIENTE DAL LETTINO.

IL COSTRUTTORE NON RISPONDE PER DANNI A PERSONE E/O COSE CAUSATE DALL'USO DEL LETTINO DA PARTE DI PERSONALE NEGLIGENTE E/O NON QUALIFICATO.



MANUTENZIONI

MANUTENZIONI	COME FARE
IL LETTINO PONTO NON HA BISOGNO DI PARTICOLARI MANUTENZIONI, MA SI RACCOMANDA DI:	CONTROLLARE OGNI 3 MESI CIRCA, O DOPO UN USO PARTICOLARMENTE INTENSO, LA CORRETTA CHIUSURA DI TUTTE LE VITI.
PULIZIA DEL LETTINO	<p>PER L'IMBOTTITURA UTILIZZARE UN PANNINO IN MICROFIBRA UNIDO E BEN STRIZZATO CON ACQUA E SAPONE NEUTRO.</p> <p>PER LA PARTE IL LEGNO VERNICIATA UTILIZZARE UN PANNINO NON ABRASIVO ASCIUTTO O AL MASSIMO APPENA INUMIDITO CON UN PO' D'ACQUA.</p>

RICAMBI

CODICE

DESCRIZIONE

RASTOFIX

CERNIERA A SCATTO PER LA MOVIMENTAZIONE DELLA TESTIERA.

CERNIASL

CERNIERE NERE CHE PERMETTONO IL MOVIMENTO DELLA TESTIERA.

IMB3023

IMBOTTITURA COMPLETA LETTINO PONTO CON FORO PER LA RESPIRAZIONE E TAPPO.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che il prodotto denominato LETTINO PONTO ARTICOLO 3023 anno di costruzione 2015 rientra nella CLASSE 1 dei DISPOSITIVI MEDICI ALLEGATO IX (prodotto non invasivo).

Tale prodotto risponde ai REQUISITI ESSENZIALI indicati nell'ALLEGATO 1 della Normativa Comunitaria 93/42/CEE (s.m.i.c.) concernente i DISPOSITIVI MEDICI.

Tale prodotto è conforme alle procedure stabilite nell'ALLEGATO VII della Normativa Comunitaria 93/42/CEE (s.m.i.c.) concernente DISPOSITIVI MEDICI.

No. PROGRESSIVO D.M. 75389

CLASSIFICAZIONE C.N.D. Z12069099

Cimavilla di Codognè,

Matricola No.


Fisiotech s.r.l.
Legale rappresentante



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

SIMILPELLE DENOMINATO: CHAMELEON IMITATION LEATHER NAME: CHAMELEON

SCHEDA TECNICA TEST	UNITA' UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso/Weight	g/m ²		720
Spessore/Thickness	mm.		1,0
Altezza/Width	cm.		140
Rotoli/Roll ca.	mtl.		40
ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at Break	N	EN ISO 1421/98	Longitudinale/lengthwise \geq 450 Trasversale/Crosswise \geq 250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Tear strength	N	UNI 4818-9/92	Longitudinale/lengthwise \geq 40 Trasversale/Crosswise \geq 35
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion-Martindale	Cicli/cycle	EN ISO 5470-2/03	100.000
SOLIDITA' ALLA LUCE/Light solidity	Scala dei blu/ Blue	UNI EN ISO 105-B02	5-6
SOLIDITA' AL SUDORE / Solidity to sweat	Scala dei grigi/grey	UNI EN ISO 105 E04/98	ACIDO/ALCALINO 4-5 Acid/Alcaline 4-5
COMPOSIZIONE/Composition			PVC/ PVC 89% POLIESTERE/POLYESTER 11%

TRATTAMENTO/TREATMENT

SANITIZED: **Antibatterico/Antiacaro. Determina freschezza igienica duratura.**
Antimicrobial/Antiacarus. It determines durable hygienic freshness.

ANTIFIAMMA/FLAME RETARDANT

CHAMELOEN ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.

Chameleon has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratories, according with the Italian and European standards.

BS 5852-1/79

UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 Classe 1IM (UNO I EMME)

LAVAGGIO/CLEANING

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: sciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione detergente neutra, risciacquare bene.

Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum ecc) dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

ESENTE DA:

COL – AXO – FGKW – PCP – PCT - FORMALDEIDE – CD – CR – PB

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impegno del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The over mentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

TRUCIOLARE IN F1 per Nobilitazione "S1"
Pannelli per mobili ed arredamento in ambiente asciutto
Particleboard for interior fitments, dry conditions.

SCHEDA PRODOTTO / PRODUCTS SPECIFICATION
TIPOLOGIA / TYPE:

Caratteristiche e fisico-meccaniche Physical-Technical characteristics	Metodo di prova Test method	Unità di misura Unit	Campo di spessore nominale (mm) Range of nominal thicknesses									
			8-13		> 13-20		> 20-25		> 25-32		> 32-40	
Res.allo strappo/ Internal bond	EN319	N/mm ²	min ¹	med ²	min ¹	med ²	min ¹	med ²	min ¹	med ²	min ¹	med ²
			0,4		0,35		0,3		0,25		0,2	
			13		13		11,5		10		8,5	
C.R.F. Bending strength	EN 310	N/mm ²	1600		1600		1500		1350		1200	
MOB Modulus of elasticity	EN 310	N/mm ²										
Rigont. 24 h max Thickness swelling 24 h	EN 317	%										
Strappo superfic. Surface soundness	EN 311	N/mm ²	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
DENSITA' Density	EN 323	Kg/m ³	710 ± 7%		680 ± 7%		660 ± 7%		650 ± 7%		630 ± 7%	
Toll.spessore Thickness tolerance	EN 324-1	mm.										
Pannelli levigati Sanded boards	EN 324-1	mm.										± 0,2
Panelli non levigati Unsanded boards	EN 324-1	mm.										± 0,3
Toll. Lugh. E largh. Length and width tolerance	EN 324-1	mm.										± 5,0
Squadro Squarhese	EN 324-2	mm/m										± 2,0
Umidità Moisture content	EN 322	%										5 – 13
Formaldeide ³ Formaldehyde ³ E1	EN 120	mg/100g										≤ 8

I valori minimi indicano i requisiti prestazionali minimi (corrispondono a valori massimi nel caso del rigonfiamento minimi negli altri casi) e sono uguali o migliorativi rispetto alla norma EN 312

Minimum values indicate minimum required performance according to EN 312.

I valori formaldeide esprimono il contenuto di formaldeide determinato con il metodo di perforatore, riferito ad un'umidità del 6,5%
The formaldehyde values indicate the formaldehyde content, determined using the perforator method and relate to a panel moisture content of 6,5%



IMBOTTITURA / PADDING

COMPOSIZIONE/ COMPOSITION :
100% POLIURETANO ESPANSO/ POLYURETHANE FOAM
DENSITA' / DENSITY : 30 Kg/m³

ANTIFIAMMA/FLAME RETARDANT
CLASSE 1 IM