



# GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel 199 400 401 – fax 199 400 403 – [gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com)  
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 – fax + 39 02 95380056  
- [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com) – [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## **Cod. 27741 RIALZO WC - con sistema di fissaggio** **Cod. 27743 RIALZO WC - con sistema di fissaggio e poggibraccia**

### **Descrizione:**

Rialzo per WC per facilitare l'appoggio a anziani e persone con difficoltà motorie.

### **Come usare il dispositivo:**

Per applicare i fissaggi laterali capovolgere l'alza water e inserire le due staffe all'interno delle apposite guide premendole leggermente e avvitando il perno in senso orario fino a quando le staffe saranno perfettamente assicurate.

Mantenere le due staffe nella posizione più esterna possibile per consentire l'inserimento dell'alza water sul WC.

Sollevare il coperchio e la tavoletta del water, appoggiare l'alza water sul water facendo attenzione a mantenere le staffe nella parte posteriore dell'alza water.

Ruotare entrambi i perni delle staffe in senso orario fino a quando si avvertirà una leggera resistenza.

Assicurarsi che l'alza water sia ben fissato al WC e che non si sposti lateralmente.

### **Avvertenze:**

I sistemi di fissaggio laterali sono stati progettati per un impiego semplice e senza sforzi: è importante però non continuare a ruotare i perni quando le staffe si trovano già a contatto con il WC.

Prima di ogni impiego controllare che l'alza WC sia perfettamente fissato sul WC.

Non superare la portata massima indicata.

Monitorare costantemente durante l'impiego le persone con ridotte capacità fisiche o mentali.

### **Istruzioni per la pulizia:**

L'alza WC e tutte le sue parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro anche in totale immersione.

Il dispositivo, senza le staffe di fissaggio, può essere sterilizzato in autoclave per 1 minuto a 85°C.

**Portata:** max 200 Kg.

**Dimensioni:** 40,7x36,6 cm (altezza 10 cm )

**Dimensione del foro:** 26x20 cm