

Stetoscopio digitale Littmann® CORE 3M™

Guida di avvio rapido

Caricare lo stetoscopio Littmann CORE prima del primo utilizzo. Una volta carico, lo stetoscopio è pronto per essere utilizzato.

Eko Scaricare l'app Eko (ove disponibile) dall'Apple App Store® o dal Google Play Store® per accedere a funzionalità aggiuntive dello stetoscopio Littmann CORE, compresi l'ascolto wireless, il controllo e filtraggio audio avanzati, il rilevamento automatico di malattia cardiaca (ove disponibile, potrebbe richiedere un abbonamento aggiuntivo) e il salvataggio e la condivisione delle registrazioni.




Scansionare con la fotocamera del telefono per scaricare l'app Eko.

Contenuto della confezione

- Accessorio digitale Eko CORE e stetoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Set aggiuntivo di olivette morbide conformabili 3M Littmann ad aggancio stretto (piccole)
- Ghiera antifreddo
- Cavo di ricarica USB
- Guida di avvio rapido

Olivette

Inserire le olivette in avanti.

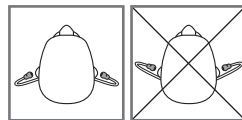

Volume

Utilizzare i pulsanti (+) e (-) per regolare il volume. Esistono 7 livelli di volume.

Accensione e spegnimento

Quando CORE è spento, funziona come stetoscopio non amplificato.

Per accendere lo stetoscopio CORE, premere l'interruttore di accensione. La luce inizierà a lampeggiare. Si sentirà un suono amplificato e filtrato nelle olivette.

Funzionalità di telemedicina e intelligenza artificiale

Eko offre funzionalità di telemedicina e intelligenza artificiale che richiedono l'adesione a un abbonamento al software (ove disponibile, venduto separatamente).

È possibile sottoscrivere un abbonamento online all'indirizzo ekohealth.com

Eliminazione attiva del rumore

Lo stetoscopio CORE include l'eliminazione attiva del rumore per sopprimere il rumore ambientale dell'ambiente circostante. L'eliminazione attiva del rumore può essere attivata o disattivata tramite l'app Eko.

Notifiche

(●●)
(lampeggiante)

Lo stetoscopio CORE è acceso (ON) e sta cercando il dispositivo

● (giallo)

Lo stetoscopio CORE è spento e in carica

(●●) (giallo)

Lo stetoscopio CORE ha la batteria scarica

○

Lo stetoscopio CORE è acceso (ON) e connesso

● (verde)


Lo stetoscopio CORE è completamente carico

(●●) (blu)

Lo stetoscopio CORE sta registrando

Registrazione

Una volta stabilita la connessione all'app Eko, premere il pulsante (○) per iniziare la registrazione.

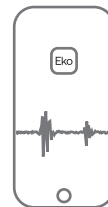

Carica

Collegare il cavo micro USB allo stetoscopio CORE e utilizzare un caricabatterie USB 5 V da muro con certificazione UL o marchio CE. La carica completa dello stetoscopio CORE richiede all'incirca 2 ore. Quando sarà completamente carico, la luce diventerà verde.

Manuale utente

Consultare il manuale utente prima di utilizzare lo stetoscopio Littmann CORE. Per visualizzare il manuale, visitare: ekohealth.com/getstarted
Per ulteriori informazioni sui dispositivi 3M, visitare HCBregulatory.3M.com

Assistenza tecnica e supporto

Negli Stati Uniti, visitare littmann.com/service o chiamare 1-800-228-3957. Nel resto del mondo, visitare littmann.com per cercare il contatto dell'ufficio 3M di zona.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc.
Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC.
Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG
LBL 143 Rev B