



Medicazioni
con silicone
Sottili,
Indolori,
a Lunga tenuta

Sil-ICON

UNA NUOVA ICONA
SI AGGIUNGE AL TUO PROGRAMMA

LE FERITE CRONICHE... UN VERO PROBLEMA SOCIALE



Quello delle lesioni cutanee è un problema spesso sottovalutato, nonostante costituisca una patologia a forte impatto sociale: in Italia, si stima che siano quasi due milioni le persone con lesioni cutanee croniche¹. Il trattamento di lesioni croniche costa al SSN quasi 1 miliardo di Euro all'anno².

A causa dell'invecchiamento della popolazione e della diffusione di patologie come diabete, obesità e problemi vascolari, nei prossimi anni, questa incidenza si prevede che cresca.

Gestire correttamente le lesioni, siano esse acute o croniche, rappresenta una vera e propria sfida per tutti gli operatori sanitari.



IL DOLORE DURANTE IL CAMBIO DELLA MEDICAZIONE... SI PUÒ RIDURRE O ELIMINARE!

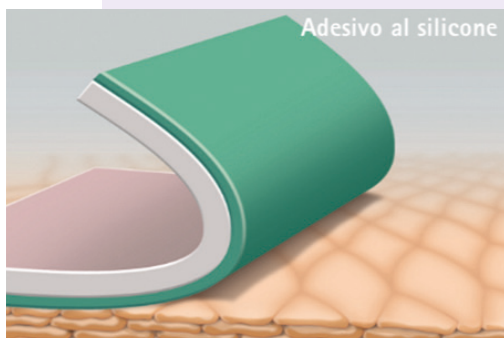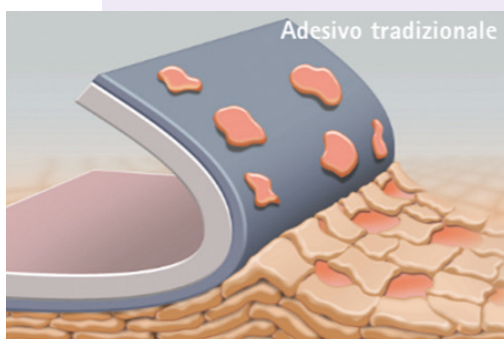

La sostituzione della medicazione è un'operazione che può provocare dolore. L'utilizzo di medicazioni inappropriate, in particolare quelle che aderiscono al letto della lesione, possono causare dolore e traumi in fase di rimozione e cambio della stessa. Il dolore può essere gestito attraverso un'accurata valutazione della lesione e la scelta della medicazione più idonea.

È essenziale scegliere medicazioni che al momento della rimozione provochino il minimo dolore possibile. Per evitare danni alla ferita occorre utilizzare medicazioni non traumatizzanti.

È provato che le medicazioni a base di silicone causano meno dolore al momento del cambio della medicazione.³

1. Dati AIUC – Associazione Italiana Ulcere Cutanee onlus

2. Dati FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (<http://www.fnopi.it/attualita/costi-in-crescita-per-piaghe-ferite-e-riparazione-tissutale-id1184.htm>).

3. Principles of best practice: Minimizing pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004.

Non tutte le lesioni sono uguali, ma tutte andrebbero trattate con medicazioni atraumatiche!



Sil-ICON MEDICAZIONI SOTTILI, INDOLORI, A LUNGA TENUTA

Un'ampia gamma di medicazioni al silicone, progettate dagli esperti, pensate per i pazienti.

Sottili

Per la gestione di lesioni con differenti livelli di essudato o ferite acute.

Indolori

Al momento della rimozione, sono atraumatiche⁴ sulla ferita e sulla cute perilesionale. Questa proprietà promuove il processo di guarigione e favorisce la compliance del paziente.

A Lunga tenuta

Aderiscono alla lesione senza possibilità di fuoriuscite di essudato dalla cute perilesionale e creano un ambiente umido ottimale per la guarigione della lesione.

Tutte le medicazioni della gamma **Sil-ICON** sono state progettate per ridurre al minimo il dolore e il trauma della ferita. Sono particolarmente indicate per la cute fragile e sensibile.

Askina® DresSil

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato adesivo in silicone

INDICAZIONI⁵

Askina® DresSil, Askina® DresSil Border, Askina® DresSil Sacrum e Askina® DresSil Heel sono indicate per la corretta gestione di lesioni con livello di essudato medio-alto come:

- Ulcere da pressione⁵
- Ulcere venose e arteriose degli arti inferiori
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite chirurgiche
- Ustioni di I° e II° grado
- Siti di espianto
- Lacerazioni cutanee

VANTAGGI

Lo strato adesivo in silicone comporta una serie di vantaggi:

- Adesione sicura al fondo della lesione
- Cambio della medicazione indolore⁶
- Adattabilità e conformabilità a tutte le aree da trattare, anche quelle più difficili
- Ritagliabile, a seconda delle necessità
- Aumenta il comfort del paziente⁶


Askina® DresSil è una medicazione in schiuma di poliuretano con uno strato di morbido silicone adesivo a contatto con la lesione da un lato, di un film permeabile al vapore ed impermeabile a liquidi e batteri dall'altro. Priva di bordo adesivo, combina la capacità di assorbimento della schiuma, con quella adesiva e atraumatica del silicone a contatto con la lesione.



5. Thomas S., Atraumatic dressings. World Wide Wounds, 2003

6. Meuleneire F., Rücknagel H., Soft Silicone Made Easy, Wounds International, May 2013.

CARATTERISTICHE

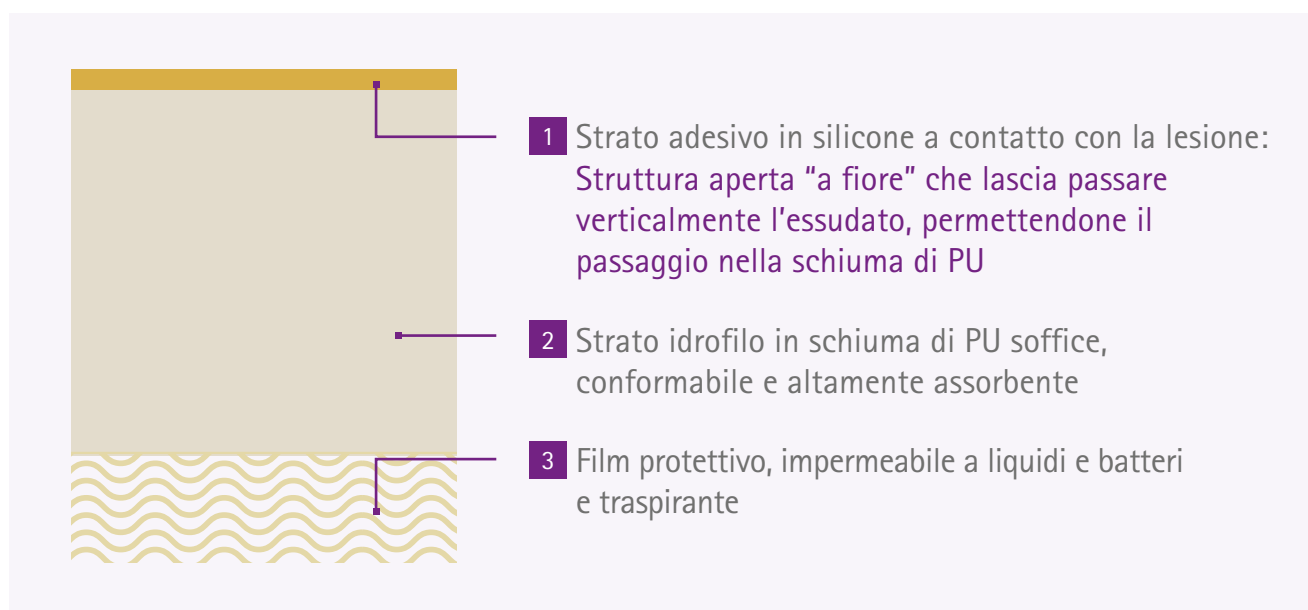

ESEMPI D'USO

Askina® DresSil può essere utilizzata anche sotto bendaggio elastocompressivo.⁷



Askina® DresSil Border

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato adesivo in silicone e bordo adesivo

Il bordo adesivo in silicone di 15mm assicura una perfetta tenuta anche in zone del corpo soggette a forze di taglio e di frizione. **Askina® DresSil Border** ha le stesse caratteristiche ed indicazioni d'uso di **Askina® DresSil**, con la sola differenza del bordo adesivo in silicone.



ESEMPI D'USO

Askina® DresSil Border permette al paziente di poter fare la doccia senza rimuovere la medicazione.





Askina® DresSil Sacrum

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato adesivo in silicone conformata per il sacro

La particolare forma della versione Sacrum, assicura il massimo comfort per il paziente con lesioni sacrali.

- Resistente all'acqua, ai batteri e altamente traspirante
- Elevata capacità di assorbimento
- Adesione sicura al fondo della lesione
- Cambio della medicazione indolore⁸
- Buona adattabilità e conformabilità alle aree da trattare, anche quelle più difficili da raggiungere e con piaghe cutanee
- Migliora il comfort per il paziente
- Rimozione atraumatica⁸



Askina® DresSil Heel

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato adesivo in silicone conformata per il tallone

La particolare forma assicura il massimo comfort per il paziente con lesioni localizzate sul tallone. Protezione di tallone e malleolo.

- Resistente all'acqua, ai batteri e altamente traspirante
- Elevata capacità di assorbimento
- Adesione sicura al fondo della lesione
- Cambio della medicazione indolore⁹
- Buona adattabilità e conformabilità alle aree da trattare, anche quelle più difficili da raggiungere e con piaghe cutanee
- Migliora il comfort per il paziente
- Rimozione atraumatica⁹



Askina® DresSil Border Lite

Medicazione sottile in schiuma di poliuretano con strato adesivo in silicone a contatto della lesione



INDICAZIONI


Askina® DresSil Border Lite è indicata per la gestione di lesioni poco essudanti o ferite acute come:

- Ulcere da pressione
- Ulcere diabetiche
- Ulcere degli arti inferiori
- Ferite da trauma
- Ferite chirurgiche
- Ustioni superficiali e parziali
- Lesioni da radiazioni
- Tessuti fragili

VANTAGGI


Lo strato adesivo in silicone comporta una serie di vantaggi:

- Sottile, discreta e altamente conformabile
- Cambio della medicazione indolore¹⁰
- Particolarmente indicata per cute fragile
- Può essere sollevata e riposizionata durante l'utilizzo, agevolando l'osservazione della lesione
- Si adatta facilmente a diversi contorni anatomici
- Rimane in situ fino a 7gg

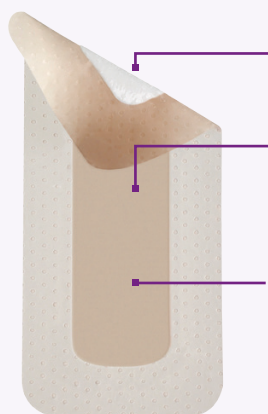


- 1 Strato idrofilo in schiuma di PU soffice e conformabile per una semplice applicazione e il comfort del paziente
- 2 Strato adesivo in silicone traforato che:
 - Minimizza i traumi del fondo della lesione
 - Riduce al minimo il dolore alla rimozione
- 3 Film protettivo in PU, impermeabile ai batteri e traspirante:
 - Protegge la lesione da batteri/agenti esterni
 - L'eccesso di vapore acqueo viene eliminato attraverso il film di poliuretano, riducendo il rischio di macerazione della cute perilesionale

PERFORMANCE¹¹⁻¹²

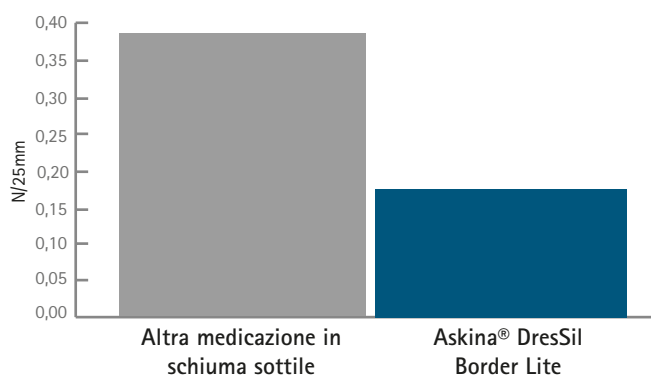

Rimozione atraumatica

Resistenza alla trazione nettamente inferiore e, di conseguenza, un livello di dolore significativamente più basso al momento della rimozione della medicazione.

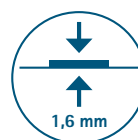

Spessore



Capacità di trattenerne i fluidi

10. Thomas S., Atraumatic dressings. World Wide Wounds, 2003

11. Williams P. et al.; A Comparative in-vitro study to assess the performance characteristic of several foam dressings. EWMA 2018, Abstract #92.

12. Buggedo A., Comparative Assessment of a Novel Thin Polyurethane Foam Dressing. EWMA 2017.



Askina® SilNet Plus

Medicazione sottile in silicone, di contatto, aderente su entrambi i lati

INDICAZIONI

Askina® SilNet Plus è indicata per la gestione di lesioni acute e croniche con livelli di essudato da basso ad elevato come:

- Ulcere da pressione
- Ulcere venose e arteriose
- Ferite da trauma
- Ferite chirurgiche
- Ustioni di II° grado
- Lacerazioni cutanee
- Siti di espianto parziali


VANTAGGI

Lo strato adesivo in soffice silicone comporta una serie di vantaggi:

- Previene l'adesione della medicazione secondaria
- Può essere rimossa facilmente, proteggendo il tessuto di granulazione e minimizzando il dolore per il paziente
- Può essere usata in combinazione alla terapia a pressione negativa o al di sotto di bendaggi compressivi
- Compatibile con trattamenti topici
- Può rimanere in situ fino a 14gg

Gli strati in silicone sono spesso utilizzati per aumentare il confort del paziente durante il cambio della medicazione. La particolare trama «a maglia» aperta in poliestere rivestita su entrambi i lati da soffice silicone, permette di osservare la ferita senza essere rimossa, agevola il passaggio dell'essudato ad una medicazione secondaria assorbente e previene la macerazione dei bordi perilesionali. La bassa aderenza dello strato in morbido silicone, inoltre, permette di ridurre al minimo il rischio di traumi e dolore durante il cambio della medicazione.

UNA NUOVA TECNOLOGIA CON TRAMA PIÙ LARGA ANCHE PER FERITE PARTICOLARMENTE ESSUDANTI!

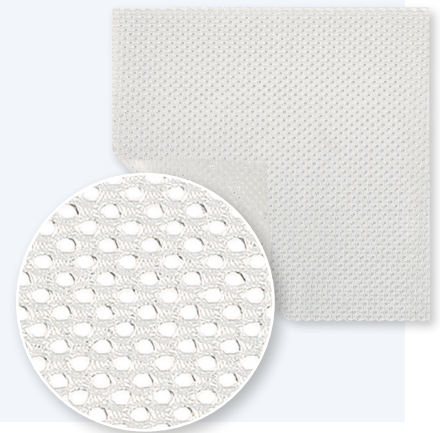

PERFORMANCE¹³

Estensibilità (kgfcm⁻¹)



Massimo comfort

Se confrontata con altri strati di contatto in silicone, **Askina® SilNet Plus** dimostra di avere una maggiore estensibilità. Questa caratteristica la rende più confortevole quando indossata, permettendone l'utilizzo anche in zone difficilmente raggiungibili.

13. Chart reference AMS data on file P2772.

Askina® DresSil	DIMENSIONI MEDICAZIONE	QUANTIT	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	5x7cm	10pz	5295710F	
	10x10cm	10pz	5291010	04.49.18.603
	15x15cm	10pz	5291510F	
	10x20cm	10pz	5	04.49.18.606
	20x20cm	5pz	5292005F ₉	
			1	
			2	
			0	

Askina® DresSil Border	DIMENSIONI MEDICAZIONE / SUPERFICIE ASSORBENTE	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	7,5x7,5cm / 4,5x4,5cm	10pz	5397510	
	10x10cm / 7x7cm	10pz	5391010	04.49.18.603
	10x20cm / 7x17cm	10pz	5391210	04.49.18.606
	15x15cm / 12x12cm	10pz	5391510F	
	15x20cm / 12x17cm	10pz	5395210	
	20x20cm / 17x17cm	5pz	5392005	

Askina® DresSil Sacrum	DIMENSIONI MEDICAZIONE / SUPERFICIE ASSORBENTE	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	16x17,5cm / 13x14,5cm	5pz	5491605F	

Askina® DresSil Heel	DIMENSIONI MEDICAZIONE / SUPERFICIE ASSORBENTE	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	22x21,6cm / 18,9x18,5cm	5pz	5592205F	

Askina® DresSil Border Lite	DIMENSIONI MEDICAZIONE / SUPERFICIE ASSORBENTE	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	5,5x12cm / 2,3x9 cm	10pz	5385210	
	10x10cm / 7,4x7,4 cm	10pz	5381010	04.49.18.603
	10x20cm / 5x15cm	10pz	5381210	04.49.18.606

Askina® SiNet Plus	DIMENSIONI MEDICAZIONE	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO	NUOVI LEA
	5x7,5cm	10pz	5185710	
	10x10cm	10pz	5181010	
	10x20cm	10pz	5181210	



Distributore in Italia:
B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia
Tel 02 662181 | Fax 02 66218357
www.bbraun.it