

ITALIANO

19/04/1/S CINTURA PETTORINA CON CHIUSURA DI SICUREZZA
20/04/1/S CINTURA ADDOMINALE CON CHIUSURA DI SICUREZZA
21/04/1/S CINTURA PELVICA CON CHIUSURA DI SICUREZZA

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito

DESCRIZIONE

Ref. 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Cinture posturali realizzate in tessuto poliammide idrorepellente ignifugato in classe 1. con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM e nastri in polipropilene con chiusura di sicurezza.

INDICAZIONI

Cinture posturali per il mantenimento della postura dei pazienti su carrozzine, comode e per la prevenzione delle cadute.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo deve essere posizionato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento. Nella regolazione dei nastri, deve passare una mano piana tra il paziente e il dispositivo. Si raccomanda di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dalla cintura.

Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

COMPOSIZIONE

Tessuto esterno: 92% poliammide 8% poliuretano, ignifugato in classe 1. Imbottitura: poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM

MODALITÀ DI LAVAGGIO



La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		Fabbricante
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con lattice di gomma naturale

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF 21/04/1/S (GIMA 43175)
20/04/1/S (GIMA 43176)
19/04/1/S (GIMA 43177)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
MADE IN ITALY

