

Procedura operativa del kit di test rapido Group A Streptococcus



Campione ottenuto tramite tampone faringeo:

Inserire un tampone sterile nella gola, evitando il contatto con la lingua, la cavità orale e i denti. Toccare delicatamente il tampone all'area infiammata delle fauci o delle tonsille, e ruotarlo per raccogliere un campione sufficiente.




Preparazione del diluente

Aprire il diluente del campione A (tappo viola). Aggiungere 4 gocce di Diluente del Campione di Estrazione B nel Diluente del Campione di Estrazione A.



Preparazione della miscelazione

Caricare 50 µL della miscela del campione nella cartuccia di test.

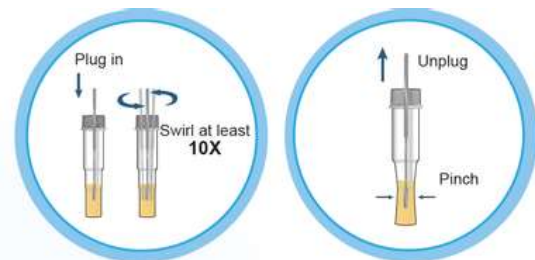

Caricamento del campione

Avvitare il tappo viola e quindi aprire il tappo bianco. Aggiungere 2 gocce della miscela del campione nell'apposita cavità della cartuccia di test.



⑤ Test

Inserire la cartuccia di test nel sistema e seguire la modalità di test, sia che sia la modalità di test standard o la modalità di test rapido, e leggere il risultato dopo 5 minuti.

